

발 간 등 록 번 호

11-1352297-000116-10

2024 장애인보조기기 교부사업 품목 정보 안내서



보건복지부
국립재활원



중양보조기기센터

Contents

I

장애인보조기기 교부사업

1

1. 장애인보조기기의 정의와 필요성	2
2. 장애인보조기기 교부사업 개요	2
3. 장애인보조기기 교부절차	10
4. 시·군·구청 직접 구입 교부시 유의사항	16
5. 행정사항	17

II

장애인보조기기 교부사업 42개 품목

21

자체·뇌병변장애

목욕의자	22
경사로(휴대용 경사로)	30
보행차	34
탁자형 보행차	41
음식섭취 보조기기(식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대)	42
음식섭취 보조기기(머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시)	44
음식섭취 보조기기(음료 및 음료 취수용 보조기기)	45
독립형 변기 팔 지지대 및 등 지지대	46
기립틀 및 기립을 위한 지지대(기립훈련기)	49
이동변기	50
환경 제어 장치	56
지지대 및 손잡이(안전손잡이)	58
목욕용 미끄럼방지용품	63

자체·뇌병변·심장·호흡장애

미끄럼 및 회전을 위한 보조기기	70
의류 및 신발(장애인용의복)	71
휠체어 액세서리(휠체어용 탑승자 고정장치 및 기타액세서리)	95
침대 및 탈착식 침대 판/전동조절식 매트리스 지지단(전동침대)	99
개인 비상경보시스템(낙상알림기)	109
독서용 탁자, 책상 및 독서대	110

심장장애

욕창예방 방식	111
욕창예방 매트리스	116

2024 장애인보조기기 교부사업 품목 정보 안내서

시각장애

영상 확대 비디오 시스템(독서확대기)	118
문자판독기(광학문자판독기)	125
음성유도장치(음향신호기리모컨)	128
녹음 및 재생장치(음성증폭기)	129

청각장애

신호장치(시각신호표시기)	130
---------------------	-----

뇌병변·지적·자폐성·청각·언어장애

대화용장치	137
-------------	-----

III

장애인보조기기 상담 및 정보제공처

141

1. 보건복지부 보조기기센터	142
2. 정부 부처별 보조기기 사업 및 문의처	144
3. 보조기기 품목 등록업체	146

IV

장애인보조기기 교부사업 참고서식

149

1. [서식 1] 20 년 장애인보조기기 교부사업 집중신청기간 운영계획	150
2. [서식 2] 장애인 등록 및 서비스 신청서	151
3. [서식 3] 장애인보조기기 교부사업 안내문	155
4. [서식 4] 서비스 지원 종합조사표	156
5. [서식 5] 장애인보조기기 맞춤형 상담·평가 의뢰서	163
6. [서식 6] 장애인보조기기 교부사업 평가표	164
7. [서식 7] 장애인보조기기 신청(□ 변경 □ 취소) 확인서	169
8. [서식 8] 장애 정도 심사용 진단 의뢰서	170
9. [서식 9] 장애 정도 심사용 진단서	171
10. [서식 10] 장애인보조기기(□ 교부 □ 대여 □ 사후관리(수리, 점검 등)) 의뢰서 ...	172
11. [서식 11] 장애인보조기기 교부 확인서	173
12. [서식 12] 장애인보조기기(□ 교부 □ 대여 □ 사후관리(수리, 점검 등)) 비용청구서	174
기타. 행복e음 사용법	175

V

자주묻는 질문 Q&A

181

2024
장애인보조기기 교부사업
품목 정보 안내서

I

장애인보조기기 교부사업

1. 장애인보조기기의 정의와 필요성
2. 장애인보조기기 교부사업 개요
3. 장애인보조기기 교부절차
4. 시·군·구청 직접 구입 교부시 유의사항
5. 행정사항

장애인보조기기 교부사업

01 ▶ 장애인보조기기의 정의와 필요성

1. 장애인보조기기의 정의

장애인등의 신체적·정신적 기능을 향상·보완하고 일상 활동의 편의를 돕기 위하여 사용하는 각종 기계·기구·장비로서 보건복지부령으로 정하는 것을 말함(장애인·노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용촉진에 관한 법률 제3조)

2. 장애인보조기기의 필요성

- (1) 의료적인 처치로는 극복하지 못하는 장애를 경감 또는 완화시켜 줌으로써 교육, 직업 활동을 가능하게 하고 사회심리 재활을 지원
- (2) 잠재된 가능성을 발굴해 궁극적으로 장애인이 최대한 자율적인 생활을 할 수 있게 하고 타인과 보다 의미있는 관계를 맺으면서 살 수 있도록 돕는 역할을 수행
- (3) 장애인 가족, 서비스 제공자 등 관련 인력의 신체적, 정신적 부담을 경감시키는 동시에 장애인과 가족들의 사회참여를 제고함

02 ▶ 장애인보조기기 교부사업 개요

1. 장애인보조기기 교부사업의 목적

저소득 장애인에게 일상생활에 필요한 장애인보조기기를 지원하여 장애인의 자립생활 및 복지 증진 도모

2. 교부대상자

- (1) 장애종별 : 「장애인복지법」에 따라 등록된 지체·뇌병변·시각·청각·심장·호흡·언어·자폐성·지적 장애인
- (2) 소득수준 : 「국민기초생활보장법」에 따른 수급자 및 차상위 계층

※ 차상위계층 : 차상위계층 확인사업, 차상위자활, 차상위본인부담, 차상위장애인

(차상위 장애수당, 차상위 장애인연금 부가급여 등), 한부모 가족지원, 차상위 자산형성 지원 등

2024 장애인보조기기 교부사업 품목 정보 안내서

3. 장애유형별 지원품목 및 지원기준

지원품목	품목코드	장애유형	지원 기준	내구 연한	기능
욕창예방 방석	1 04 33 03	심장	35만원	3년	체압분산 및 습기를 경감하여 좌석면의 욕창 방지
욕창예방 매트리스	1 04 33 06	심장	38만원	3년	체압분산 및 습기를 경감하여 등받이 면의 욕창 방지
음성유도장치 (음향신호기 리모컨)	3 12 39 09	시각	3만원	2년	시각장애인용 음성 유도기 및 음향 신호기를 무선으로 작동시킴
※ 음성유도장치는 신청 장애인의 거주지역 및 장애인의 이용빈도가 높은 구역 신호등에 리모콘식 음성유도장치가 설치되어 있어 음성유도장치(리모콘식)를 활용할 수 있는 지자체에서 교부					
음성시계	3 22 27 12	시각	3만원	2년	버튼을 눌러 시간을 청각신호로 나타냄
신호장치 (시각신호표시기)	3 22 27 04	청각	58만원	3년	청각신호를 시각적신호(빛, 진동)로 변환하여 표시
진동시계	3 22 27 13	청각	5만원	2년	청각신호를 대신하여 진동으로 알람 표시
보행차	3 12 06 06	지체·뇌병변	25만원	5년	체간 균형능력이 저하 된 경우 보행 훈련용 혹은 일상생활 보행 시 편의를 도모함
좌석형 보행차	3 12 06 09	지체·뇌병변	20만원	5년	
탁자형 보행차	3 12 06 12	지체·뇌병변	40만원	5년	
※ 양팔 조작형 보행용 보조기기(3 12 06)인 보행차, 좌석형 보행차, 탁자형 보행차는 서로 기능 등이 유사하여 연간 이 중 한 품목만 신청이 가능하며, 교부받은 품목의 내구연한 내 다른 품목을 교부할 수 없음					
음식섭취 보조기기 (음식 및 음료 섭취용 보조기기)	3 15 09 27	지체·뇌병변	5만원	1년	그립이 어려운 경우 팔의 움직임으로 독립적인 식사 가능
음식섭취 보조기기 (식사도구(칼·포크), 젓가락 및 빨대)		지체·뇌병변			팔의 굽힘이 어렵거나 손의 움직임이 어려운 경우 사용하며 독립적인 식사 및 음료 섭취가능
음식섭취 보조기기 (머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시)		지체·뇌병변			쥐기 능력이 어려운 경우 사용하여 독립적인 잡기가 가능
음식섭취 보조기기 (접시 및 그릇)		지체·뇌병변			한손으로 음식을 모으기 어려울 때 사용하며, 흠이파져있어 음식담기가 편리함
음식섭취 보조기기 (음식 보호대)		지체·뇌병변			수저에 음식담기를 편리하게 하기 위해 사용
기립틀 및 기립을 위한 지지대 (기립훈련기)	3 05 36 03	지체·뇌병변	170 만원	3년	기립자세 유지를 도와 기립근 근력을 강화하여 자세 변형 완화

장애인보조기기 교부사업

지원품목	품목코드	장애유형	지원 기준	내구 연한	기능
헤드폰(청취증폭기)	3 22 18 38	청각	80만원	3년	작은 소리를 크게 증폭시켜 청취
영상 확대 비디오 시스템 (독서확대기)	3 22 03 18	시각	270만원	2년	시각정보를 확대 할 수 있는 보조기기
문자판독기 (광학문자판독기)	3 22 30 21	시각	80만원	2년	문자인식기능으로 인쇄물의 문자를 음성 으로 출력
목욕의자	3 09 33 05	지체·뇌병변	60만원	5년	신체적 균형능력 저하 및 기립자세유지의 제한으로 인해 앉아서 목욕하는 것을 지원
녹음 및 재생장치	3 22 18 03	시각	90만원	4년	MP3, DAISY와 같은 파일로 저장된 책, 신문, 홍보물 등을 음성으로 출력
경사로 (휴대용 경사로)	3 18 30 15	지체·뇌병변	53만원	8년	단차의 극복이 어려운 경우 설치하여 진입의 접근성을 향상

※ 전·수동휠체어, 전동스쿠터 및 보행차 등 이동보조기기 사용 중인 장애인여부 확인 필요

이동변기	3 09 12 03	지체·뇌병변	60만원	5년	독립적인 이동이 어려워 배변활동이 활동이 어려움을 해소하고 균형유지가 어려워 일반 변기 사용이 어려울 때 활용
미끄럼 및 회전을 위한 보조기기	3 12 31 03	지체·뇌병변· 심장·호흡	35만원	4년	독립적이고 손쉽게 휠체어 및 침대 등으로 옮겨 앉기 가능

※ 품목의 범위: 트랜스퍼 보드, 트랜스퍼 매트 및 회전좌석

의류 및 신발 (장애인용의복)	3 09 03	지체·뇌병변· 심장·호흡	15만원	2년	옷입기, 이동시 방한 및 방수가 필요할 때 활용 가능
휠체어 액세서리 (휠체어용 탑승자 고정장치 및 기타액세서리)	3 12 24	지체·뇌병변· 심장·호흡	10만원	5년	휠체어사용자의 넘어짐을 예방하고 전동 휠체어 등의 조종장치를 보호

※ 품목의 범위: 벨트류(가슴벨트, H형 벨트, 대퇴벨트 등), 덮개류(전동휠체어 컨트롤러 커버, 휠체어 덮개), 거치대류
(스마트폰 거치대, 우산거치대 등)

독립형 변기 팔 지지대 및 등지지대	3 09 12 25	지체·뇌병변	25만원	5년	변기 옮겨 앉기를 도와 장애인 및 노인 등의 일상생활 지원
------------------------	------------	--------	------	----	-------------------------------------

※ 품목의 범위: 변기용 팔지지대(시공하여 부착된 팔 지지대 및 손잡이 해당 안되며, 변기에 탈부착으로 되는 팔 지지대는
해당됨)

환경 제어 장치	3 24 13 03	지체·뇌병변	40만원	3년	주변 환경 제어에 어려움이 있을 때 활용
----------	------------	--------	------	----	------------------------

2024 장애인보조기기 교부사업 품목 정보 안내서

지원품목	품목코드	장애유형	지원 기준	내구 연한	기능
대화용장치	3 22 21 09	뇌병변·지적· 자폐성· 청각·언어	89만원	3년	발성 및 발화 제약으로 인한 독립적 표현 및 소통 지원
지지대 및 손잡이 (안전손잡이)	3 18 18	지체·뇌병변	10만원	5년	이동하거나 자세를 유지하기 위해 몸을 올바르게 지지하도록 도와주는 장치
* 핸드레일 미해당					
침대 및 탈착식 침대 판/전동조절식 매트리스 지지단 (전동침대)	3 18 12 10	지체·뇌병변· 심장·호흡	120 만원	10년	높이나 각도를 조절할 수 있도록 매트리스 고정판이 한 부분 이상으로 되어 있는 침대
장애인용 유모차	3 12 27 07	지체·뇌병변	150 만원	5년	자세 일부지지 및 보조인의 도움으로 추진 하여 이동 가능
바닥 특수 앉기 자세유지용 장치 (피더시트)	3 18 09 21	지체·뇌병변	80만원	3년	앉기 자세 유지를 지원하여 학습 및 식사 등 일상생활활동 증진
목욕용 미끄럼방지용품	3 09 33 06	지체·뇌병변	5만원	3년	욕실 및 화장실 등의 미끄러운 바닥에서 사용하여 낙상 예방
소변수집장치	1 09 27 18	지체·뇌병변· 심장·호흡	120 만원	3년	자동소변흡수장치를 통해 자가 소변처리 가능
※ 소변수집장치는 소모성 소변수집장치가 아닌, 전자기계식 기능의 자동흡입장치에 한함					
대체입력장치 (스위치)	3 22 36 12	뇌병변	5만원	3년	스위치를 이용하여 대화용 장치의 필요한 어휘 등 선택 가능
개인 비상경보시스템 (낙상알림기)	3 22 27 18	지체·뇌병변· 심장·호흡	55만원	5년	낙상시 신속한 대처를 위해 보호자에게 알람 신호를 제공
독서용 탁자, 책상 및 독서대	3 18 03 06	지체·뇌병변· 심장·호흡	100 만원	3년	휠체어 장애인이 일상생활에서 학습, 독서 및 기타활동 등의 접근성 제고
※ 품목의 범위: 높낮이 조절 책상에 한함					
기억지원 보조기기	3 22 27 16	지체·뇌병변· 지적·자폐	3만원	5년	약 복용 알림을 통해 규칙적인 약복용 및 과다복용 예방
※ 품목의 범위: 투약알림기에 한함					

장애인보조기기 교부사업

지원품목	품목코드	장애유형	지원 기준	내구 연한	기능
차량 내 착석을 위한 좌석과 방석, 엑세서리, 개조용품 (장애인용 카시트)	3 12 12 12	지체·뇌병변	140만원	3년	차량내 안전한 탑승과 자세 지원 및 사고 예방
※ 국립재활원 장애인보조기기 품질관리사업에서 실시한 품목 등록제에 등록된 제품만 교부 가능					
특수키보드 (모바일제어 특수키보드)	3 24 13 18	시각	40만원	5년	시각장애인의 모바일 기능 제어 등 사용 접근성 제고
특수출력 소프트웨어 (화면읽기 소프트웨어)	3 22 39 12	시각	85만원	3년	컴퓨터 화면내용의 음성출력 기능을 통해 정보접근 향상
표준네트워크 전화기 (영상전화기)	3 22 24 04	청각	120만원	4년	영상을 통한 수어, 손말 이음센터 연결 등 지원

2024 장애인보조기기 교부사업 품목 정보 안내서

등 록 기 준	
욕창방지용 방석 및 커버	• KS P 0236 : 욕창예방 시트쿠션(의료기기 1등급 신고, 시험성적서 제출) • 또는 해당 제품 관련 품질인증
와상용 욕창예방 보조기기	• KS P 0234 : 욕창예방 매트리스(의료기기 1등급 신고, 시험성적서 제출) • 또는 해당 제품 관련 품질인증
기립훈련기	• ‘품질관리 부속서(기립훈련기)’시험 • 또는 해당 제품 관련 품질인증
보행차	• 자율안전확인 대상 공산품의 안전기준 중 부속서 20(고령자용 보행차) • 또는 해당 제품 관련 품질인증
좌석형 보행차	
탁자형 보행차	
목욕의자	• 단체표준 SPS-KSPA 2003-1691(목욕의자) • 안전기준 부속서13(고령자용 목욕의자) • 또는 해당 제품 관련 품질인증
이동변기	• 단체표준 SPS-KSPA 3002-1693(이동변기) • 또는 해당 제품 관련 품질인증
휴대형 경사로	• 단체표준 SPS-KSPA 1019-1953(단차해소기) • 또는 해당 제품 관련 품질인증
미끄럼 보드, 미끄럼 매트 및 회전좌석	• 단체표준 SPS-KSPA 3003(자세변환용구)의 자세변환용 보드, 자세변환용 시트 • 또는 해당 제품 관련 품질인증
장애인용 의복	• 안전기준 부속서1(가정용섬유제품) • 단체표준 SPS-KSPA 1021-2050(고령자용 의류 - 요양복) • ‘품질관리 부속서(정형외과용 신발)’시험 • 또는 해당 제품 관련 품질인증
휠체어 액세서리	• 품질관리사업 요구 시험(벨트류) • KS P ISO 10542-1(장애인용 기술적 장치 및 보조기구 - 휠체어 고정구 및 탑승자 구속장치) • 또는 해당 제품 관련 품질인증
독립형 변기 팔 지지대 및 등 지지대	• 단체표준 SPS-KSPA 5001-1694(안전손잡이)의 거치형 안전손잡이 • 또는 해당 제품 관련 품질인증
지지대 및 손잡이	• 단체표준 SPS-KSPA 5001-1694(안전손잡이) • 또는 해당 제품 관련 품질인증
전동침대	• KS P 0388 가정 영양용 전동침대(의료기기 1등급 신고) • 또는 해당 제품 관련 품질인증
장애인용 유모차	• 품질관리사업 요구 시험 • 또는 해당 제품 관련 품질인증

장애인보조기기 교부사업

등 록 기 준	
바닥 특수 얹기 자세유지용 장치(피더시트)	• 품질관리사업 요구 시험 • 또는 해당 제품 관련 품질인증
목욕용 미끄럼방지용품	• 단체표준 SPS-KSPA 1018-1888(가정용 미끄럼방지용품) • 또는 해당 제품 관련 품질인증
소변수집장치	• 단체표준 SPS P KSPA 1037-7550(자동소변처리기) • 또는 해당 제품 관련 품질인증
음성유도장치 / 음성시계 / 진동시계 / 시각신호표시기 / 헤드폰 / 영상 확대 비디오 / 문자판독기 / 녹음 및 재생장치 / 환경조정장치 / 대화용장치	• 방송통신기기 인증(KC) 인증(방송통신기자재등의 적합 등록 필증) • 또는 해당 제품 관련 품질인증
대체입력장치(스위치)	• 전자파 장애 방지(KS C 9832:2019) 및 전자파 내성 (KS C 9835:2019) 시험 * 9 kHz 이상의 능동회로가 있는 경우 : 전파법(방송통신기자재 등의 적합성평가) ① 등록 확인서 및 ② 시험성적서 제출 * 9 kHz 이상의 능동회로가 없는 경우 : 시험성적서 제출 • 또는 해당 제품 관련 품질인증
개인 비상경보시스템(낙상알림기)	• 단체표준 SPS-KSPA 1020-1952(배회감지기) • 또는 해당 제품 관련 품질인증
음료 및 음료 취수용 보조기기/ 식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대 / 머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시 / 접시 및 그릇 / 음식 보호대	• 식품의약품안전처 식품용 기구 및 용기·포장 공전 중 유해성 시험 • 또는 해당 제품 관련 품질인증
독서용 탁자, 책상 및 독서대	• 안전기준 부속서5(가구_테이블) • KS G 4203(책상 및 테이블) • [전동장치가 있는 경우] 방송통신기기 인증(KC) 인증 (방송통신기자재등의 적합 등록 필증) • 또는 해당 제품 관련 품질인증
기억지원 보조기기	• 단체표준 SPS-KSPA 1030-7527(투약알림용품) • 또는 해당 제품 관련 품질인증
만 13세 이하의 어린이가 사용하거나 만 13세 이하의 어린이를 위하여 사용되는 물품 또는 그 부분품이나 부속품	• 「어린이 제품 안전 특별법」에 따른 안전 인증, 안전 확인, 공급자 적성 확인을 받은 제품 일 것

2024 장애인보조기기 교부사업 품목 정보 안내서

등 록 기 준	
차량 내 착석을 위한 좌석과 방석, 액세서리, 개조용품 (장애인용 카시트)	• KC 인증(안전인증 대상 어린이제품) ※ 품질관리사업에서 실시한 품목 등록제에 등록된 제품만 교부 가능
특수키보드 (모바일제어 특수키보드)	• KC 인증(방송통신기자재 적합성 평가 적합등록 인증 제품)
표준네트워크 전화기 (영상전화기)	• KC 인증(방송통신기자재 적합성 평가 적합등록 인증 제품) • 전기용품 및 생활용품 안전관리제도(공급자 적합성확인대상 전기용품)
특수출력 소프트웨어 (화면읽기 소프트웨어)	• 소프트웨어 품질인증 운영에 관한 지침에 준하여 실시한 시험성적서 • 또는 제품관련 소프트웨어 품질인증서(GS, CC 등 취득 제품)

장애인보조기기 교부사업

4. 교부 기준

- 1) 보조기기 신청 및 지원은 연간 지원기준액 합계 200만원 범위 내에서 1인당 최대 3품목까지 교부 가능
 - 다만, 단일품목으로서 지원기준액이 200만원을 초과하는 품목은 연간 1인당 1품목만 교부 가능
 - ※ 예시: 영상 확대 비디오 시스템(독서확대기)는 지원기준액이 270만원이므로 영상 확대 비디오 시스템(독서확대기)를 신청·지원받은 경우 해당연도에 다른 품목 신청 불가
 - ※ 행복e음 처리 : 2품목이상을 동시에 신청하는 경우 품목별로 신청서를 각각 입력하여 교부절차 진행 (향후 동시입력 처리가 가능하도록 행복e음 기능개선 추진)
- 2) 이전 연도에 지원 받은 품목의 내구연한이 경과하지 않았으나 해당 동일 품목을 재신청한 경우 교부 제한
 - ※ 내구연한은 보조기기를 교부한 날의 다음날부터 기산하며, 교부한 날 기준 내구연한 연수 적용(이후 내구 연한이 변경되더라도 미반영)
- 3) 당해연도에 지자체를 통해 사회복지단체 등으로부터 지원받은 동일품목을 신청하는 경우 교부 제한
 - ※ 파손 등으로 지자체장이 필요성을 인정하는 경우에는 재교부 가능, 단순 분실 등은 재교부 불가
- 4) 타 교부사업*에서 지원 받은 품목의 내구연한(재교부연한)이 경과하지 않았으나 해당 동일품목을 재신청한 경우 교부 제한(보조기기 신청시 행복e음을 통해 중복여부 확인)
 - * 국민건강보험 장애인보조기기 지원, 의료급여 장애인보조기기 지원, 노인장기요양보험 복지용구 지원, 근로복지공단 재활보조기기 지급, 장애인고용공단 장애인 보조공학기기 지원, 국가유공자 보철구 지급, 정보통신보조기기 지급 등

03 ▶ 장애인보조기기 교부절차

1 교부 신청

- 1) 보조기기 교부를 신청하려는 사람은 장애인 등록 및 서비스 신청서(서식 2, 151p 참고)를 주민등록상 주소지 관할 시·군·구 및 읍·면·동에 연중 제출
 - 신청서를 받은 시·군·구 및 읍·면·동은 희망보조기기의 교부가능여부(중복지원여부, 장애유형 및 소득 수준 등) 등에 대해 상담을 진행하고 행복e음에 입력하여 즉시 접수 처리
 - ※ 장애인의 신청 편의를 위해 별도의 수기서류를 제출받아 행복e음에 입력하는 것이 아니라, 먼저 상담 진행 및 상담내용을 행복e음에 입력하고 장애인 등록 및 서비스 신청서를 출력하여 장애인에게 교부
 - ※ 신청인이 향후 국민연금공단의 서비스지원 종합조사, 지역보조기기센터의 맞춤형 보조기기 상담·평가, 교부방법, 교부확인 등의 절차 안내(보조기기 교부사업 안내문, 서식 3, 155p 참고)

2024 장애인보조기기 교부사업 품목 정보 안내서

- 2) 시·군·구청은 접수 즉시 서비스 지원 종합조사 및 지역보조기기센터 상담·평가 의뢰 등 교부결정 절차 진행
 - ※ 읍·면·동에서 접수하는 경우 교부결정 절차가 지연되지 않도록 즉시 시·군·구청에 접수 결과를 보고하고, 시·군·구는 보고 받은 즉시 서비스지원 종합 조사 의뢰 등 교부결정 절차 진행(별도의 보조기기 교부신청·접수대상 등으로 관리하지 않고 행복e음 접수결과로 확인)
- 3) 보조기기가 필요한 장애인에게 신속하고 원활한 보조기기 지원을 위해 상반기 중에 시·군·구별로 집중 신청기간 운영(상반기에 70% 이상 집행 필요)
 - ※ 보도자료 배포, 보조기기 신청 현수막 게시, 이·통장회의 개최, 개별가구 안내문 배부 등 홍보 강화
 - 지역보조기기센터 상담·평가 기능의 원활한 유지 및 특정기간 쏠림 방지를 위해 시·도 및 시·군·구는 관할 지역보조기기센터 등과 협의하여 집중 신청기간 운영계획 수립 및 시행
 - 시·도는 관할 시·군·구의 집중신청기간 운영계획을 전년도 12월말까지 보건복지부에 제출(서식 1, 150p 참고)

- 국가, 지방자치단체, 중앙 및 지역보조기기센터 등은 “개인정보 수집·이용 동의서” 징구 등의 방법으로 정보주체의 동의를 받지 않아도 보조기기 업무 관련 목적인 경우 개인정보 수집·이용 가능하며, 국가, 지방자치단체, 중앙 및 지역보조기기센터 등 간에 개인정보를 제공할 수 있음
- (법적근거) 「개인정보 보호법」 제15조제1항제2호 내지 제3호, 제17조제1항제2호, 제23조제1항제2호, 제24조제1항제2호, 「장애인·노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용촉진에 관한 법률」 제24조 및 같은 법 시행령 제7조

2. 교부결정

- 1) 보조기기 교부는 예산 범위 내에서 연중 상시 접수·교부해야 하며, 일정기간 신청건을 모아 일괄교부 등은 금지
 - 보조기기 교부방식은 장애인보조기기 교부등 의뢰서(서식 10, 172p 참고)를 발급하여 보조기기업체를 통한 교부가 원칙
 - 다만 시·군·구청 직접 구입 교부는 집중신청기간 운영 등으로 일시에 신청이 집중되는 경우 예외적으로 일괄교부 가능
- 2) 시·군·구는 보조기기 교부 신청·접수 즉시 국민연금공단에 서비스 지원 종합조사(서식 4, 156p 참고)를 의뢰하여 최소 적격성 여부 확인
- 3) 국민연금공단은 20일 이내(토·일요일, 공휴일 미산입, 이하 같음)에 서비스지원 종합조사를 실시하고 시·군·구청에 결과 통보
- 4) 시·군·구는 최소 적격기준 적격 판정자에 대해 지역보조기기센터 또는 보조공학 관련기관(이하 “지역보조기기센터 등”)에 보조기기 맞춤형 상담·평가 의뢰(7일 이내)

장애인보조기기 교부사업

- 시·군·구청은 장애인보조기기 맞춤형 상담·평가 의뢰서(서식 5, 163p 참고), 신청인의 서비스지원 종합 조사 결과(최소 적격기준)를 지역보조기기센터 등에 송부
- 5) 지역보조기기센터 등은 20일 이내에 보조기기 맞춤형 상담·평가를 실시하고 시·군·구청에 장애인보조기기 교부사업 평가표(서식 6, 164p 참고)를 첨부하여 결과 제출
 - 상담·평가 과정에서 신청인이 품목 또는 제품을 변경하거나 신청을 취소하는 경우 장애인보조기기 신청 변경·취소 확인서(서식 7, 169p 참고) 징구
 - ※ 신청인이 유선으로 취소의사를 밝히는 등 취소 서명을 받기 어려운 경우 취소란에 누가, 언제, 어떻게, 왜 취소 했는지 등의 세부내용을 작성하고 서명 생략 가능
 - 기준액이 15만원 미만 품목이거나 기존 평가 이력이 있는 경우(장애 상태의 변화가 없는 경우에만 해당) 지역보조기기센터 등은 서면 또는 전화 상담으로 대체할 수 있음
- 6) 시·군·구청은 지역보조기기센터 등의 보조기기 맞춤형 상담·평가 결과를 제출 받아 7일 이내에 교부 결정
 - 집중신청기간에 신청자가 많아 예산 범위를 초과하는 경우 장애정도·교부이력·1인당 교부 품목수 등의 지자체별 우선순위를 설정하여 결정
 - ※ 교부대상자의 장애등록과 소득기준은 교부신청 때 뿐만 아니라 교부결정 때에도 기준에 적합해야 하며, 교부신청 때에는 수급자 등이었으나 교부결정 때에는 확인조사 등으로 수급자 등에서 중지되고 적합한 자격이 없다면 부적합 결정 필요(교부하기로 결정 후에는 자격변동이 있더라도 교부 및 비용 지급)
- 7) 시·군·구청은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 장애 정도 심사용 진단 의뢰서(서식 8, 170p 참고)에 따라 장애유형별 전문의가 있는 기관에 진단을 의뢰할 수 있음
 - 가) 해당 보조기기가 의료적 목적으로 사용되는 경우
 - 나) 신청서에 기재된 신청인의 장애상태가 현저하게 변화되어 별도의 장애 진단이 필요하다고 판단되는 경우
- 8) 7)에 따라 진단을 의뢰받은 의료기관은 그 진단을 의뢰한 시·군·구청장에게 ① 원래의 장애상태, ② 현재의 장애 상태, ③ 재활의료 등에 보조기기가 필요한 경우 해당 보조기기의 종류 및 처방을 적은 진단서(서식 9, 171p 참고)를 통보
 - 통보받은 진단 결과에 대하여 보다 정밀한 심사가 필요하다고 인정되는 경우에는 국민연금공단에 장애 정도에 관한 심사를 의뢰할 수 있음
- 9) 신청인에게 장애인보조기기 교부등 의뢰서(서식 10, 172p 참고) 발급
 - 시·군·구청에서 보조기기를 직접 구입하여 교부하는 경우에는 발급하지 않음
 - 지역보조기기센터 등에 보조기기 의뢰서를 송부하는 등 결정결과를 공유하고, 교부결정 내역을 행복e음에 등록

2024 장애인보조기기 교부사업 품목 정보 안내서

3. 교부

- 1) 시·군·구청은 보조기기를 직접 구입하여 교부하는 경우에는 교부 결정 후 14일 이내에 교부
 - 장애인보조기기 교부사업 평가표(서식 6, 164p 참고) 종합의견에 기재된 보조기기 제품·업체 정보를 최대한 반영
- 2) 의뢰서를 받은 보조기기 신청인은 그 의뢰서를 보조기기업체에 제출
 - 나. 8)에 따른 진단서가 있는 경우에는 그 진단서 포함
- 3) 보조기기업체는 의뢰서에 따라 신청인에게 보조기기 교부

4. 교부 확인 등

- 1) 시·군·구청은 신청인에게 장애인보조기기가 실제 교부되었는지를 확인해야하며, 교부 확인 후 비용 지급이 가능
 - 시·군·구청에서 보조기기를 직접 구입하여 교부하는 경우에는 별도의 확인절차 생략(계약을 통한 구입·교부과정에서 검수 철저)
- 2) 보조기기업체는 교부대상 장애인 거주 관할 시·군·구 또는 읍·면·동 보조기기 담당공무원에게 장애인보조기기 교부 확인(서식 11, 173p 참고)을 요청
 - 기성품 교부가 아닌 맞춤형 제작 등으로 전문가의 검수가 필요한 경우 지역보조기기센터에 검수 요청 (장애인보조기기 교부 등 비용청구서(서식 12, 174p 참고)의 검수확인란에 검수확인자 기재)
- 3) 보조기기 담당공무원은 요청일부터 7일 이내에 보조기기 의뢰서의 품목이 실제 교부되었는지에 대해 가정 방문 등을 통해 확인하고 장애인보조기기 교부 확인서(서식 11, 173p 참고) 작성
 - ※ 시군구청 담당공무원의 직접 확인이 어려운 경우 읍면동 장애인복지 담당공무원의 출장 협조를 통해 확인
- 4) 작성된 장애인보조기기 교부 확인서는 보조기기 업체에서 비용 청구시 첨부하도록 하거나 보조기기 교부 비용 지급시 청구서에 직접 첨부
 - ※ 장애인보조기기 교부 확인서를 보조기기업체에 교부하지 않고 시군구청에서 직접 관리하는 경우에는 시군구청에서 비용 지급시 직접 첨부

장애인보조기기 교부사업

5. 교부 비용 청구 및 지급

- 1) 보조기기업체는 장애인보조기기 교부 확인서(서식 11, 173p 참고)를 첨부하여 장애인보조기기 교부등 비용 청구서(서식 12, 174p 참고)를 시·군·구청에 제출
 - 맞춤형 제작 등으로 지역보조기기센터의 검수를 진행한 경우 검수확인이 완료된 장애인보조기기 교부 등 비용청구서(서식 12, 174p 참고)를 제출
 - ※ 맞춤형 제작 등이 아닌 기성품을 교부한 경우에는 장애인보조기기 교부 등 비용청구서(서식 12, 174p 참고)의 검수 확인란 기재는 생략하고 장애인보조기기 교부확인서(서식 11, 173p 참고)로만 확인 가능
 - 나. 8)에 따른 진단서가 있는 경우에는 그 진단서에 따라 보조기기의 교부등이 이루어졌는지에 대한 의료기관의 확인서(의사 소견서 등) 첨부
- 2) 시·군·구청은 교부 확인서 등 구비서류 확인 후 비용 지급

6. 사후관리

- 시·군·구청은 교부받은 대상자 및 교부품목에 대하여 교부된 보조기기의 사용 여부, 양도·대여 여부, 안전 사고 발생 여부 등 사후관리 실시(1~6개월 이내)
 - 지역보조기기센터 등 사후관리를 실시 할 수 있는 기관에 의뢰 가능

7. 예산 관리

- 1) 보건복지부는 실집행률 관리를 위해 분기별로 지자체별 실집행 현황 파악
- 2) 시·도는 관할 시·군·구의 지난 3년간 교부실적을 감안하여 배정해야 하며, 정기적으로 시·군·구의 예산 실집행 현황 파악하여 재조정
- 3) 시·군·구청은 수요 상황에 따라 교부사업 예산을 적절히 관리
 - * 예산이 부족한 경우 시·도에 예산 조정을 요구하거나 신청 장애인에게 다음 해에 신청할 수 있도록 안내

2024 장애인보조기기 교부사업 품목 정보 안내서

교부절차

신청, 자격기준 검토	시·군·구청 또는 읍·면·동 행정복지센터	상시 접수	[서식2] 장애인 등록 및 서비스 신청서(151p 참고) 행복e음 신청·접수(타 교부사업 중복확인)
서비스 지원 종합조사 의뢰	시·군·구청 → 국민연금공단	즉시	[서식4] 서비스 지원 종합조사표(156p 참고)
서비스 지원 종합조사 결과 통보	국민연금공단 → 시·군·구청	20일 이내	[서식4] 서비스 지원 종합조사표(156p 참고)
맞춤형 상담·평가 의뢰	시·군·구청 → 지역보조기기센터 등	7일 이내	[서식5] 장애인보조기기 맞춤형 상담·평가 의뢰서(163p 참고)
맞춤형 상담·평가 결과통보	지역보조기기센터 등 → 시·군·구청	20일 이내	[서식6] 장애인보조기기 교부사업 평가표(164p 참고) [서식7] 보조기기 신청 변경·취소 확인서(169p 참고)
교부결정	시·군·구청	7일 이내	[서식6] 장애인보조기기 교부사업 평가표(164p 참고) 지역보조기기센터 등 교부결정 결과 공유
교부	시·군·구청, 보조기기업체 등 → 신청인	14일 이내	[서식10] 장애인보조기기 교부등 의뢰서(172p 참고) 시·군·구청에서 직접 구입 교부
교부확인 등	보조기기업체 → 보조기기 담당공무원	7일 이내	[서식11] 장애인보조기기 교부 확인서(173p 참고) (시·군·구청 직접 구입시 별도 확인 절차 생략 가능)
교부비용 청구 및 지급	보조기기업체 → 시·군·구청	15일 이내	[서식12] 장애인 보조기기 교부 등 비용청구서(174p 참고) [서식11] 장애인보조기기 교부 확인서(173p 참고) 행복e음 교부내역등록(필수)
사후관리	시·군·구청 ※ 사후관리 의뢰가능		1~6개월 이내(타기관 의뢰 가능)

장애인보조기기 교부사업

04 ▶ 시·군·구청 직접 구입 교부시 유의사항

1. 최대한 국산품 구매 및 교부

2. 교부 품목은 중앙보조기기센터 장애인보조기기 품질관리사업에서 실시한 품목 등록제에 등록된 품목 이용(본 책자 참고)

※ 신청자의 장애유형 및 특성에 따라 등록되지 않은 제품의 지급이 필요하다고 판단되는 경우 지급가능하나, 차량 내 착석을 위한 좌석과 방석, 액세서리, 개조용품(장애인용 카시트)은 등록된 제품에 한함

3. 보조기기별 특성을 고려하여 구매계약 체결

- 1) 신호장치(시각신호표시기), 헤드폰(청취증폭기) : 청각장애인이 스스로 기기를 설치·사용할 수 있도록 쉽고 자세하게 작성된 사용설명서를 제공하고, 시각신호표시기는 방문하여 설치해 줄 수 있는 업체
- 2) 음성유도장치(음향신호기리모컨), 영상 확대 비디오 시스템(독서확대기), 문자판독기(광학문자판독기)
 - 가) 시각장애인의 편의를 고려하여 점자 또는 텍스트 등 시각장애인용 사용설명서 제공
 - 나) 시각장애인이 기기를 설치 사용할 수 있도록 쉽고 자세하게 안내를 해주고, 직접 설치해 줄 수 있는 업체
 - 다) 음성유도장치는 관내에 설치되어 있는 신호기와 공공기관 등에 설치되어 있는 음성안내장치에도 사용할 수 있도록 전파세기, 감도, 주파수, 프로토콜 등을 고려하여 선택
- 3) 환경 제어 장치, 지지대 및 손잡이(안전손잡이), 전동침대 : 지체·뇌병변 장애인이 기기를 사용할 수 있도록 쉽고 자세하게 안내를 해주고, 직접 설치해 줄 수 있는 업체(과업지시서에 직접 설치 포함 필요)
- 4) 기타 사후관리 보장 등 장애인 입장에서 업체 선정
 - 가) 교부업체 선정 시, 보조기기 설치(필요한 경우) 및 사용법 설명(모든 제품), 사후관리 제공 여부를 고려하여 선정
 - 나) 교부 후 1년 이내 제품 불량 발생시, 교환 가능한 업체
 - 다) A/S기간을 무상 1년으로 지정하여 사용 시 수리비용의 부담을 최소화, 동 기간 내에 수리가 가능한 업체 선정

※ 고의로 인한 손상 시 본인 부담하여 교환 및 수리
- 5) 계약 물품과 다른 제품이 교부되지 않도록 검수 철저

2024 장애인보조기기 교부사업 품목 정보 안내서

4. 품질기준 준수

- 1) 사용의 안정성 및 질 높은 품질의 교부 향상을 위해 품질기준에 적합한 보조기기를 선택
- 2) 최적의 보조기기 사용을 위해 장애인보조기기 42종에 대한 품질기준을 준수하여 질 높은 보조기기 교부 사업을 운영

05 ▶ 행정사항

- 1) 보조기기가 필요한 장애인에게 신속하고 원활한 보조기기 지원을 위해 상반기 중에 시·군·구별로 **집중 신청기간 운영**
 - 지역보조기기센터 상담·평가 기능의 원활한 유지 및 특정기간 쏠림 방지를 위해 시·도 및 시·군·구는 관할 지역보조기기센터 등과 협의하여 집중 신청기간 운영계획 수립 및 시행
 - 시·도는 관할 시·군·구에 집중신청기간 운영계획 수립을 안내하고 수립된 계획을 취합하여 전년도 12월말까지 보건복지부에 제출(서식 1, 150p 참고)
 - 사업비가 상반기에 70% 이상 교부되므로 상반기에 70% 이상 집행
- 2) 장애인의 교통편의 등을 고려하여 대상자가 교부신청부터 수령시까지 최대한 간편한 절차로 단시일에 지급받을 수 있도록 조치
- 3) 시·군·구청은 1년에 2번 이상 관내 의자·보조기 업체를 현장 방문하여 의자·보조기 기사 고용 여부, 기사 자격증 대여 여부 등 필요한 점검을 실시(보건복지부 및 시·도 공동수행 가능)
- 4) 지역보조기기센터는 「의료기기법」 제16조 및 같은법 시행규칙 제35조에 따라 의료기기 수리업 신고가 가능한 경우 관할 시·군·구청에 의료기기 수리업 신고·운영

장애인보조기기 교부사업

연도별 교부품목 변경(2020년~2024년, 최근 5년)

구분	2020	2021	2022	2023	2024
1	욕창 예방용 방석 및 커버	욕창 예방용 방석 및 커버	욕창 예방용 방석 및 커버	욕창 예방용 방석 및 커버	욕창 예방용 방석 및 커버
2	와상용 욕창예방 보조기기	와상용 욕창예방 보조기기	와상용 욕창예방 보조기기	와상용 욕창예방 보조기기	와상용 욕창예방 보조기기
3	음성유도장치 (음향신호기기 리모컨)	음성유도장치 (음향신호기기 리모컨)	음성유도장치 (음향신호기기 리모컨)	음성유도장치 (음향신호기기 리모컨)	음성유도장치 (음향신호기기 리모컨)
4	음성시계	음성시계	음성시계	음성시계	음성시계
5	시각신호표시기	시각신호표시기	시각신호표시기	시각신호표시기	시각신호표시기
6	진동시계	진동시계	진동시계	진동시계	진동시계
7	음식 및 음료 섭취용 보조기구	음식 및 음료 섭취용 보조기구	음식 및 음료 섭취용 보조기구	음식 및 음료 섭취용 보조기구	음식 및 음료 섭취용 보조기구
8	식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대	식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대	식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대	식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대	식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대
9	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시	머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시
10	접시 및 그릇	접시 및 그릇	접시 및 그릇	접시 및 그릇	접시 및 그릇
11	음식 보호대	음식 보호대	음식 보호대	음식 보호대	음식 보호대
12	기립훈련기	기립훈련기	기립훈련기	기립훈련기	기립훈련기
13	헤드폰(청취증폭기)	헤드폰(청취증폭기)	헤드폰(청취증폭기)	헤드폰(청취증폭기)	헤드폰(청취증폭기)
14	영상확대 비디오 (독서확대기)	영상확대 비디오 (독서확대기)	영상확대 비디오 (독서확대기)	영상확대 비디오 (독서확대기)	영상확대 비디오 (독서확대기)
15	문자판독기 (광학문자판독기)	문자판독기 (광학문자판독기)	문자판독기 (광학문자판독기)	문자판독기 (광학문자판독기)	문자판독기 (광학문자판독기)
16	목욕의자	목욕의자	목욕의자	목욕의자	목욕의자
17	녹음 및 재생장치 (음성독서기)	녹음 및 재생장치 (음성독서기)	녹음 및 재생장치 (음성독서기)	녹음 및 재생장치 (음성독서기)	녹음 및 재생장치 (음성독서기)
18	보행차	보행차	보행차	보행차	보행차
19	좌석형 보행차	좌석형 보행차	좌석형 보행차	좌석형 보행차	좌석형 보행차
20	탁자형 보행차	탁자형 보행차	탁자형 보행차	탁자형 보행차	탁자형 보행차
21	이동변기	이동변기	이동변기	이동변기	이동변기
22	휴대형 경사로	휴대형 경사로	휴대형 경사로	휴대형 경사로	휴대형 경사로
23	장애인용 의복	장애인용 의복	장애인용 의복	장애인용 의복	장애인용 의복
24	환경 제어 장치	환경 제어 장치	환경 제어 장치	환경 제어 장치	환경 제어 장치
25	대화용 장치	대화용 장치	대화용 장치	대화용 장치	대화용 장치
26	미끄럼 보드, 미끄럼 매트 및 회전좌석(트랜스퍼 보드, 트랜스퍼 매트, 회전좌석 등)	미끄럼 보드, 미끄럼 매트 및 회전좌석(트랜스퍼 보드, 트랜스퍼 매트, 회전좌석 등)	미끄럼 보드, 미끄럼 매트 및 회전좌석(트랜스퍼 보드, 트랜스퍼 매트, 회전좌석 등)	미끄럼 보드, 미끄럼 매트 및 회전좌석(트랜스퍼 보드, 트랜스퍼 매트, 회전좌석 등)	미끄럼 보드, 미끄럼 매트 및 회전좌석(트랜스퍼 보드, 트랜스퍼 매트, 회전좌석 등)
27	독립형 변기 팔 지지대 및 등지지대(변기용팔지지대)	독립형 변기 팔 지지대 및 등지지대(변기용팔지지대)	독립형 변기 팔 지지대 및 등지지대(변기용팔지지대)	독립형 변기 팔 지지대 및 등지지대(변기용팔지지대)	독립형 변기 팔 지지대 및 등지지대(변기용팔지지대)

2024 장애인보조기기 교부사업 품목 정보 안내서

구분	2020	2021	2022	2023	2024
28	휠체어용 탑승자 고정장치 및 기타엑세서리(벨트류, 덮개류, 거치대류 등)	휠체어용 탑승자 고정장치 및 기타엑세서리(벨트류, 덮개류, 거치대류 등)	휠체어용 탑승자 고정장치 및 기타엑세서리(벨트류, 덮개류, 거치대류 등)	휠체어용 탑승자 고정장치 및 기타엑세서리(벨트류, 덮개류, 거치대류 등)	휠체어용 탑승자 고정장치 및 기타엑세서리(벨트류, 덮개류, 거치대류 등)
29	안전손잡이	안전손잡이	안전손잡이	안전손잡이	안전손잡이
30	전동침대	전동침대	전동침대	전동침대	전동침대
31	장애인용 유모차	장애인용 유모차	장애인용 유모차	장애인용 유모차	장애인용 유모차
32	피더시트	피더시트	피더시트	피더시트	피더시트
33		목욕용 미끄럼방지용품	목욕용 미끄럼방지용품	목욕용 미끄럼방지용품	목욕용 미끄럼방지용품
34		소변수집장치	소변수집장치	소변수집장치	소변수집장치
35			대체입력장치(스위치)	대체입력장치(스위치)	대체입력장치(스위치)
36			개인 비상경보시스템 (낙상알림기)	개인 비상경보시스템 (낙상알림기)	개인 비상경보시스템 (낙상알림기)
37				독서용 탁자, 책상 및 독서대 (높낮이 조절책상)	독서용 탁자, 책상 및 독서대 (높낮이 조절책상)
38				기억지원 보조기기 (투약알림기)	기억지원 보조기기 (투약알림기)
39					치량 내 착석을 위한 좌석과 방석, 엑세서리, 개조용품 (장애인용 카시트)
40					특수키보드 (모바일제어 특수키보드)
41					특수출력 소프트웨어 (화면읽기 소프트웨어)
42					표준네트워크 전화기 (영상전화기)
계	32개	34개	36개	38개	42개

남색 : 해당 연도 품목 추가

- 
- 안내서에 제시되어 있는 가격은 제품을 등록한 업체에서 직접판매 할 경우의 제시 가격이며, 제품을 등록한 업체가 아닌 도·소매 업체나 유통 업체를 통하여 구매하는 경우 안내서에 기재되어 있는 가격과 다를 수 있습니다.
 - 지역에 따라 운송비나 설치비가 추가로 발생할 수 있습니다.
 - 본 책자에 실린 보조기기 정보는 업체에서 장애인보조기기 품질관리사업 등록 제에 제출 한 자료로써 모든 효과를 보증하는 것은 아닙니다.

2024 장애인보조기기 교부사업 품목 정보 안내서

II

장애인 보조기기 교부사업 42개 품목

지체·뇌병변장애

목욕의자

경사로(휴대용 경사로)

보행차

탁자형 보행차

음식섭취 보조기기(식사도구(칼·포크), 젓가락 및 빨대)

음식섭취 보조기기(머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시)

음식섭취 보조기기(음료 및 음료 취수용 보조기기)

독립형 번기 팔 지지대 및 등 지지대

기립틀 및 기립을 위한 지지대(기립훈련기)

이동번기

환경 제어 장치

지지대 및 손잡이(안전손잡이)

목욕용 미끄럼방지용품

지체·뇌병변·심장·호흡장애

미끄럼 및 회전을 위한 보조기기

의류 및 신발(장애인용의복)

휠체어 액세서리(휠체어용 탑승자 고정장치
및 기타액세서리)

침대 및 탈착식 침대 판/전동조절식

매트리스 지지단(전동침대)

개인 비상경보시스템(낙상알림기)

독서용 탁자, 책상 및 독서대

심장장애

욕창예방 방식

욕창예방 매트리스

시각장애

영상 확대 비디오 시스템(독서확대기)

문자판독기(광학문자판독기)

음성유도장치(음향신호기리모컨)

녹음 및 재생장치(음성증폭기)

청각장애

신호장치(시각신호표시기)

뇌병변·지적·자폐성·청각·언어장애

대화용장치

BSU11

☎ 제품명 BSU11

☎ 코드번호 3093305002000025

☎ 연락처 1588-4624

☎ 등록일 2021년(상반기)

☎ 업체명 케어맥스코리아

☎ 등록가격 153,000원

제품사양

크기(mm)	465 × 495~575 × 650~50
접이 시 크기(mm)	465 × 230 × 820
좌면 높이(mm)	320~420
좌면 크기(mm)	425 × 335
팔걸이 높이(mm)	1단계(230), 2단계(200), 3단계(170)
최대사용자 하중	100kg
중량	4.5kg
재질	파이프 - 알루미늄합금 패드, 다리고무 - EVA수지 좌면, 등받이 - 폴리에틸렌

▶ 구성품목 • 제품본체, 설명서

▶ 주요기능 • 팔걸이 각도 조절기능, 좌면 배수구멍, 패드 탈부착 가능,
샤워트레이 탈부착, 팔걸이 높이조절, 팔걸이 탈착 가능,
다리 높이 조절 가능, 다리고무 장착

▶ 유통망(판매 가능 지역) • 전국

▶ 제조(수입) 구분 • 수입(중국)



⚙ 사용방법

[욕조 안으로 이동방법]

- ① 목욕의자를 최대한 욕조 가까이 붙여 욕조쪽의 팔걸이를 올려 주십시오.
- ② 몸의 방향을 바꿔 한발씩 천천히 욕조 안으로 넣어 주십시오.

[조립방법]

- ① 등받이를 잡고 좌면을 화살표 방향으로 내려 주십시오.
- ② 좌면이 수평이고 잠금 상태인지 확인해 주십시오.
- ③ 좌면을 위에서 누르고 좌우의 팔걸이를 내려 주십시오.

[접이방법]

- ① 좌우의 팔걸이를 올려 주십시오.
- ② 좌면 끝의 잠금장치를 잡고 좌면을 화살표 방향으로 올려 주십시오.

[좌면높이 조절 방법]

- ① 연장파이프 설치방법 : 본체다리의 조절잠금버튼을 눌러 연장파이프를 본체다리에 넣어 주십시오.
- ② 높이 조절방법 : 조절잠금버튼을 눌러 연장파이프를 상하로 움직여 희망높이의 구멍에 맞추세요.

[패드의 탈착방법]

- ① 패드 해제방법 : 등받이, 좌면 각각의 뒷면에서 고정 돌기를 눌러서 떼어 주십시오.
- ② 패드 설치방법 : 패드의 고정돌기를 등받이, 좌면 각각의 고정 구멍에 맞춰서 눌러 넣어 패드의 가장자리부터 씌워 주십시오.

[샤워트레이 사용방법]

- ① 샤워기 헤드, 걸거나 타올, 스펀지, 비누 등을 놓을 수 있습니다.

[팔걸이 높이조절 방법]

- ① 팔걸이를 원형 나사를 부속 육각 렌치로 풀고 팔걸이를 해제해 주십시오.
- ② 팔걸이 고정 수지를 위아래 방향으로 조절하여 앞다리에서 희망하는 높이의 구멍에 맞추세요.
- ③ 팔걸이 구멍과 팔걸이 고정수지 구멍과 맞춰 팔걸이 원형 나사를 부속 육각 렌치로 고정하세요.

[팔걸이 탈착방법]

- ① 팔걸이의 원형 나사를 부속 육각 렌치로 풀고 팔걸이를 해제해 주십시오.
- ② 팔걸이 고정 수지 나사 2개를 +드라이버를 이용하여 제거하여 팔걸이 고정 수지를 제거하세요.
- ③ 팔걸이 고정 수지의 그림과 같이 앞다리 프레임에서 제거해 주십시오.

아크보세고 목욕의자

☎ **제 품 명** 아크보세고 목욕의자
 ☎ **코드번호** 3093305006800025
 ☎ **연 락 처** 070-7757-2014

📅 **등 록 일** 2021년(상반기)
 🏢 **업 체 명** 사랑으로
 💰 **등 록 가격** 750,000원

제품사양

• 사양

구분	Size 1	Size 2
크기(mm)	420 × 750 × 850	450 × 910 × 960
무게	4.5kg	5kg
색상	연구	오렌지

• 재질

프레임	경량알루미늄(내측 : 폴리우레탄폼)
시트커버	메쉬

- ▶ **구성품목**
 - 목욕의자 본체
 - 머리지지대
 - 골반벨트
 - 종아리벨트
- ▶ **주요기능**
 - 알루미늄 프레임 내부에 폴리우레탄 폼 채움
 - 다리의 각도를 다양하게 적용 가능
 - 유아부터 성인까지 다양한 대상자에게 적용 가능
 - 폴딩 시 보관에 용이함
 - 벨트를 시트에 고정하여 사용
 - 이동프레임 추가 시 성인 허리높이까지 제품을 높여 사용 가능
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 수입(폴란드)



🔧 사용방법

- ① 사용 전 제품의 상태가 사용하기에 안전한 상태인지 확인한 후 사용합니다.
- ② 팔의 근력이 있는 분의 경우 혼자서도 사용할 수 있는 목욕의자이나 가능하면 보호자 또는 간병인과 사용합니다.
- ③ 사용자를 의자에 앉히기 전 의자의 높이 및 등판과 다리지지대의 각도 등을 미리 조절한 후 착석합니다.
- ④ 대상자의 낙상예방을 위해 적절한 넓이로 머리지지대를 위치시키고 허리벨트를 이용해 대상자가 움직이지 않도록 고정시킵니다.
- ⑤ 더 강하게 고정하고 싶은 경우 다리고정벨트 등을 사용하여 사용자를 고정합니다.
- ⑥ 사용자의 장애정도와 사용환경에 맞게 벨트, 부속품을 추가로 구입하여 사용자에게 맞게 사용할 것을 권장합니다.
- ⑦ 사용 후에는 물기를 제거하여 안전한 장소에 보관 합니다.

BOFEEL9

☎ 제품명 BOFEEL9
 ☎ 코드번호 3093305000900070
 ☎ 연락처 031-677-9924

☎ 등록일 2021년(하반기)
 ☎ 업체명 (주)보필
 ☎ 등록가격 170,000원

제품사양

크기(mm)	540 × 530 × 720~790
	접이시 : 540 × 180 × 820~890
좌면까지 높이(mm)	365~430
무게	5 kg
재질	프레임 : 알루미늄 좌면/손잡이 : 폴리프로필렌

- > 구성품목
 - 좌면, 등받이
 - 팔걸이
 - 손잡이
 - 소프트패드
 - 다리고무
 - 다리파이프
- > 주요기능
 - 앉은채로 목욕 편리
 - 접이 시 자립과 좁은 공간에 보관 가능
 - 신장에 따라 4단 조절 가능
- > 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- > 제조(수입) 구분 • 국내제작



사용방법

[높이조절]

- ① 좌면 높이는 4단중(약 36.5~43cm) 조절 가능합니다.
- ② 조절은 다리부에 있는 누름 버튼을 누르면서 짧은 다리관을 끌어 빼주십시오.
- ③ 누름 버튼이 “딱” 하고 소리를 내면서 구멍 밖으로 나오면 세트 완료입니다.
- ④ 손 이외에 다른 기구로 버튼을 누르지 마세요.

[접이 및 펼침]

- ① 팔걸이를 위로 접습니다.
- ② 좌면 앞과 등받이를 잡고 위로 접습니다.
- ③ 펼침은 접이의 역순으로 합니다.

[좌면 및 등받이 세척]

- ① 좌면과 등받이 EVA를 분리합니다.
- ② 중성세제를 사용하여 닦은 후 흐르는 물로 세척합니다.

지체·뇌병변장애 | 목욕의자

BOFEEL10

☎ **제 품 명** BOFEEL10
 ☎ **코드번호** 3093305000900080
 ☎ **연 락 처** 031-677-9924

☎ **등 록 일** 2021년(하반기)
 ☎ **업 체 명** (주)보필
 ☎ **등록가격** 175,000원

제품사양

크기(mm)	540 × 530 × 720~790
좌면까지 높이(mm)	접이시 : 540 × 200 × 835
무게	365~430
재질	4.7 kg
	프레임 : 알루미늄, 좌면/손잡이 : 폴리프로필렌

- ▶ **구성품목** • 좌면, 등받이, 팔걸이, 손잡이, 소프트패드, 다리고무, 다리파이프
- ▶ **주요기능** • 앉은채로 목욕 편리, 접이 시 자립과 좁은 공간에 보관 가능
• 신장에 따라 4단 조절 가능
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작



🔧 사용방법

[높이조절]

- ① 좌면 높이는 4단중(약 36.5~43cm) 조절 가능합니다.
- ② 조절은 다리부에 있는 누름 버튼을 누르면서 짧은 다리관을 끌어 빼주십시오.
- ③ 누름 버튼이 “딱” 하고 소리를 내면서 구멍 밖으로 나오면 세트 완료입니다.
- ④ 손 이외에 다른 기구로 버튼을 누르지 마세요.

[접이 및 펼침]

- ① 팔걸이를 위로 접습니다.
- ② 좌면 앞과 등받이를 잡고 위로 접습니다.
- ③ 펼침은 접이의 역순으로 합니다.

좌면 및 등받이 세척

- ① 좌면과 등받이 EVA를 분리합니다.
- ② 중성세제를 사용하여 닦은 후 흐르는 물로 세척합니다.

지체·뇌병변장애 | 목욕의자

BOFEEL11

☎ **제 품 명** BOFEEL11
 ☎ **코드번호** 3093305000900090
 ☎ **연 락 처** 031-677-9924

☎ **등 록 일** 2023년(상반기)
 ☎ **업 체 명** (주)보필
 ☎ **등록가격** 257,000원

제품사양

크기(mm)	710~790(전체 높이), 360~430(시트 높이), 435(시트폭), 540(전체폭)
제품 중량	5.5 kg (최대사용 하중 : 95kg)
재질	알루미늄, HDPE, PP 등

- ▶ **구성품목** • 목욕의자
- ▶ **주요기능** • 좁은 공간에서도 보관 및 사용이 용이, 신장에 따라 4단으로 높이 조절 가능
• 샤워기 걸이 부착
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작



🔧 사용방법

- ① 높이조절 버튼을 누른 상태로 4단 조절을 합니다.
- ② 팔걸이, 좌면 앞과 등받이를 잡고 위로 접거나 펴서 사용합니다.

앵커 목욕의자

☎ **제 품 명** 앵커 목욕의자
 ☎ **코드번호** 3093305005700035
 ☎ **연 락 처** 02-455-0858

📅 **등 록 일** 2021년(하반기)
 🏢 **업 체 명** 케어라이프코리아
 💰 **등록가격** 550,000원

제품사양

시트 너비(mm)	368.3
시트 깊이(mm)	266.7 ~ 330.2
등받이 높이(mm)	609.6
등받이 너비(mm)	431.8
종아리 받침 길이(mm)	279.4
시트 높이(mm)	146, 279.4, 393.7, 431.8
등받이 각도(mm)	0°, 30°, 60°, 90°
종아리 받침 각도(mm)	0°, 30°, 60°
제품 중량	6.5 kg
허용 중량	70 kg
재질	프레임 : 알루미늄 시트 : 메쉬

- ▶ **구성품목**
- 목욕의자 본체
 - 머리받침대
 - 가슴벨트
 - 허리벨트
 - 종아리벨트
 - 육각렌치
 - 사용설명서

- ▶ **주요기능**
- 시트의 높이, 등판, 종아리 받침 부위의 시트 각도 조절 가능
 - 머리받침대와, 벨크로 타입의 가슴벨트, 허리벨트, 종아리 벨트 사용 가능
 - 각도 조절은 장치는 직관적인 빨간색의 레버 형식을 채택하여 쉽고 편리
 - 보관 시에는 레버를 조절해 각도를 180도로 하여 좁은 공간에도 수납 가능

- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국

- ▶ **제조(수입) 구분** • 수입(미국)



⚙️ 사용방법

- ① 사용자 착석 전에 다리각도를 조절하여 원하는 높이를 맞춰 줍니다.
- ② 사용자 착석 전에 등판과, 종아리 받침의 각도, 머리받침대의 위치 조절하여 사용자 환경에 맞춰줍니다.
- ③ 사용자가 착석 전에 모든 레버의 고정이 잘 되었는지 확인 합니다.
- ④ 사용자 착석 후 안전을 위해 가슴벨트, 허리벨트, 종아리벨트를 채결한 후에 샤워를 합니다.
- ⑤ 사용 이후에는 제품 유지를 위해 물기를 제거하고 통풍이 잘 되는 곳에서 말린 후 보관합니다.

지체·뇌병변장애 | 목욕의자

ASC-102

☎ **제 품 명** ASC-102
 ☎ **코드번호** 3093305010700010
 ☎ **연 락 처** 031-677-7522

📅 **등 록 일** 2022년(상반기)
 🏢 **업 체 명** (주)에이엠이
 💰 **등록가격** 168,000원

제품사양

크기(mm)	520(폭) × 550(깊이) × 390~490(좌면 높이), 695~785(등받이 높이)
제품 중량	6.9 kg
재질	알루미늄(프레임), EVA(시트패드), PE(시트)

- **구성품목**
 - 제품 본체
 - 설명서
- **주요기능**
 - 좌면 높이를 5단계로 조절 가능(원터치 조절)
 - 팔걸이 스윙 가능
 - 등받이 상단에 손잡이 홈이 있어 접어서 보관용이
- **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- **제조(수입) 구분** • 국내제작

🔧 사용방법

- ① 한 손으로 목욕의자의 등받이를 잡고 다른 손으로 목욕의자의 좌면부위를 잡은 상태에서 접거나 펼쳐서 사용하세요.
- ② 높이 조절 노브를 오므려서 좌면 높이를 조절하세요.



지체·뇌병변장애 | 목욕의자

ASC-103

☎ **제 품 명** ASC-103
 ☎ **코드번호** 3093305010700020
 ☎ **연 락 처** 031-677-7522

📅 **등 록 일** 2022년(상반기)
 🏢 **업 체 명** (주)에이엠이
 💰 **등록가격** 165,000원

제품사양

크기(mm)	520(폭) × 550(깊이) × 390~490(좌면 높이), 695~785(등받이 높이)
제품 중량	6.9 kg
재질	알루미늄(프레임), EVA(시트패드), PE(시트)

- **구성품목**
 - 제품 본체
 - 설명서
- **주요기능**
 - 좌면 중앙에 국부세척 통로가 있어 세척 시 용이
 - 좌면 높이를 5단계로 조절 가능(원터치 조절)
 - 팔걸이 스윙 가능
 - 등받이 상단에 손잡이 홈이 있어 접어서 보관용이
- **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- **제조(수입) 구분** • 국내제작

🔧 사용방법

- ① 한 손으로 목욕의자의 등받이를 잡고 다른 손으로 목욕의자의 좌면부위를 잡은 상태에서 접거나 펼쳐서 사용하세요.
- ② 높이 조절 노브를 오므려서 좌면 높이를 조절하세요.
- ③ 좌면 중앙에 U자형 국부세척 통로가 있어 샤워헤드를 넣어 사용하세요.



II

지체·뇌병변장애 | 목욕의자

ASC-502

☎제품명 ASC-502

☎코드번호 3093305010700030

☎연락처 031-677-7522

☎등록일 2022년(상반기)

☎업체명 (주)에이엠이

☎등록가격 205,000원

제품사양

크기(mm)	310(폭) × 407(길이) × 310~407(좌면 높이), 607~706(등받이 높이)
제품 중량	4.5 kg
재질	알루미늄(프레임), EVA(시트패드), PE(시트)

- > 구성품목
 - 제품 본체
 - 설명서
- > 주요기능
 - 좌면 중앙부 물빠짐을 고려하여 설계
 - 좌면 높이를 6단계로 조절 가능(원터치 조절)
 - 팔걸이 스윙 가능
- > 유통망(판매 가능 지역)
 - 전국
- > 제조(수입) 구분
 - 국내제작



🔧 사용방법

- ① 한 손으로 목욕의자의 등받이를 잡고 다른 손으로 목욕의자의 좌면부위를 잡은 상태에서 접거나 펼쳐서 사용하세요.
- ② 높이조절 고정핀을 탈착 후 원하는 높이에서 고정핀을 삽입하세요. (고정 여부를 확인 후 사용하세요)
- ③ U자형 홈에 보호자의 다리를 넣어 안전하게 사용하세요.

HM-101

☎제 품 명 HM-101
 ☎코드번호 3093305011100010
 ☎연 락 처 031-534-2298

☎등 록 일 2022년(하반기)
 ☎업 체 명 (주)현대메딕스
 ☎등록가격 131,000원



제품사양

크기(mm)	540 × 590 × 390~505
제품 중량	4.5 kg
재질	알루미늄 합금, 우레탄

- > 구성품목
 - 본체
 - 설명서
- > 주요기능
 - 접이식으로 보관이 용이
 - 소프트한 우레탄 시트와 등받이로 구성
 - 시트와 등받이가 분리되어 세척이 용이
- > 유통망(판매 가능 지역)
 - 전국
- > 제조(수입) 구분
 - 국내제작



⚙ 사용방법

- ① 펴는 방법 : 등받이와 좌면시트를 잡고 앞뒤로 펼친 뒤, 좌면 시트를 다리 중앙에 올려놓고 사용하세요.
- ② 접는 방법 : 등받이와 좌면시트를 잡고 가운데로 모아줍니다.
- ③ 다리높이 조절 방법 : 각 다리의 높이조절 버튼을 누르면서 약간 비튼 후, 사용자 신장에 맞춰 조절하고 버튼이 “딱” 소리가 나며 튀어 올라오게 합니다. 반드시 4개의 다리 높이를 동일하게 맞추시기 바랍니다.

YGM2

◎제품명 YGM2

◎코드번호 3183015005400020

◎연락처 053-357-5512

◎등록일 2021년(하반기)

◎업체명 유광정밀

◎등록가격 128,000원

제품사양

크기(mm)	750 × 420
허용 단차 높이(mm)	65 ~ 81
제품 중량	4 kg
허용 하중	100 kg
재질	알루미늄, ABS 수지

- ▷ 구성품목 • 경사로 본체, 고무판, 드라이버, 볼트(목재용), 칼브릭, 볼트(콘크리트용)
- ▷ 주요기능 • 날개판 제공으로 다양한 단차 적용 가능
• 야광스티커 부착, 미끄럼방지 처리, 녹부식 방지 처리
- ▷ 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- ▷ 제조(수입) 구분 • 국내제작



⚙️ 사용방법

- ① 설치하고자 하는 곳의 높이를 맞추어 조립하여 사용합니다.
- ② 설치하고자 하는 바닥면에 이물질 제거해 합니다.
- ③ 경사로 밑면에 부착되어 있는 양면테이프의 이형지를 제거하여 바닥에 부착합니다.
- ④ 목재용, 콘크리트용 볼트, 칼브릭을 사용하여 고정합니다.
- ⑤ 이탈 방지를 위해 M4볼트로 몸체와 몸체를 고정합니다.
- ⑥ 화장실, 현관 등 누수, 배관물 파손으로 사용이 어려울 경우 고무판을 깔고 사용해 주세요.

YGM3

◎제품명 YGM3

◎코드번호 3183015005400030

◎연락처 053-357-5512

◎등록일 2021년(하반기)

◎업체명 유광정밀

◎등록가격 95,100원

제품사양

크기(mm)	750 × 290
허용 단차 높이(mm)	35 ~ 56
제품 중량	2.58 kg
허용 하중	100 kg
재질	알루미늄, ABS 수지

- ▷ 구성품목 • 경사로 본체, 고무판, 드라이버, 볼트(목재용), 칼브릭, 볼트(콘크리트용)
- ▷ 주요기능 • 날개판 제공으로 다양한 단차 적용 가능, 야광스티커 부착
• 미끄럼방지 처리, 녹부식 방지 처리
- ▷ 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- ▷ 제조(수입) 구분 • 국내제작



⚙️ 사용방법

- ① 설치하고자 하는 곳의 높이를 맞추어 조립하여 사용합니다.
- ② 설치하고자 하는 바닥면에 이물질 제거해 합니다.
- ③ 경사로 밑면에 부착되어 있는 양면테이프의 이형지를 제거하여 바닥에 부착합니다.
- ④ 목재용, 콘크리트용 볼트, 칼브릭을 사용하여 고정합니다.
- ⑤ 이탈 방지를 위해 M4볼트로 몸체와 몸체를 고정합니다.
- ⑥ 화장실, 현관 등 누수, 배관물 파손으로 사용이 어려울 경우 고무판을 깔고 사용해 주세요.

YGM4

☎ **제 품 명** YGM4
 ☎ **코드번호** 3183015005400040
 ☎ **연 락 처** 053-357-5512

📅 **등 록 일** 2021년(하반기)
 🏢 **업 체 명** 유광정밀
 💰 **등록가격** 64,300원

제품사양

크기(mm)	750 × 165
허용 단차 높이(mm)	12 ~ 31
제품 중량	1.358 kg
허용 하중	100 kg
재질	알루미늄, ABS 수지

- ▶ **구성품목**
 - 경사로 본체
 - 고무판
 - 드라이버
 - 볼트(목재용)
 - 칼브럭
 - 볼트(콘크리트용)
- ▶ **주요기능**
 - 날개판 제공으로 다양한 단차 적용 가능
 - 야광스티커 부착
 - 미끄럼방지 처리
 - 녹부식 방지 처리
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작



🔧 사용방법

- ① 설치하고자 하는 곳의 높이를 맞추어 조립하여 사용합니다.
- ② 설치하고자 하는 바닥면에 이물질 제거해 합니다.
- ③ 경사로 밑면에 부착되어 있는 양면테이프의 이형지를 제거하여 바닥에 부착합니다.
- ④ 목재용, 콘크리트용 볼트, 칼브럭을 사용하여 고정합니다.
- ⑤ 이탈 방지를 위해 M4볼트로 몸체와 몸체를 고정합니다.
- ⑥ 화장실, 현관 등 누수, 배관을 파손으로 사용이 어려울 경우 고무판을 깔고 사용해 주세요.

ASW-101

◎제품명 ASW-101

◎코드번호 3183015010700010

◎연락처 031-677-7522

◎등록일 2022년(하반기)

◎업체명 (주)에이엠이

◎등록가격 31,800원

제품사양

크기(mm)	800(폭) × 80(깊이) × 20(높이)
제품 중량	0.5 kg
재질	우레탄

- ▶ 구성품목 • 경사로(본체), 나사, 와셔, 칼브릭
- ▶ 주요기능 • 휠체어 이동 시 단차걸림 등을 예방하여 안전하게 이동(간편한 설치)
• 실내 이동 시 턱에 의한 발걸림 현상을 예방
• 필요한 경우 높이에 맞게 재단 가능

▶ 유통망(판매 가능 지역) • 전국

▶ 제조(수입) 구분 • 국내제작



⚙️ 사용방법

- ① 문턱과 경사로 사이에 틈이 없도록 잘 맞추어 전체적으로 눌러주며 압착시켜 부착해 줍니다.
- ② 제공된 고정 나사(2개)로 단단히 고정해 주세요
 - 나사고정으로 설치할 곳의 바닥재가 콘크리트인 경우, 칼브릭 시공이 필요합니다.
 - 온돌 난방 구조물 등에 칼브릭 시공 시, 바닥의 온수파이프 등에 주의하여 시공해야 합니다.

ASW-102

◎제품명 ASW-102

◎코드번호 3183015010700020

◎연락처 031-677-7522

◎등록일 2022년(하반기)

◎업체명 (주)에이엠이

◎등록가격 41,900원

제품사양

크기(mm)	800(폭) × 120(깊이) × 30(높이)
제품 중량	0.9 kg
재질	우레탄

- ▶ 구성품목 • 경사로(본체), 나사, 와셔, 칼브릭
- ▶ 주요기능 • 휠체어 이동 시 단차걸림 등을 예방하여 안전하게 이동 (간편한 설치)
• 실내 이동 시 턱에 의한 발걸림 현상을 예방
• 필요한 경우 높이에 맞게 재단 가능

▶ 유통망(판매 가능 지역) • 전국

▶ 제조(수입) 구분 • 국내제작



⚙️ 사용방법

- ① 문턱과 경사로 사이에 틈이 없도록 잘 맞추어 전체적으로 눌러주며 압착시켜 부착해 줍니다.
- ② 제공된 고정 나사(2개)로 단단히 고정해 주세요
 - 나사고정으로 설치할 곳의 바닥재가 콘크리트인 경우, 칼브릭 시공이 필요합니다.
 - 온돌 난방 구조물 등에 칼브릭 시공 시, 바닥의 온수파이프 등에 주의하여 시공해야 합니다.

지체·뇌병변장애 | 경사로(휴대용 경사로)

ASW-103

◎제품명 ASW-103
◎코드번호 3183015010700030
◎연락처 031-677-7522

◎등록일 2022년(하반기)
◎업체명 (주)에이엠이
◎등록가격 42,600원

제품사양

크기(mm)	800(폭) × 160(깊이) × 40(높이)
제품 중량	1.2 kg
재질	우레탄



- ▶ 구성품목 • 경사로(본체), 나사, 와셔, 칼브력
- ▶ 주요기능 • 휠체어 이동 시 단차걸림 등을 예방하여 안전하게 이동(간편한 설치)
• 실내 이동 시 턱에 의한 발걸림 현상을 예방
• 필요한 경우 높이에 맞게 재단 가능
- ▶ 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- ▶ 제조(수입) 구분 • 국내제작

🔧 사용방법

- ① 문턱과 경사로 사이에 틈이 없도록 잘 맞추어 전체적으로 눌러주며 압착시켜 부착해 줍니다.
- ② 제공된 고정 나사(2개)로 단단히 고정해 주세요
- 나사고정으로 설치할 곳의 바닥재가 콘크리트인 경우, 칼브력 시공이 필요합니다.
- 온돌 난방 구조물 등에 칼브력 시공 시, 바닥의 온수파이프 등에 주의하여 시공해야 합니다.

지체·뇌병변장애 | 경사로(휴대용 경사로)

ASW-104

◎제품명 ASW-104
◎코드번호 3183015010700040
◎연락처 031-677-7522

◎등록일 2022년(하반기)
◎업체명 (주)에이엠이
◎등록가격 64,000원

제품사양

크기(mm)	800(폭) × 200(깊이) × 50(높이)
제품 중량	1.8 kg
재질	우레탄



- ▶ 구성품목 • 경사로(본체), 나사, 와셔, 칼브력
- ▶ 주요기능 • 휠체어 이동 시 단차걸림 등을 예방하여 안전하게 이동(간편한 설치)
• 실내 이동 시 턱에 의한 발걸림 현상을 예방
• 필요한 경우 높이에 맞게 재단 가능
- ▶ 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- ▶ 제조(수입) 구분 • 국내제작

🔧 사용방법

- ① 문턱과 경사로 사이에 틈이 없도록 잘 맞추어 전체적으로 눌러주며 압착시켜 부착해 줍니다.
- ② 제공된 고정 나사(2개)로 단단히 고정해 주세요
- 나사고정으로 설치할 곳의 바닥재가 콘크리트인 경우, 칼브력 시공이 필요합니다.
- 온돌 난방 구조물 등에 칼브력 시공 시, 바닥의 온수파이프 등에 주의하여 시공해야 합니다.

CK-06

◎제품명 CK-06

◎코드번호 3120606009500010

◎연락처 031-323-1431

◎등록일 2021년(상반기)

◎업체명 ㈜세원케어

◎등록가격 54,500원

제품사양

크기(mm)	680 × 500 × 790~870
	접이 시 : 140 × 790
무게	3.6kg
재질	알루미늄, 플라스틱
최대하중	80kg

- ▶ 구성품목 • 제품, 설명서, 포장비닐, 포장박스
- ▶ 주요기능 • 보행이 불편한 경우 실내에서 혼자서 이동할 수 있도록 보조하는 용품
• 사용자에 따라 고정식 ↔ 교차식(지그재그) 기능을 사용 가능
• 앉아서 일어날 때 편한 2단 손잡이 구조
- ▶ 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- ▶ 제조(수입) 구분 • 국내제작



⚙ 사용방법

- ① 제품에 포장된 사용설명서를 읽은 후 사용하십시오.
- ② 제품 펼치기 : 양쪽 손잡이를 잡고 중간 원터치 고정 핀이 체결될 때까지 펼치십시오.
- ③ 사용자의 신체상태에 맞게 4개의 다리의 높이조절 버튼을 눌러 동일하게 맞춥니다.
- ④ 양쪽바퀴에 동작상태 이상 유무를 확인합니다.
- ⑤ 최대하중을 초과하여 사용하지 마십시오.
- ⑥ 단차 경사로 등에는 사용 시 주의하여 사용하세요.
- ⑦ 고무발굽의 마모 정도를 점검하여 사용하십시오.
- ⑧ 핸들에 기대어 서지 마십시오.
- ⑨ 옥내용으로 옥외사용을 금합니다.

CK-07

◎제품명 CK-07

◎코드번호 3120606009500025

◎연락처 031-323-1431

◎등록일 2023년(하반기)

◎업체명 ㈜세원케어

◎등록가격 65,000원

제품사양

크기(mm)	680 × 500 × 790~880
제품 중량	3.6 kg
재질	알루미늄, 플라스틱

- ▶ 구성품목 • 본체, 설명서
- ▶ 주요기능 • 사용자의 상태에 따라 '고정식' 또는 '교차식(지그재그)'으로 변경하여 사용 가능
• 바퀴에 베어링이 적용되어 유격이 없고 사용감이 좋음
• 양쪽 2개씩 바퀴를 적용하여 제품이 견고
- ▶ 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- ▶ 제조(수입) 구분 • 수입(중국)



⚙ 사용방법

- ① 양쪽 손잡이를 잡고 중간 원터치 고정 핀이 체결 될 때까지 펼칩니다.
- ② 사용자의 신체 상태에 맞게 4개 다리의 높이조절 버튼을 눌러 모두 동일한 높이로 맞춰 줍니다.
- ③ 바퀴 동작상태, 최대하중(80kg) 등을 확인한 뒤 사용하고 단차 경사로 등에서 사용 시 주의하시기 바랍니다.

애슬론

☎ **제 품 명** 애슬론
 ☎ **코드번호** 3120606010100015
 ☎ **연 락 처** 041-531-9927

☎ **등 록 일** 2021년(상반기)
 ☎ **업 체 명** (주)오토앤로봇
 ☎ **등록가격** 626,115원



제품사양

크기(mm)	610 × 680 × 660~860
	접이 시 : 680 × 225 × 740
	좌석 높이 : 550, 좌석 넓이 : 460
장바구니	320 × 150 × 280
무게	5.1kg
재질	카본
최대하중	100kg

- ▶ **구성품목**
 - 애슬론 성인용 보행기 1세트(의자, 쇼핑백(장바구니) 등 받침 포함)
 - 지팡이 홀더 1세트
 - 사용자 설명서
- ▶ **주요기능**
 - 사용자의 체형에 맞게 7단계로 손잡이의 높이 조절
 - TPE 소재의 바퀴를 사용
 - 낙상의 예방을 돕는 자주형 보행차
 - 원터치로 쉽게 접고, 피는게 가능하여 수납이 쉽고 운반이 용이함
 - 의자로 사용 가능한 등받침
 - 주차 모드로 변경 가능한 핸드 브레이크
 - 인체공학적 손잡이
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 수입(중국)



🔧 사용방법

[사용 전 점검]

- ① 제품을 꺼낸 후 빠진 부품이 없는지 확인하십시오.

[롤레이터 펼치는 방법]

- ① 빨간 버튼을 눌러 잠겨진 좌석을 열어주세요.
- ② 양쪽의 의자 끝부분을 손으로 펴고 살짝 눌러주세요.
- ③ 보행자의 잠금장치에서 똑 소리가 들릴 때까지 의자 양면을 누르세요.

[핸들의 높이 조절]

- ① 핸들 잠금 손잡이를 풀어 원하는 높이로 조절하고 손잡이를 조이세요.

[핸드 브레이크 사용법]

- ① 손잡이 방향으로 브레이크 핸들을 당기면 브레이크가 작동됩니다.
- ② 멈춘 상태(주차)로 있으려면, 브레이크 핸들을 “내림 포지션”

[롤레이터 접기]

- ① 의자 윗부분에 끈을 위로 당기세요.
- ② 의자가 접히면 빨간 버튼이 똑 소리가 들릴 때까지 완전히 접어주세요.

렛츠 플라이

☎ **제 품 명** 렛츠 플라이
 ☎ **코드번호** 3120606010400015
 ☎ **연 락 처** 1877-4717

☎ **등 록 일** 2021년(상반기)
 ☎ **업 체 명** (주)이도컴퍼니앤디
 ☎ **등록가격** 549,000원

제품사양

크기(mm)	570 × 655 × 785~920
	시트 : 385 × 160
무게	6.8kg
가방 최대 적재	12kg
최대하중	100kg

- > **구성품목**
 - 보행기 본체
 - 등받이밴드
 - 가방
 - 한글설명서
- > **주요기능**
 - 접이식으로 공간활용 및 차량 내 적재이동에 용이
 - 수납바구니가 있어 간단한 물건을 보관 가능
 - 좌석시트가 오염에 강하면서 내구성이 강한 재질
 - 평소에 주행브레이크를 잡고, 브레이크를 아래쪽 방향으로 내리면 주차브레이크
 - 손잡이 높이조절 가능(6단계 높이조절).
 - 폴딩 시 자동잠금
- > **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- > **제조(수입) 구분** • 수입(중국)



🔧 사용방법

[접는 방법]

- ① 시트 중앙의 끈을 위로 잡아당겨 보행기를 접어주시기 바랍니다.

[펴는 방법]

- ① 시트 아래의 잠금고리를 위로 올려 해제하고 보행기를 펍니다.
- ② 시트의 양면을 눌러 딸각하는 소리와 함께 보행기가 완전히 펼쳐주시기 바랍니다.

[잡이 높이 조절 방법]

- ① 좌우의 손잡이 조정 레버를 당기십시오.
- ② 레버를 당긴 상태로 손잡이 높이를 조정하고 원하는 높이에 고정되면 레버를 내리고 딸각소리가 나며 고정되는지 확인하십시오.

[주차 브레이크 사용 방법]

- ① 브레이크를 아래로 내리면 후륜이 고정되어 주차 브레이크가 걸립니다.
- ② 아래로 고정된 브레이크를 위로 올리면 고정이 풀립니다.

[주의사항]

- ① 최대사용체중을 지키십시오.
- ② 사용 전에 각 부분을 점검하고 사용하십시오.
- ③ 조립 및 조절을 확실히 행하십시오.

렛츠 무브

☎ **제 품 명** 렛츠 무브
 ☎ **코드번호** 3120606010400025
 ☎ **연 락 처** 1877-4717

☎ **등 록 일** 2021년(상반기)
 ☎ **업 체 명** (주)이도컴퍼니앤디
 ☎ **등록가격** 349,000원



제품사양

크기(mm)	580 × 650 × 780~930
	시트 : 380 × 165
무게	5.4kg
가방 최대 적재	12kg
최대하중	100kg

- ▶ **구성품목**
 - 보행기 본체
 - 등받이밴드
 - 가방
 - 한글설명서
- ▶ **주요기능**
 - 접이식으로 공간활용 및 차량 내 적재이동에 용이
 - 수납바구니가 있어 간단한 물건을 보관 가능
 - 좌석시트가 메쉬소재로 오염에 강하고 내구성이 강함
 - 평소엔 주행브레이크를 잡고, 브레이크를 아래쪽 방향으로 내리면 주차브레이크
 - 손잡이 높이조절 가능(6단계 높이조절).
 - 폴딩 시 자동잠금
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 수입(중국)



🔧 사용방법

[접는 방법]

- ① 시트 중앙의 끈을 위로 잡아당겨 보행기를 접어주시기 바랍니다.

[펴는 방법]

- ① 시트 아래의 잠금고리를 위로 올려 해제하고 보행기를 펴니다.
- ② 시트의 양면을 눌러 딸각하는 소리와 함께 보행기가 완전히 펼쳐주시기 바랍니다.

[잡이 높이 조절 방법]

- ① 좌우의 손잡이 조절 노브를 풀어주세요.
- ② 손잡이를 상하로 움직여 높이를 정한 후 손잡이 조절 노브를 확실히 조여주세요.
- ③ 양쪽 손잡이의 높이를 같게 해주십시오.

[주차 브레이크 사용 방법]

- ① 브레이크를 아래로 내리면 후륜이 고정되어 주차 브레이크가 걸립니다.
- ② 아래로 고정된 브레이크를 위로 올리면 고정이 풀립니다.

[주의사항]

- ① 최대사용 체중을 지키십시오.
- ② 사용 전에 각 부분을 점검하고 사용하십시오.
- ③ 조립 및 조절을 확실히 행하십시오.

보행차(CA8860L)

☎ **제 품 명** 보행차(CA8860L)
 ☎ **코드번호** 3120606010600015
 ☎ **연 락 처** 010-5399-7971

☎ **등 록 일** 2021년(하반기)
 ☎ **업 체 명** 미키코리아메디칼
 ☎ **등록가격** 150,000원

제품사양

크기(mm)	720 × 640 × 820 ~ 920
	좌폭 : 400
무게	7 kg
안전 하중	100 kg
바구니 안전 적재 하중	5 kg
재질	알루미늄

- ▶ **구성품목**
 - 메인프레임
 - 핸들
 - 시트
 - 등받이 시트
 - 바구니
 - 8인치 휠
 - 지팡이 꽃이
 - 컵홀더
- ▶ **주요기능**
 - 휠 360° 회전 가능
 - 외출 시 의자 겸용으로 사용 가능
 - 손잡이 및 등받이 높이 조절 가능
 - 가방형 바구니 및 지팡이 꽃이를 통해 수납 가능
 - 컵홀더 분리 가능
 - 접이가 가능해 수납과 이동 가능
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 수입(중국)



⚙️ 사용방법

- ① 양쪽 손잡이를 잡고 가볍게 펼쳐줍니다.
- ② 시트 프레임의 양쪽을 위에서 누르면서 본체를 펼쳐줍니다.(딸깍하고 걸리는 소리가 나면 펼침 완료)
- ③ 손잡이에 위치한 브레이크를 지면 쪽으로 밀어 주차브레이크를 걸어줍니다.
- ④ 사용자의 체형에 맞게 손잡이 높이를 조절합니다.
- ⑤ 사용자의 체형에 맞게 U자형 등받이 높이를 조절합니다.
- ⑥ 손잡이에 위치한 브레이크를 위로 당겨 주차브레이크를 풀어줍니다.
- ⑦ 사용합니다.
- ⑧ 이동 시 브레이크를 사용할 때에는 브레이크를 살짝 쥐어주듯이 당겨줍니다.(자전거 브레이크 사용법과 동일)
- ⑨ 단차가 있는 곳으로 올라갈 때에는 뒷바퀴 옆에 있는 푸시대를 살짝 눌러 들어 올립니다.
- ⑩ 컵홀더는 오른쪽의 컵홀더 걸이에 꽂아 사용합니다.
- ⑪ 지팡이는 왼쪽의 벨크로 벨트에 꽂아 사용합니다.
- ⑫ 좌석시트에 있는 손잡이는 위로 당겨 접은 후 보관합니다.

타기(TAGI)

☎제 품 명 타기(TAGI)
 ☎코드번호 3120606010600025
 ☎연 락 처 010-5399-7971

☎등 록 일 2023년(하반기)
 ☎업 체 명 미키코리아메디칼
 ☎등록가격 287,000원



제품사양

크기(mm)	640(길이) × 620(넓이) × 820~940(높이)
제품 중량	8 kg (최대하중 : 100 kg 이하)
재질	알루미늄

- > 구성품목
 - 본체(손잡이, 손잡이 브레이크, 좌석시트, 등받이)
 - 가방, 컵홀더, 지팡이꽂이
- > 주요기능
 - 높이조절(손잡이)이 원터치 방식으로 가능
 - 앞바퀴가 360도 회전하여 부드럽게 방향 조절
 - 좌석시트, 탈부착형 가방, 우산꽂이, 컵홀더 제공
- > 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- > 제조(수입) 구분 • 수입(중국)



🔧 사용방법

- ① 양쪽의 손잡이를 잡고 가볍게 펼쳐줍니다.
- ② 좌석 양쪽 프레임에 위에서 가볍게 눌러 “딸깍”소리가 날 때까지 펼쳐줍니다.
- ③ 손잡이 브레이크를 지면 쪽으로 밀어 주차브레이크를 걸어줍니다.
- ④ 손잡이 높이를 조절 한뒤 주차브레이크를 풀어 이동합니다.
- ⑤ 이동 시 브레이크를 사용 할 때는 위로 당겨 줍니다. (자전거 브레이크 사용법과 동일)

HM-606

◎제품명 HM-606

◎코드번호 3120606011100010

◎연락처 031-534-2298

◎등록일 2022년(하반기)

◎업체명 (주)현대메딕스

◎등록가격 54,800원

제품사양

크기(mm)	640 × 550 × 770~890
제품 중량	2.28 kg
재질	알루미늄 합금

> 구성품목

- 본체
- 설명서

> 주요기능

- 접이식으로 공간활용이 용이
- 알루미늄재질로 녹슬지 않으며 열처리코팅으로 내구성이 뛰어남
- 다리에 고무캡이 있어 미끄럼 방지 기능
- 높이 조절이 가능하며 고무 재질의 손잡이로 미끄럼방지 및 지압효과

> 유통망(판매 가능 지역) • 전국

> 제조(수입) 구분 • 국내제작



⚙️ 사용방법

- ① 펴는 방법 : 가운데 버튼을 누르고 양쪽 손잡이를 잡은 상태로 바깥쪽으로 펴주시면 됩니다. 다리를 펼칠 때 양쪽 모두 “딱”하고 걸리는 소리가 날때까지 다 펴주셔야 안전하며, 움직이는 부위에 손가락, 옷자락 등이 끼이지 않도록 주의해주세요.
- ② 접는 방법 : 가운데 버튼을 누르고 양쪽 손잡이를 잡은 상태로 가운데쪽으로 접어주시면 됩니다.
- ③ 다리높이 조절 방법 : 각 다리의 높이조절 버튼을 누르면서 약간 비튼 후, 사용자 신장에 맞춰 조절하고 버튼이 “딱”소리가 나며 튀어 올라오게 합니다. 반드시 4개의 다리 높이를 동일하게 맞추시기 바랍니다.

AWT-501

☎ **제 품 명** AWT-501
 ☎ **코드번호** 3120612010700010
 ☎ **연 락 처** 031-677-7522

☎ **등 록 일** 2022년(상반기)
 ☎ **업 체 명** (주)에이엠이
 ☎ **등록가격** 405,000원



제품사양

크기(mm)	640(폭) × 720(깊이) × 870~1170(높이)
제품 중량	13.3 kg
재질	스틸(본체)

- > **구성품목**
 - 보행차 상부프레임 및 하부프레임
 - 오각노브(높이조절장치)
 - 육각렌치
 - 고정볼트(4ea)
- > **주요기능**
 - 사용자의 신체를 고려한 7단계 높이 조절
 - 사용 중 팔꿈치 이탈 방지 구조
 - 보행 시 발걸림 방지, 손잡이 각도 조절
 - 우레탄 바퀴로 조용하고 안정적이며 제품 회전 너비가 작음
- > **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- > **제조(수입) 구분** • 국내제작



🔧 사용방법

- ① 보행차 뒤에 있는 버튼을 누르고 1~7단계 중 원하는 높이에 맞춰주세요.
(상부프레임 뒷면에서는 높이 단계를 확인하고, 앞면에서는 노브를 돌려 고정)
- ② 손잡이의 경우, 두 개의 오각노브를 돌려서 느슨하게 풀어준 다음 원하는 각도로 조절하고 노브를 다시 조여 고정해주세요.
- ③ 보행차 뒤에 주차브레이크를 내리면 바퀴가 고정되고, 위로 올리면 고정된 바퀴가 풀립니다.

지체·뇌병변장애 | 음식섭취 보조기기(식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대)

UD 커트러리 세트(굿그립)

☎ **제품명** UD 커트러리 세트(굿그립)

☎ **코드번호** 3150927010000010

☎ **연락처** 042-932-9101

☎ **등록일** 2021년(상반기)

☎ **업체명** 공생

☎ **등록가격** 24,000원

제품사양

크기(mm)	스푼 : 222 × 390 포크 : 222 × 320
무게	약 80g
재질	헤드 : 스테인레스 그립 : 멜라민

- ▶ **구성품목** • 스푼, 사용설명서, 포장케이스
- ▶ **주요기능**
 - 신체에 맞게 헤드 각도 조절 가능
 - 바닥과 떨어진 하단의 공간에 손가락을 넣어, 보다 수월하게 들어올릴 수 있음
 - 헤드가 바닥과 떨어져 있으므로 음식물이 식탁에 닿지 않음
(단, 헤드의 각도를 조절하게 되면 무게중심이 바뀌어 헤드가 바닥에 닿을 수도 있음)
 - 손목통증 완화에 좋음
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작



🔧 사용방법

- ① 자신의 신체에 맞게 헤드의 각도를 조절합니다.
- ② 자신의 손에 맞게 식기를 손에 잡습니다.
- ③ 음식물을 식기로 떠 올립니다.
- ④ 음식물을 입에 넣습니다.

지체·뇌병변장애 | 음식섭취 보조기기(식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대)

UD 커트러리 세트(슬립그립)

☎ **제품명** UD 커트러리 세트(슬립그립)

☎ **코드번호** 3150927010000020

☎ **연락처** 042-932-9101

☎ **등록일** 2021년(상반기)

☎ **업체명** 공생

☎ **등록가격** 24,000원

제품사양

크기(mm)	스푼 : 222 × 390 포크 : 222 × 260
무게	약 60g
재질	헤드 : 스테인레스 그립 : 멜라민

- ▶ **구성품목** • 스푼, 사용설명서, 포장케이스
- ▶ **주요기능**
 - 신체에 맞게 헤드 각도 조절 가능
 - 바닥과 떨어진 하단의 공간에 손가락을 넣어, 보다 수월하게 들어올릴 수 있음
 - 헤드가 바닥과 떨어져 있으므로 음식물이 식탁에 닿지 않음
(단, 헤드의 각도를 조절하게 되면 무게중심이 바뀌어 헤드가 바닥에 닿을 수도 있음)
 - 그립의 앞쪽 4면에 가이드홈이 손가락을 놓는 위치를 가이드
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작



🔧 사용방법

- ① 자신의 신체에 맞게 헤드의 각도를 조절합니다.
- ② 자신의 손에 맞게 식기를 손에 잡습니다.
- ③ 음식물을 식기로 떠 올립니다.
- ④ 음식물을 입에 넣습니다.

스페셜 우드 그립 세트

☎ **제 품 명** 스페셜 우드 그립 세트
 ☎ **코드번호** 3150927010000030
 ☎ **연 락 처** 042-932-9101

☎ **등 록 일** 2021년(상반기)
 ☎ **업 체 명** 공생
 ☎ **등록가격** 100,000원

제품사양

크기(mm)	스푼 : 150
	포크 : 150
무게	약 82g
재질	헤드 : 스테인레스
	그립 : 우드

- > **구성품목**
 - 스푼
 - 사용설명서
 - 포장케이스
- > **주요기능**
 - 신체에 맞게 헤드 각도 조절 가능
 - 그립의 양쪽에 있는 홈이 그립 가이드 역할
 - 그립의 맨 끝 쪽을 잡고 사용 가능
 - 바닥과 떨어진 하단의 공간에 손가락을 넣어, 보다 수월하게 들어올릴 수 있음
 - 세울 수 있는 스탠드형으로, 세워놔를 경우 헤드 부분이 식탁에 닿지 않아 위생적인 사용 가능
- > **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- > **제조(수입) 구분** • 국내제작



🔧 사용방법

- ① 자신의 신체에 맞게 헤드의 각도를 조절합니다.
- ② 자신의 손에 맞게 식기를 손에 찹니다.
- ③ 음식물을 식기로 떠 올립니다.
- ④ 음식물을 입에 넣습니다.


지체·뇌병변장애 | 음식섭취 보조기기(머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시)

테누라 미끄럼방지 컵받침 9cm(사각형)

- ☉ **제 품 명** 테누라 미끄럼방지 컵받침 9cm(사각형) ☉ **등 록 일** 2021년(상반기)
 ☉ **코드번호** 3150927009800015 ☉ **업 체 명** (주)유디센터
 ☉ **연 락 처** 02-3662-1051 ☉ **등록가격** 13,000원

제품사양

크기(mm)	900 × 900
재질	실리콘
색상	빨강, 노랑, 파랑

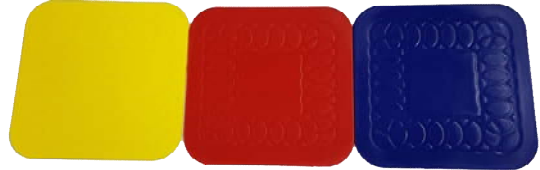

- > **구성품목** • 제품 본품
 > **주요기능** • 대부분 타입의 컵을 매끄러운 표면, 테이블, 데스크 위, 또는 수평이 아니거나, 움직이는 표면에서 단단히 잡아주는 미끄럼 방지 기능
 • 음료 흘림을 방지하고, 컵을 제자리에 유지시켜줌, 무독성 화학적 불활성(프탈레이트 성형제 미사용)
 • 250도까지 안전 고압 소독 가능, 항균성, 완전 세척 용이, 수명이 김
 > **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
 > **제조(수입) 구분** • 수입(영국)

🔧 사용방법

- ① 미끄럼 방지 컵받침을 미끄럽거나 기울어지거나 움직이는 표면 위에 놓고, 그 위에 컵이나 그릇, 병 등을 놓아 사용합니다.
- ② 따뜻한 비눗물로 온전히 세척 가능합니다.
- ③ 먼지가 끼지 않는 곳에 보관합니다.

지체·뇌병변장애 | 음식섭취 보조기기(머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시)

테누라 미끄럼방지 컵받침 14cm/19cm

- ☉ **제 품 명** 테누라 미끄럼방지 컵받침 14cm/19cm ☉ **등 록 일** 2021년(상반기)
 ☉ **코드번호** 3150927009800025 ☉ **업 체 명** (주)유디센터
 ☉ **연 락 처** 02-3662-1051 ☉ **등록가격** 13,000원

제품사양

크기(mm)	∅140 or 190
재질	실리콘
색상	빨강, 노랑, 파랑



- > **구성품목** • 제품 본품
 > **주요기능** • 대부분 타입의 컵을 매끄러운 표면, 테이블, 데스크 위, 또는 수평이 아니거나, 움직이는 표면에서 단단히 잡아주는 미끄럼 방지 기능
 • 음료 흘림을 방지하고, 컵을 제자리에 유지시켜 줌
 • 무독성 화학적 불활성(프탈레이트 성형제 미사용)
 • 250도까지 안전 고압 소독 가능
 • 항균성, 완전 세척 용이, 수명이 김
 > **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
 > **제조(수입) 구분** • 수입(영국)

🔧 사용방법

- ① 미끄럼 방지 컵받침을 미끄럽거나 기울어지거나 움직이는 표면 위에 놓고, 그 위에 컵이나 그릇, 병 등을 놓아 사용합니다.
- ② 따뜻한 비눗물로 온전히 세척 가능합니다.
- ③ 먼지가 끼지 않는 곳에 보관합니다.

지체·뇌병변장애 | 음식섭취 보조기기(음료 및 음료 취수용 보조기기)

테누라 미끄럼방지 컵홀더

☎ **제 품 명** 테누라 미끄럼방지 컵홀더
☎ **코드번호** 3150927009800035
☎ **연 락 처** 02-3662-1051

☎ **등 록 일** 2021년(상반기)
☎ **업 체 명** (주)유디센터
☎ **등록가격** 12,500원

제품사양

크기(mm)	Ø90
재질	실리콘
색상	빨강, 노랑, 파랑



- ☞ **구성품목** • 제품 본품
- ☞ **주요기능**
 - 대부분 타입(모양과 크기)의 컵을 매끄러운 표면, 테이블 등 위에서 단단히 잡아주는 강한 그립력 제공
 - 수평이 아니거나, 움직이거나 넘어질 수 있는 표면에서도 컵을 단단히 잡아줌
 - 음식, 음료 흘림을 방지, 무독성 화학적 불활성(프탈레이트 성형제 미사용)
 - 250도까지 안전 고압 소독 가능, 항균성, 완전 세척 용이, 수명이 김
- ☞ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ☞ **제조(수입) 구분** • 수입(영국)

☞ 사용방법

- ① 컵홀더의 구멍이 뚫려있는 부분을 위로 놓고, 컵을 그 구멍에 끼우듯 넣어, 테이블 등 위에 놓고 사용합니다. (컵에 홀더가 끼워진 상태 그대로 사용)
- ② 따뜻한 비눗물로 온전히 세척 가능합니다.
- ③ 먼지가 끼지 않는 곳에 보관합니다.

지체·뇌병변장애 | 음식섭취 보조기기(음료 및 음료 취수용 보조기기)

테누라 미끄럼방지 손잡이

☎ **제 품 명** 테누라 미끄럼방지 손잡이
☎ **코드번호** 3150927009800045
☎ **연 락 처** 02-3662-1051

☎ **등 록 일** 2021년(상반기)
☎ **업 체 명** (주)유디센터
☎ **등록가격** 22,000원

제품사양

크기(mm)	길이 125 × 지름 35(끼우는 쪽 32)
색상	화색



- ☞ **구성품목** • 제품 본품(손잡이) 2개
- ☞ **주요기능**
 - 약력이 약하거나 손 관절 움직임에 제한이 있는 사람들을 위한 제품
 - 모든 모양과 사이즈의 숟가락, 포크, 칫솔 등의 손잡이에 맞게 디자인된 유니버설 미끄럼방지 싸개
 - 그립감이 좋도록 텍스처를 넣은 부드러운 핸들
 - 무독성 화학적 불활성(프탈레이트 성형제 미사용)
 - 250도까지 안전 고압 소독 가능, 항균성, 완전 세척 용이, 수명이 김
- ☞ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ☞ **제조(수입) 구분** • 수입(영국)

☞ 사용방법

- ① 미끄럼 방지 손잡이의 구멍 뚫린 곳에, 숟가락이나 포크, 칫솔 등의 손잡이 부분을 최대한 깊이 끼워 사용
- ② 따뜻한 비눗물로 온전히 세척 가능합니다.
- ③ 먼지가 끼지 않는 곳에 보관합니다.

링크마마

☎ 제품명 링크마마

☎ 코드번호 3091225009600010

☎ 연락처 062-971-5664

☎ 등록일 2021년(상반기)

☎ 업체명 (주)링크옵틱스

☎ 등록가격 1,980,000원

제품사양

크기(mm)	790 × 490 × 890
무게	약 38kg
정격전압	AC220V, 60Hz
재질	ABS, 스틸

> 구성품목

- 설명서
- 비데 부착 가능
- 화장실 벽 링크마마 부착 설명서

> 주요기능

- 몸이 불편한 자들의 변기에서의 기립을 보조
- 몸무게 150kg의 사용자를 들어 올릴 수 있음
- 한쪽의 안전손잡이는 80N의 힘을 가하여도 움직임이 없음
- 양쪽에 안전손잡이를 설치하여 사용자의 좌우 이탈을 방지하며, 변기에 앉거나 일어날 때 몸을 지탱할 수 있게 함

> 유통망(판매 가능 지역) • 전국

> 제조(수입) 구분 • 국내제작



⚙️ 사용방법

- ① 리모컨의 ▲버튼을 눌러 시트를 적당한 높이까지 올립니다
- ② 착석하신 뒤, ▼버튼을 눌러 시트를 내립니다
- ③ 사용 후, ▲버튼을 눌러 시트를 이용에 천천히 일어납니다.
- ④ ▼버튼 눌러 시트를 원상 복귀 시켜줍니다.

* 비상상황 발생 시, 좌측면의 버튼을 눌러 시트를 내려주시길 바랍니다.

BFSH10

☎ **제 품 명** BFSH10
 ☎ **코드번호** 3091225000900010
 ☎ **연 락 처** 031-677-9924

☎ **등 록 일** 2021년(하반기)
 ☎ **업 체 명** (주)보필
 ☎ **등록가격** 203,000원

제품사양

크기(mm)	665 × 440 × 565~625
좌면 폭(mm)	525
제품 중량	5.8 kg
재질	알루미늄, EVA, 고무나무 등

- > 구성품목**
 - 변기 고정지지대
 - 변기 고정핸들
 - 목재 팔걸이
 - 조정 발
 - 중간프레임 + 플라스틱 커버
 - POST, 조립볼트, 높낮이 고정핸들
- > 주요기능**
 - 가벼워서 손쉽게 설치 가능
 - 변기 보호 쿠션장치 적용
 - 팔걸이 올림 가능
 - 신체 사이즈에 맞게 높이 조절가능
- > 유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- > 제조(수입) 구분** • 국내제작



🔧 사용방법

[손잡이 높이조절]

- ① 높낮이 고정 핸들을 풀니다.(사용설명서 참조)
- ② 눈금 표시에 맞추어 위치를 잡습니다.
- ③ 높이 설정 후 고정핸들을 잠급니다.

[변기 고정방법]

- ① 변기에 천천히 밀어 넣습니다.
- ② 변기 고정핸들을 돌려서 고정시킵니다.
- ③ 조정발을 돌려서 바닥과 수평을 맞춥니다.

케어핸들-2

☎ **제품명** 케어핸들-2

☎ **코드번호** 3091225006200020

☎ **연락처** 031-677-9117

☎ **등록일** 2021년(하반기)

☎ **업체명** 보림제작소

☎ **등록가격** 178,000원

제품사양

크기(mm)	620(가로)×430(세로)×640(높이)
무게(kg)	약 3.6
재질	원목, AL, EVA 등

- > **구성품목** • 제품(일체형), 사용설명서(보증서 포함)
- > **주요기능** • 견고한 구조와 50×30 각파이프를 사용하여 안전성 확보
• 별도의 추가 조립이 필요없고 손쉽게 설치 할 수 있는 구조
• 3차원 밴딩한 고정지지대로 강력하게 고정
• 무게가 가벼워 이동·보관·설치가 용이
- > **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- > **제조(수입) 구분** • 국내제작



사용방법

- ① 변기 고정핸들을 풀고 변기고정 지지대를 옆으로 벌립니다.
- ② "사용설명서" 상의 그림과 같이 변기에 천천히 밀어 넣습니다.
- ③ 과도한 힘이나 속도로 밀 경우 중간 프레임과 변기가 충돌할 수 있으니 주의합니다.
- ④ 변기 고정지지대를 변기에 밀착시킨 후 변기 고정핸들을 강하게 조입니다.
- ⑤ 조절발을 돌려 바닥과 수평을 맞추십시오. 수평조절 시 조절발을 최대한 돌려서 확실하게 고정합니다.

케어핸들-3

☎ **제품명** 케어핸들-3

☎ **코드번호** 3091225006200030

☎ **연락처** 031-677-9117

☎ **등록일** 2021년(하반기)

☎ **업체명** 보림제작소

☎ **등록가격** 175,000원

제품사양

크기(mm)	620(가로)×400(세로)×340(높이)
무게(kg)	약 3.9
재질	STS, PP, EVA 등

- > **구성품목** • 제품(일체형), 사용설명서(보증서 포함)
- > **주요기능** • 5T STS 재질을 사용한 메인 프레임을 사용하여 안전성 확보
• 변기 고정노브와 메인 프레임의 변기 볼트로 고정하여 흔들림을 방지
• 심플한 디자인으로 재질(STS) 대비 경량화 실현
• 심플한 디자인으로 협소한 공간에도 거치 가능
- > **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- > **제조(수입) 구분** • 국내제작



사용방법

- ① 양변기 볼트를 풀어 변기 뚜껑과 변기 시트를 분리합니다.
- ② 케어 핸들-3를 엮고, 변기 시트와 변기 뚜껑을 다시 설치 후 볼트를 체결합니다.
- ③ 케어 핸들-3 하단의 변기 고정노브를 조여 제품을 고정합니다.

지체·뇌병변장애 | 기립 및 기립을 위한 지지대(기립훈련기)

슈마 DA-7800

☎ **제 품 명** 슈마 DA-7800
 ☎ **코드번호** 3053603000300010
 ☎ **연 락 처** 02-3437-8275

☎ **등 록 일** 2021년(하반기)
 ☎ **업 체 명** (주)대안의료기
 ☎ **등록가격** 1,600,000원

제품사양

크기(mm)	730(가로)×850(세로)×2150(높이)
무게(kg)	27
재질	철재, 스텐레스, 레자, 목재
최대사용중량(kg)	100
책상높이(mm)	900 ~ 1,380
철봉높이(mm)	950 ~ 2,150

- > 구성품목**
 - 제품사용 설명서
 - 무릎패드
 - 엉덩이당김 끈
 - 탄력밴드 세트
 - 보조자켓
 - 책상
- > 주요기능**
 - 보조자켓 탈·부착 가능
 - 자켓 착용으로 상체하중을 줄인 상태에서 기립훈련과 근육 강화 운동 가능
 - 하체나 무릎이 약하신 분들도 체중의 부하를 줄여주어 효과적으로 사용
 - 침대 안쪽으로 기립기의 뒤쪽을 넣고 사용자를 세울 수 있음
 - 책상(팔 받침대)과 무릎패드는 탈·부착 가능
 - 무릎패드를 빼고 몸체를 흔들여 주는 스쿼드 운동 가능
- > 유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- > 제조(수입) 구분** • 국내제작



⚙ 사용방법

- ① 보조 자켓을 침상 또는 휠체어에 사용자가 앉을 수 있게 펴 줍니다.
- ② 사용자의 엉덩이(엉덩이와 허벅지 사이)가 엉덩이받침 끈에 걸치도록 앉힙니다.
- ③ 하지고정밴드를 허벅지 안쪽에서 바깥으로 감싸면서 벨크로(찍찍이)에 붙입니다.
- ④ 조임벨트를 체결하고 조임레버를 좌우로 움직여 조여줍니다.
- ⑤ 기립용벨트 고리를 보조자켓 하단부의 자켓링에 체결합니다.
- ⑥ 사용자의 무릎이 무릎패드에 닿도록 합니다.
- ⑦ 하단부의 안전벨트를 팔걸이에 달려있는 기립용 안전버클에 체결하고 좌우 번갈아 반복해서 당기어 기립시킵니다.
- ⑧ 보조자켓의 상부 안전벨트를 링에 체결하고 철봉에 있는 탄력밴드에 걸쳐 놓습니다.
- ⑨ 안전벨트 끈을 당기어 하중을 감소시키고 기립상태를 도와줍니다.
- ⑩ 균형 및 보행훈련 시 무릎패드를 제거하고 사용합니다.

장애인보조기기 교부사업

장애인보조기기 교부사업
42개 품목

장애인보조기기 상담
및 정보제공처

장애인보조기기 교부사업
참고서식

자주 묻는 질문 Q & A

BFMB8

◎제품명 BFMB8

◎코드번호 3091203000900050

◎연락처 031-677-9924

◎등록일 2021년(하반기)

◎업체명 (주)보필

◎등록가격 333,000원

제품사양

크기(mm)	600 × 540 × 800~920 좌면 : 440 × 490 × 400~530
좌면까지 높이(mm)	400~530
무게	15.5 kg

- ▶ 구성품목 • 본체 : 고무나무, 쇼파 : 합성피혁, 쿠션재 : 우레탄폼
• 버켓, 받침판, 좌변기 베이스 : 폴리프로필렌, 소프트 좌면 : E.V.A
- ▶ 주요기능 • 쇼파겸용 이동변기, 신장에 따라 4단 높이 조절 가능, 원목 사용
- ▶ 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- ▶ 제조(수입) 구분 • 국내제작



⚙️ 사용방법

[손잡이 높이조절]

- ① 드라이버를 이용하여 높이를 4단 조절합니다

[좌면 높이조절]

- ① 드라이버를 이용하여 앞, 뒤 다리조절 판을 분리합니다.
- ② 신체 사이즈에 맞게 4곳의 다리조절 판을 조립합니다.

[좌면 후방 개폐기능]

- ① 좌면을 뒤로 넘깁니다.
- ② 좌면 지지바를 위로 들어 올리고 좌면을 뒤로 넘깁니다.
- ③ 원위치는 역순으로 합니다.

[좌면 후방 개폐기능]

- ① 사용 후 번기시트를 올리고 번기통 뚜껑을 덮고 꺼냅니다.
- ② 화장실로 이동 후 배변을 처리하고 깨끗이 씻어줍니다

BFMB20

◎제품명 BFMB20

◎코드번호 3091203000900060

◎연락처 031-677-9924

◎등록일 2023년(상반기)

◎업체명 (주)보필

◎등록가격 285,000원

제품사양

크기(mm)	575~635(전체 높이) 370~430(시트 높이) 435(시트폭), 530(전체폭)
제품 중량	6.9 kg (최대사용 하중 : 95kg)
재질	알루미늄, 우레탄, PP 등

- ▶ 구성품목 • 목욕의자
- ▶ 주요기능 • 좁은 공간에서도 보관 및 사용이 용이, 번기통을 위, 아래로 분리 가능, 신장에 따라 4단으로 높이 조절 가능
- ▶ 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- ▶ 제조(수입) 구분 • 국내제작



⚙️ 사용방법

- ① 높이조절 버튼을 누른 상태로 4단 조절을 합니다.
- ② 팔걸이, 좌면 앞과 등받이를 잡고 위로 접거나 펴서 사용합니다.

APT-210

☎ **제 품 명** APT-210
 ☎ **코드번호** 3091203010700010
 ☎ **연 락 처** 031-677-7522

☎ **등 록 일** 2022년(상반기)
 ☎ **업 체 명** (주)에이엠이
 ☎ **등록가격** 198,000원

제품사양

크기(mm)	497(가로) × 535(세로) × 780~830(높이)
제품 중량	13.8 kg
재질	ABS(본체), EVA(변좌), PP(변기통)

- ▶ **구성품목**
 - 본체
 - 등받이 커버, 등받이, 등받이 고정부
 - 휴지걸이, 팔걸이, 팔걸이 덮개, 팔걸이 고정부
 - 설명서
- ▶ **주요기능**
 - 댐퍼 장착으로 천천히 내려오는 안전한 변좌
 - 좌면 높이(6단) 조절 및 팔걸이 높낮이(5단) 조절
 - 캐스터가 있어 이동 시 편리
 - 내열소재 변기통으로 내열소독 가능
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작



🔧 사용방법

- ① 사용자의 신체에 따라 좌면과 팔걸이 높이를 조정해주세요.
- ② 용변을 보기 위해 좌면시트를 분리해 주세요.
- ③ 변좌를 들고 변기통의 뚜껑을 들어낸 다음, 다시 변좌를 내립니다.
- ④ 사용이 끝나면 다시 변좌를 들고 변기통의 뚜껑을 닫은 다음, 변좌와 시트를 내립니다.

APT-101

◎제품명 APT-101

◎코드번호 3091203010700020

◎연락처 031-677-7522

◎등록일 2022년(하반기)

◎업체명 (주)에이엠이

◎등록가격 306,000원

제품사양

크기(mm)	470(폭) × 500(길이) × 850~910(높이)
제품 중량	16.2 kg / 변기통용량 : 9L
재질	천연목(본체), 우레탄, PP

- > 구성품목
 - 원목 본체, 등받이, 좌우팔걸이, 보조팔걸이
 - 변기통, 변좌패드, 변좌
 - 드라이버, 등받이 볼트&너트, 팔걸이볼트
 - 설명서
- > 주요기능
 - 고령자가 일반가정 등에서 장소를 이동해가며 배변할 수 있는 이동변기
 - 좌면의 높이(3단계) 및 팔걸이의 높이(3단계) 조절 가능
 - 내열소재 변기통으로 내열소독 가능
- > 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- > 제조(수입) 구분 • 국내제작



사용방법

- ① 사용자의 신체환경에 따라 좌면의 높이 및 팔걸이 높이를 조정하여 주세요.
- ② 이동변기를 이용 할 때는 앞쪽을 살짝 들고 뒤쪽의 캐스터를 이용하여 이동해 주세요.(이때 변기통이 비어 있는지 반드시 확인해주세요.)
- ③ 필요한 경우, 짧은 손잡이인 보조손잡이를 사용 환경에 따라 팔걸이와 교체하여 사용하면 침대에서 이동변기로의 이동이 용이합니다.
- ④ 사용 시 시트를 들어 뒤로 밀어서 시트고정 손잡이로 고정하거나 뒤로 밀어 젖힙니다.
- ⑤ 변좌를 들고 변기통의 뚜껑을 들어낸 다음, 다시 변좌를 내립니다.
- ⑥ 용변을 보고 사용이 끝나면 다시 변좌를 들고 변기통의 뚜껑을 닫은 다음, 변좌와 시트를 내립니다.

APT-105

☎제 품 명 APT-105
 ☎코드번호 3091203010700030
 ☎연 락 처 031-677-7522

📅등 록 일 2022년(하반기)
 🏢업 체 명 (주)에이엠이
 💰등록가격 248,000원



제품사양

크기(mm)	482(폭) × 497(길이) × 642~732(높이)
제품 중량	12 kg / 변기통용량 : 9L
재질	천연목(본체), PP

➤ 구성품목 • 원목 본체, 다리높이 조절부(뒤 4ea, 앞 4ea), 좌면시트, 변기통
 • 6각 볼트, 6각 렌치, 설명서

➤ 주요기능 • 손가락 끼임 방지를 위한 슬로우 다운 기능
 • 높이조절부를 통해 편리한 높낮이 조절 가능
 • 내열소재 변기통으로 내열소독 가능
 • 좌면시트가 분리되며, 시트커버의 손쉬운 세탁이 가능

➤ 유통망(판매 가능 지역) • 전국

➤ 제조(수입) 구분 • 국내제작



🔧 사용방법

- ① 사용자의 신체환경에 따라 다리높이 조절부를 이용해 높이를 조정하여 주세요.
- ② 용변을 보기 위해 좌면시트를 분리하여 들어내 주세요.
- ③ 변좌를 들고 변기통의 뚜껑을 들어낸 다음, 다시 변좌를 내립니다.
- ④ 용변을 보고 사용이 끝나면 다시 변좌를 들고 변기통의 뚜껑을 닫은 다음, 변좌와 시트를 내립니다.

이동식 좌욕온수세정기

☎ **제 품 명** 이동식 좌욕온수세정기
 ☎ **코드번호** 3091203011500010
 ☎ **연 락 처** 032-670-7827

☎ **등 록 일** 2023년(하반기)
 ☎ **업 체 명** 보원테크
 ☎ **등록가격** 1,210,000원

제품사양

크기(mm)	620(가로) × 720(세로) × 950(높이)
제품 중량	17 kg 최대하중 : 100 kg 이하)
재질	본체-ABS 프레임-강철(Steel)

- > **구성품목** • 본체, 변기통, 뚜껑, 보조물탱크, 캡, 좌욕판, 사용설명서
- > **주요기능** • 화장실로 이동할 필요 없이 용변을 보고 온수로 항문을 세척·건조
 • 이동변기 기능, 온수 세정 기능, 건조 기능
 • 온열시트 기능, 온수좌욕 기능
- > **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- > **제조(수입) 구분** • 국내제작



⚙️ 사용방법

- ① 제품을 사용하고자 하는 곳에 위치하고 제품 뒤에 있는 물통과 물펌프를 위치시킵니다.
- ② 보조물탱크에 물을 2/3 보충하고 전원을 콘센트에 연결합니다.
- ③ 스위치를 켜면 물펌프가 가동되면서 물통에 물이 보충되고 변기통을 열선 시트 아래에 넣고 열선 시트를 다시 내린뒤 용변을 봅니다.
- ④ 세정, 단계(수압), 건조, 좌욕, 시트(열선) 버튼을 눌러 사용합니다.

조은리프트

☎제 품 명 조은리프트
 ☎코드번호 3091203008800010
 ☎연 락 처 031-443-7783

📅등 록 일 2023년(상반기)
 🏢업 체 명 씨피씨
 💰등록가격 1,320,000원



제품사양

크기(mm)	680 × 700 × 820
무게	2.8 kg
재질	PP, PC, SUS304
전원	입력 AC 100~240V

- ▶ 구성품목
 - 본체
 - 설명서
- ▶ 주요기능
 - 상하 수직으로 움직이는 리프팅 기능
 - 곡선 및 유선으로 움직이는 틸팅 기능
 - 자동기립 보조에 직접적인 도움
 - 타인 노출에 민감한 배변활동의 자립성 증가
- ▶ 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- ▶ 제조(수입) 구분 • 국내제작



🔧 사용방법

- ① 리모컨을 사용하여 변기 시트의 상승/하강을 진행합니다.
- ② 리모컨의 작동버튼 <오토메틱 상승, 하강>, <매뉴얼 상승, 하강> 중 상승 버튼을 누릅니다. (오토메틱은 한번 누르면 계속 작동되며 손을 떼고 있어도 작동됩니다.)
- ③ 사용자에게 적당한 높이가 되면 작동을 멈추고 시트에 착석합니다.
- ④ 착석 후 작동 버튼(오토메틱, 매뉴얼) 중 하강 버튼을 누릅니다. 비데(옵션) 사용 시, 비데에서 제공하는 기능을 사용합니다.
- ⑤ 사용이 완료되면 다시 상승 버튼을 누릅니다. 이 때 몸이 매우 불편한 경우, 오토메틱으로 작동시키고 두 손으로 팔걸이를 붙잡아 안정하게 상승시킵니다.
- ⑥ 기립이 되면 시트를 다시 원위치 시킵니다. 아울러 긴급 상황 발생 시, 리모컨의 SOS 버튼을 눌러 외부인에게 알립니다.

음성인식LED조명세트

☎ 제품명 음성인식LED조명세트
 ☎ 코드번호 3241303007100030
 ☎ 연락처 031-666-8979

☎ 등록일 2023년(상반기)
 ☎ 업체명 (주)보임
 ☎ 등록가격 400,000원

제품사양

음성인식 LED 원형방등 50W

정격	AC220V/60Hz/50W/0.25A
백열전구 대비밝기	80WX3
전격광속	3,800 lm(등기구의 밝기)
제품사이즈	∅460 X 60 mm
광원색	6,500 K(주광색)
광효율	75 lm/W

음성인식 LED 사각거실등 50W

정격	AC220V/60Hz/50W/0.3A
백열전구 대비밝기	80WX4
전격광속	5,000 lm(등기구의 밝기)
제품사이즈	500 X 500 X 80 mm
광원색	6,500 K(주광색)
광효율	100 lm/W

음성인식 LED 사각주방등 25W

정격	AC220V/60Hz/50W/0.2A
백열전구 대비밝기	60WX2
전격광속	1,800 lm(등기구의 밝기)
제품사이즈	640 X 160 X 75 mm
광원색	6,500 K(주광색)
광효율	75 lm/W

- ▶ 구성품목
- 방등(음성인식모듈, 50W 원형등, 설치사용설명서, 설치용부속자재)
 - 거실등(음성인식모듈, 50W 사각등, 설치사용설명서, 설치용부속자재)
 - 주방등(음성인식모듈, 25W 사각등, 설치사용설명서, 설치용부속자재)
 - 품질보증서

- ▶ 주요기능
- 음성인식으로 LED조명 ON/OFF
 - 기존 형광등을 대체하는 LED조명 제품

- ▶ 유통망(판매 가능 지역) • 전국

- ▶ 제조(수입) 구분 • 국내제작



🔧 사용방법

- ① 사용자 음성명령을(나래야 불켜, 나래야 불꺼) 인식하여 조명이 켜지고 꺼지는 작동을 합니다.

지체·뇌병변장애 | 환경 제어 장치

음성인식 스위치(3way)

☎ **제 품 명** 음성인식 스위치(3way)
 ☎ **코드번호** 3241303007100040
 ☎ **연 락 처** 031-666-8979

☎ **등 록 일** 2023년(상반기)
 ☎ **업 체 명** (주)보임
 ☎ **등록가격** 170,000원

제품사양

크기(mm)	120(H) × 70(L) × 45(D)
제품 중량	AC220V / 60Hz (정격부하 1구 : 30W-300W 정격부하 2구 : 30W-300W)
재질	ABS

- ▶ **구성품목** • 음성인식 스위치
- ▶ **주요기능**
 - 음성명령어 / 적외선리모컨 / 매뉴얼 스위치로 작동가능
 - 가정 내 조명교체 없이 1:1스위치 교체방식으로 전기 공사 불필요
 - 거동이 불편한 장애인 및 노인의 음성(말)으로 조명 ON/OFF
 - 앱설치 등 스마트폰 연동없이 편리한 사용방식 (통신이 불필요한 독립형 방식의 스위치)
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작



🔧 사용방법

- ① 스위치 교체 후, 음성("누구야 불켜, 불꺼"), 리모컨(IR 기능), 제품 스위치를 통해 조명을 켜고 끕니다.

SFB-02

☎ 제품명 SFB-02

☎ 코드번호 3181800010200020

☎ 연락처 051-727-3601


☎ 등록일 2021년(상반기)

☎ 업체명 삼인라이프롬

☎ 등록가격 35,000원

제품사양

크기(mm)	35 × 85 × 460
제품 중량	460g
재질	미송, PC/PBT

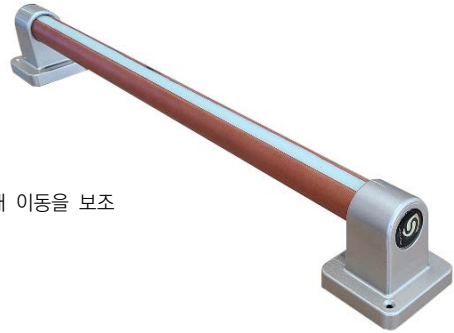

- > 구성품목 • 제품 본품, 나일론 앵커 4개
- > 주요기능 • 촉광 안료 적용으로 야간 시야 확보 용이, 벽에 설치하여 실내 이동을 보조
• 손잡이는 터치감을 생각하여 미송을 적용
- > 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- > 제조(수입) 구분 • 국내제작

⚙️ 사용방법

- ① 설치할 곳에 안전손잡이를 대고 브라켓의 구멍을 통해 벽에 표시를 합니다.(수평이 되도록 주의)
- ② 전동 해머드릴로 벽에 드릴링을 합니다.
- ③ 구멍에 나일론 앵커를 삽입합니다.
- ④ SUS스크류로 안전손잡이를 벽에 견고하게 고정하여 사용합니다.

SFB-03

☎ 제품명 SFB-03

☎ 코드번호 3181800010200030

☎ 연락처 051-727-3601


☎ 등록일 2021년(상반기)

☎ 업체명 삼인라이프롬

☎ 등록가격 38,800원

제품사양

크기(mm)	35 × 85 × 620
제품 중량	540g
재질	미송, PC/PBT

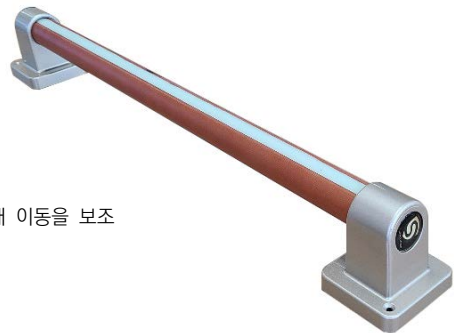

- > 구성품목 • 제품 본품, 나일론 앵커 4개
- > 주요기능 • 촉광 안료 적용으로 야간 시야 확보 용이, 벽에 설치하여 실내 이동을 보조
• 손잡이는 터치감을 생각하여 미송을 적용
- > 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- > 제조(수입) 구분 • 국내제작

⚙️ 사용방법

- ① 설치할 곳에 안전손잡이를 대고 브라켓의 구멍을 통해 벽에 표시를 합니다.(수평이 되도록 주의)
- ② 전동 해머드릴로 벽에 드릴링을 합니다.
- ③ 구멍에 나일론 앵커를 삽입합니다.
- ④ SUS스크류로 안전손잡이를 벽에 견고하게 고정하여 사용합니다.

지체·뇌병변장애 | 지지대 및 손잡이(안전손잡이)

SFB-04

☎ **제 품 명** SFB-04
 ☎ **코드번호** 3181800010200040
 ☎ **연 락 처** 051-727-3601

📅 **등 록 일** 2022년(하반기)
 🏢 **업 체 명** 삼인라이프콤
 💰 **등록가격** 45,600원

제품사양

크기(mm)	525 × 35(지름)
제품 중량	1.0 kg
재질	에쉬, 알루미늄



- ▶ **구성품목** • 안전손잡이, 나일론 앵커 / SUS 스크류
- ▶ **주요기능** • 거동이 불편한 노인, 장애인, 환자가 혼자 이동 시 도움을 주는 벽부착 안전손잡이로써 실내 구조와 사용자의 편의에 맞게 설치 가능
 • 설치 장소 : 욕실, 화장실, 현관 등, 원목 사용, 손잡이는 실리콘으로 제작, 촉광 실리콘으로 어두운 공간에서도 사용가능
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작

🔧 사용방법

- ① 표시하기 : 설치할 곳에 안전손잡이를 대고 브라켓의 구멍을 통해 벽에 표시해주세요.
- ② 드릴링하기 : 전동 해머드릴로 벽에 드릴링 합니다.
- ③ 나일론 앵커 삽입 : 구멍에 나일론 앵커를 삽입합니다.
- ④ 벽에 고정하기 : SUS스크류로 안전손잡이를 벽에 견고하게 고정시켜주세요.

지체·뇌병변장애 | 지지대 및 손잡이(안전손잡이)

SFB-05

☎ **제 품 명** SFB-05
 ☎ **코드번호** 3181800010200050
 ☎ **연 락 처** 051-727-3601

📅 **등 록 일** 2022년(하반기)
 🏢 **업 체 명** 삼인라이프콤
 💰 **등록가격** 48,500원

제품사양

크기(mm)	725 × 35(지름)
제품 중량	-
재질	에쉬, 알루미늄



- ▶ **구성품목** • 안전손잡이, 나일론 앵커 / SUS 스크류
- ▶ **주요기능** • 거동이 불편한 노인, 장애인, 환자가 혼자 이동 시 도움을 주는 벽부착 안전손잡이로써 실내 구조와 사용자의 편의에 맞게 설치 가능
 • 설치 장소 : 욕실, 화장실, 현관 등, 원목 사용, 손잡이는 실리콘으로 제작, 촉광 실리콘으로 어두운 공간에서도 사용가능
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작

🔧 사용방법

- ① 표시하기 : 설치할 곳에 안전손잡이를 대고 브라켓의 구멍을 통해 벽에 표시해주세요.
- ② 드릴링하기 : 전동 해머드릴로 벽에 드릴링 합니다.
- ③ 나일론 앵커 삽입 : 구멍에 나일론 앵커를 삽입합니다.
- ④ 벽에 고정하기 : SUS스크류로 안전손잡이를 벽에 견고하게 고정시켜주세요.

SFBW-01

☎ **제 품 명** SFBW-01
 ☎ **코드번호** 3181800010200060
 ☎ **연 락 처** 051-727-3601

☎ **등 록 일** 2022년(하반기)
 ☎ **업 체 명** 삼인라이프콤
 ☎ **등록가격** 54,000원

제품사양

크기(mm)	525 × 35(지름)
제품 중량	-
재질	에쉬, 알루미늄



- ▶ **구성품목** • 안전손잡이, 나일론 앵커 / SUS 스크류
- ▶ **주요기능** • 거동이 불편한 노인, 장애인, 환자가 혼자 이동 시 도움을 주는 벽부착 안전손잡이로써 실내 구조와 사용자의 편의에 맞게 설치 가능
 • 설치 장소 : 욕실, 화장실, 현관 등, 원목 사용, 손잡이는 실리콘으로 제작, 촉광 실리콘으로 어두운 공간에서도 사용가능
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작

⚙️ 사용방법

- ① 표시하기 : 설치할 곳에 안전손잡이를 대고 브라켓의 구멍을 통해 벽에 표시해주세요.
- ② 드릴링하기 : 전동 해머드릴로 벽에 드릴링 합니다.
- ③ 나일론 앵커 삽입 : 구멍에 나일론 앵커를 삽입합니다.
- ④ 벽에 고정하기 : SUS스크류로 안전손잡이를 벽에 견고하게 고정시켜주세요.

SFBW-02

☎ **제 품 명** SFBW-02
 ☎ **코드번호** 3181800010200070
 ☎ **연 락 처** 051-727-3601

☎ **등 록 일** 2022년(하반기)
 ☎ **업 체 명** 삼인라이프콤
 ☎ **등록가격** 58,600원

제품사양

크기(mm)	720 × 35(지름)
제품 중량	-
재질	에쉬, 알루미늄



- ▶ **구성품목** • 안전손잡이, 나일론 앵커 / SUS 스크류
- ▶ **주요기능** • 거동이 불편한 노인, 장애인, 환자가 혼자 이동 시 도움을 주는 벽부착 안전손잡이로써 실내 구조와 사용자의 편의에 맞게 설치 가능
 • 설치 장소 : 욕실, 화장실, 현관 등, 원목 사용, 손잡이는 실리콘으로 제작, 촉광 실리콘으로 어두운 공간에서도 사용가능
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작

⚙️ 사용방법

- ① 표시하기 : 설치할 곳에 안전손잡이를 대고 브라켓의 구멍을 통해 벽에 표시해주세요.
- ② 드릴링하기 : 전동 해머드릴로 벽에 드릴링 합니다.
- ③ 나일론 앵커 삽입 : 구멍에 나일론 앵커를 삽입합니다.
- ④ 벽에 고정하기 : SUS스크류로 안전손잡이를 벽에 견고하게 고정시켜주세요.

ASH-201

☎ **제 품 명** ASH-201
 ☎ **코드번호** 3181800010700010
 ☎ **연 락 처** 031-677-7522

📅 **등 록 일** 2022년(상반기)
 🏢 **업 체 명** (주)에이엠이
 💰 **등록가격** 219,000원



제품사양

크기(mm)	2,080(높이) × 600(천정 플레이트 폭) × 160(바닥 플레이트 폭)
제품 중량	6.2 kg
재질	알루미늄

※ 설치 가능 범위 : 2m10cm ~ 2m90cm

- ▶ **구성품목**
 - 본체
 - 천정 플레이트
 - 고정볼트, 육각렌치, 야광띠
 - 설명서
- ▶ **주요기능**
 - 실내에서 이동 및 활동을 보조하여 주거 공간에서 자립생활 가능
 - 손잡이에 미끄럼방지 커버가 있으며, 야광띠 적용으로 어두울 때도 식별이 용이
 - 거실, 방, 현관 등 천정과 바닥이 닿는 곳 어디든 설치 가능(별도의 타공 작업 없이 설치)
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작



🔧 사용방법

- ① 설치 전에 설명서를 참고하여 사용환경을 점검하고 적절한 설치위치를 설정하세요.
- ② 천정 플레이트를 파이프와 나사구멍에 맞춰 결합해주세요.
- ③ 고정볼트 2개를 나사구멍에 맞춰 넣어준 뒤 육각렌치로 고정해주세요.
- ④ 안전손잡이를 설치 할 곳에 수직으로 세운 뒤, 잠금레버의 고정볼트를 풀어 주세요.
- ⑤ 잠금레버를 올린 상태에서 상부파이프를 잡고 천정에 달게 올려 준 다음 잠금레버를 절반정도 내려서 반잠금 상태로 하여 상부파이프의 상하강을 정지해주세요.
- ⑥ 수평계를 이용하여 지면과의 직각상태를 확인한 다음 잠금레버를 내려서 손잡이를 설치하고 고정볼트를 조여 잠금상태를 확인해주세요.

부착식 안전손잡이

☎ **제 품 명** 부착식 안전손잡이
 ☎ **코드번호** 3181800005900010
 ☎ **연 락 처** 031-965-7989

☎ **등 록 일** 2023년(상반기)
 ☎ **업 체 명** 엔에스비에스
 ☎ **등록가격** 90,000원

제품사양

크기(mm)	440 × 35 × 75
무게	737 g
재질	알루미늄
버전	LED 자동센서 제품

- ▶ **구성품목**
- 안전손잡이
 - LED 회로부
 - 센서커버
 - SUS피스
 - 나일론앵커
 - 건전지
 - 브라켓 커버
 - 설명서
 - 설치도우미 세트



- ▶ **주요기능** • 센서부착형 손잡이(동작감지 LED, 건전지)

- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국

- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작

⚙️ 사용방법

- ① 일반적으로 실내에서는 손잡이를 쥐는 높이는 750mm, 현관 및 문옆은 1,200mm 정도에 제품을 고정 설치합니다.
- ② 설치 후 상시 LED 등을 점등하고 싶으면 스위치를 "ON"으로 센서를 활용하고 싶으면 "AUTO" 모드로, LED 등 사용을 원치 않으시면 "OFF"모드를 설정하여 사용하시면 됩니다.
- ③ 제품 사용 장소는 현관, 복도, 화장실, 기타 어두움으로 인하여 행동 제약이 있는 곳에 설치합니다.

지체·뇌병변장애 | 목욕용 미끄럼방지용품

SW-M260

☎ **제 품 명** SW-M260
 ☎ **코드번호** 3093306009500010
 ☎ **연 락 처** 031-323-1431

☎ **등 록 일** 2021년(상반기)
 ☎ **업 체 명** (주)세원케어
 ☎ **등록가격** 46,800원

제품사양

크기(mm)	2600 × 1000 × 14
무게	7.7kg
재질	PVC


- ▶ **구성품목** • 제품, 설명서, 포장박스
- ▶ **주요기능**
 - 압출 PVC튜브를 격자구조로 배치하여 미끄럼방지와 쿠션효과
 - PVC튜브를 격자구조로 배치하여 튜브사이로 물이 빠져 신발을 신지 않아도 발이 젖지 않음
 - 접착제 등을 사용하지 않고 튜브를 부착하여 안전하게 사용
 - 가위로 재단하여 욕실에 맞게 설치 가능

▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국

▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작

🔧 사용방법

- ① 제품에 포장된 사용설명서를 읽은 후 사용합니다.
- ② 욕실 및 화장실 등에 설치할 장소의 크기에 맞게 가위로 재단하여 사용합니다.
- ③ 검정색 튜브가 바닥면에 닿게 설치합니다.
- ④ 검정색 튜브의 방향이 배수구 방향을 향하게 합니다.(물이 원활하게 흐름)
- ⑤ 바닥면이 평평한 곳에서 사용합니다.
- ⑥ 매트 의 청소는 중성세제와 브러쉬(솔) 등을 이용하여 세척합니다.

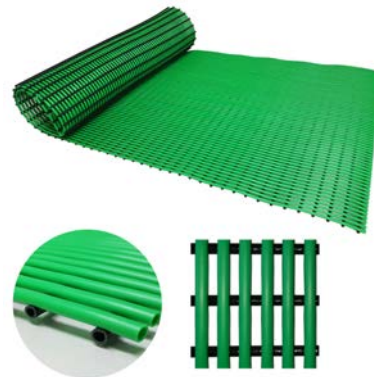

지체·뇌병변장애 | 목욕용 미끄럼방지용품

SW-M1

☎ **제 품 명** SW-M1
 ☎ **코드번호** 3093306009500020
 ☎ **연 락 처** 031-323-1431

☎ **등 록 일** 2021년(상반기)
 ☎ **업 체 명** (주)세원케어
 ☎ **등록가격** 25,600원

제품사양

크기(mm)	910 × 610 × 3
무게	2.4kg
재질	합성고무


- ▶ **구성품목** • 제품, 설명서, 포장비닐, 포장박스
- ▶ **주요기능**
 - 매트 의 마찰력을 높이기 위해 도트디자인 적용
 - 매트 의 9개의 홀은 제품 설치 시 공기와 물을 원활히 배출시켜 접착력을 높임
 - 깔기만 하면 되는 쉬운 설치

▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국

▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작

🔧 사용방법

- ① 제품에 포장된 사용설명서를 읽은 후 사용하십시오.
- ② 설치할 장소 바닥면의 이물질(물기, 먼지 등)을 제거하십시오.
- ③ 전체의 면을 바닥에 잘 밀착되었는지 확인하고 사용하십시오.
- ④ 오염물이 묻었을 경우 중성세제 등을 이용하여 세척하십시오.
- ⑤ 정기적으로 매트 밑면에 물때나 습기를 확인하고 중성세제와 브러쉬(솔) 등으로 오염물을 제거하신 후 사용하십시오.
- ⑥ 화기에 가까이 설치하지 마십시오.
- ⑦ 제품의 사용용도 이외의 다른 용도에 사용을 금합니다.

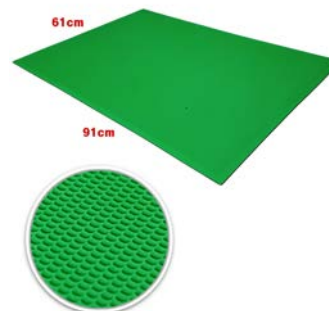

AFM-02

☎ 제품명 AFM-02

☎ 코드번호 3093306010200010

☎ 연락처 051-727-3601

📅 등록일 2021년(상반기)

🏢 업체명 삼인라이프롬

💰 등록가격 54,600원

제품사양

크기(mm)	910 × 610 × 4
무게	3kg
재질	실리콘

- ▶ 구성품목 • 제품 본품, 사용설명서
- ▶ 주요기능 • 실리콘 고무 재질로 변형에 대한 복원력이 우수
• 유해성분이 없는 실리콘 재질 적용 및 세균번식을 억제
• 뜨거운 물에도 변형이 발생하지 않음
• 흡수성이 없어 세정 및 건조가 용이
• 실리콘 고무의 높은 마찰계수로 미끄럼 방지 기능이 우수
• 사용 후에는 간단히 떼어낼 수 있어 욕조, 욕실 청소가 편리
• 촉광안료 적용에 따라 야간에 매트가 발광하여 야간 시야 확보에 유리
- ▶ 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- ▶ 제조(수입) 구분 • 국내제작

⚙️ 사용방법

- ① 미끄럼방지매트를 설치하고자 하는 바닥의 상태를 먼저 살피고, 오물 등을 제거합니다.
- ② 미끄럼방지매트를 설치하고자 하는 위치에 놓아둡니다.
- ③ 샤워, 목욕 등의 행동을 한 후에는 미끄럼방지매트의 표면을 물로 가볍게 씻어내도록 합니다.



AFM-03

☎ 제품명 AFM-03

☎ 코드번호 3093306010200020

☎ 연락처 051-727-3601

📅 등록일 2021년(상반기)

🏢 업체명 삼인라이프롬

💰 등록가격 33,200원

제품사양

크기(mm)	904 × 604 × 6
무게	2.7±0.3kg
재질	실리콘

- ▶ 구성품목 • 제품 본품, 사용설명서
- ▶ 주요기능 • 실리콘 고무 재질로 변형에 대한 복원력이 우수
• 유해성분이 없는 실리콘 재질 적용 및 세균번식을 억제
• 뜨거운 물에도 변형이 발생하지 않음
• 흡수성이 없어 세정 및 건조가 용이
• 실리콘 고무의 높은 마찰계수로 미끄럼 방지 기능이 우수
• 사용 후에는 간단히 떼어낼 수 있어 욕조, 욕실 청소가 편리
- ▶ 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- ▶ 제조(수입) 구분 • 국내제작

⚙️ 사용방법

- ① 미끄럼방지매트를 설치하고자 하는 바닥의 상태를 먼저 살피고, 오물 등을 제거합니다.
- ② 미끄럼방지매트를 설치하고자 하는 위치에 놓아둡니다.
- ③ 샤워, 목욕 등의 행동을 한 후에는 미끄럼방지매트의 표면을 물로 가볍게 씻어내도록 합니다.



지체·뇌병변 장애 | 목욕용 미끄럼방지용품

AFM-04

☎제 품 명 AFM-04

☎코드번호 3093306010200030

☎연 락 처 051-727-3601

📅등 록 일 2022년(하반기)

🏢업 체 명 삼인라이프콤

💰등록가격 52,900원

제품사양

크기(mm)	600 × 900 × 3
제품 중량	1.4 kg
재질	실리콘

- 구성품목 • 미끄럼방지매트, 설명서
- 주요기능 • 고탄성, 고밀도 실리콘으로 제작되어 미끄럼 및 낙상 방지
• 세면대 앞, 욕실 바닥, 주방, 현관 및 베란다 등에서 간편하게 사용
• 표면 접지와 미끄럼 방지에 특화된 디자인 패턴을 적용, 난연 재질 사용
- 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- 제조(수입) 구분 • 국내제작

🔧 사용방법

- ① 매트 사용 시 사용할 장소의 바닥면을 깨끗이 청소하고 물기와 이물질을 제거 한 후 사용하세요.
- ② 매트를 사용할 바닥면에 놓고 바닥에 들뜸이 없는지 확인 후 사용하세요.



지체·뇌병변 장애 | 목욕용 미끄럼방지용품

AFM-06

☎제 품 명 AFM-06

☎코드번호 3093306010200040

☎연 락 처 051-727-3601

📅등 록 일 2022년(하반기)

🏢업 체 명 삼인라이프콤

💰등록가격 34,000원

제품사양

크기(mm)	830 × 420 × 3
제품 중량	0.9 kg
재질	실리콘

- 구성품목 • 미끄럼방지매트, 설명서
- 주요기능 • 고탄성, 고밀도 실리콘으로 제작되어 미끄럼 및 낙상 방지
• 세면대 앞, 욕실 바닥, 주방, 현관 및 베란다 등에서 간편하게 사용
• 표면 접지와 미끄럼 방지에 특화된 디자인 패턴을 적용, 난연 재질 사용
- 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- 제조(수입) 구분 • 국내제작

🔧 사용방법

- ① 매트 사용 시 사용할 장소의 바닥면을 깨끗이 청소하고 물기와 이물질을 제거 한 후 사용하세요.
- ② 매트를 사용할 바닥면에 놓고 바닥에 들뜸이 없는지 확인 후 사용하세요.



AFM-07

☎ 제품명 AFM-07

☎ 코드번호 3093306010200050

☎ 연락처 051-727-3601

☎ 등록일 2022년(하반기)

☎ 업체명 삼인라이프콤

☎ 등록가격 28,800원

제품사양

크기(mm)	830 × 420 × 3
제품 중량	1.0 kg
재질	고무

- ▶ 구성품목
- 미끄럼방지매트
 - 설명서

- ▶ 주요기능
- 고탄성, 고밀도 실리콘으로 제작되어 미끄럼 및 낙상 방지
 - 세면대 앞, 욕실 바닥, 주방, 현관 및 베란다 등에서 간편하게 사용
 - 표면 접지와 미끄럼 방지에 특화된 디자인 패턴을 적용, 난연 재질 사용

- ▶ 유통망(판매 가능 지역) • 전국

- ▶ 제조(수입) 구분 • 국내제작



⚙️ 사용방법

- ① 매트 사용 시 사용할 장소의 바닥면을 깨끗이 청소하고 물기와 이물질을 제거 한 후 사용하세요.
- ② 매트를 사용할 바닥면에 놓고 바닥에 들뜸이 없는지 확인 후 사용하세요.

지체·뇌병변장애 | 목욕용 미끄럼방지용품

HM-401

☎제품명 HM-401

☎코드번호 3093306011100010

☎연락처 031-534-2298

📅등록일 2022년(하반기)

🏢업체명 (주)현대메딕스

💰등록가격 23,100원

제품사양

크기(mm)	700 × 500 × 3.2
제품 중량	1.2 kg
재질	축광 실리콘

- ▶ 구성품목 • 미끄럼방지매트, 설명서
- ▶ 주요기능 • 고령자 및 거동이 불편한 분들에게 미끄러짐이나 낙상사고를 예방 및 방지하기 위하여 거실이나 욕실에서 사용
 - 실리콘 재질로 되어 있어 유해물질이 발생하지 않고 바닥면과의 미끄럼 저항력이 강해 밀착성 우수
 - 일시적 야광기능이 있어 어두운 곳에서 유용
- ▶ 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- ▶ 제조(수입) 구분 • 국내제작

🔧 사용방법

- ① 매트 사용 시 사용할 장소의 바닥면을 깨끗이 청소하고 물기와 이물질을 제거 한 후 사용하세요.
- ② 매트를 사용할 바닥면에 놓고 바닥에 들뜸이 없는지 확인 후 사용하세요.



지체·뇌병변장애 | 목욕용 미끄럼방지용품

HM-403

☎제품명 HM-403

☎코드번호 3093306011100020

☎연락처 031-534-2298

📅등록일 2022년(하반기)

🏢업체명 (주)현대메딕스

💰등록가격 36,500원

제품사양

크기(mm)	905 × 640 × 3.2
제품 중량	2.1 kg
재질	축광 실리콘

- ▶ 구성품목 • 미끄럼방지매트, 설명서
- ▶ 주요기능 • 고령자 및 거동이 불편한 분들에게 미끄러짐이나 낙상사고를 예방 및 방지하기 위하여 거실이나 욕실에서 사용
 - 실리콘 재질로 되어 있어 유해물질이 발생하지 않고 바닥면과의 미끄럼 저항력이 강해 밀착성 우수
 - 일시적 야광기능이 있어 어두운 곳에서 유용
- ▶ 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- ▶ 제조(수입) 구분 • 국내제작

🔧 사용방법

- ① 매트 사용 시 사용할 장소의 바닥면을 깨끗이 청소하고 물기와 이물질을 제거 한 후 사용하세요.
- ② 매트를 사용할 바닥면에 놓고 바닥에 들뜸이 없는지 확인 후 사용하세요.



HM-411

◎제품명 HM-411

◎코드번호 3093306011100030

◎연락처 031-534-2298

◎등록일 2022년(하반기)

◎업체명 (주)현대메딕스

◎등록가격 26,000원

제품사양

크기(mm)	700 × 500 × 3.2
제품 중량	1.7 kg
재질	고무

- > 구성품목 • 미끄럼방지매트, 설명서
- > 주요기능 • 고령자 및 거동이 불편한 분들에게 미끄러짐이나 낙상사고를 예방 및 방지하기 위하여 거실이나 욕실에서 사용
 - 고무 재질 사용
- > 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- > 제조(수입) 구분 • 국내제작



⚙ 사용방법

- ① 매트 사용 시 사용할 장소의 바닥면을 깨끗이 청소하고 물기와 이물질을 제거 한 후 사용하세요.
- ② 매트를 사용할 바닥면에 놓고 바닥에 들뜸이 없는지 확인 후 사용하세요.

HM-412

◎제품명 HM-412

◎코드번호 3093306011100040

◎연락처 031-534-2298

◎등록일 2022년(하반기)

◎업체명 (주)현대메딕스

◎등록가격 23,000원

제품사양

크기(mm)	600 × 450 × 2.9
제품 중량	1.3 kg
재질	고무

- > 구성품목 • 미끄럼방지매트, 설명서
- > 주요기능 • 고령자 및 거동이 불편한 분들에게 미끄러짐이나 낙상사고를 예방 및 방지하기 위하여 거실이나 욕실에서 사용
 - 고무 재질 사용
- > 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- > 제조(수입) 구분 • 국내제작



⚙ 사용방법

- ① 매트 사용 시 사용할 장소의 바닥면을 깨끗이 청소하고 물기와 이물질을 제거 한 후 사용하세요.
- ② 매트를 사용할 바닥면에 놓고 바닥에 들뜸이 없는지 확인 후 사용하세요.

HM-413


☎ **제 품 명** HM-413
 ☎ **코드번호** 3093306011100050
 ☎ **연 락 처** 031-534-2298

☎ **등 록 일** 2022년(하반기)
 ☎ **업 체 명** (주)현대메딕스
 ☎ **등록가격** 32,000원

제품사양

크기(mm)	905 × 640 × 3.2
제품 중량	2.7 kg
재질	고무

- ▶ **구성품목**
 - 미끄럼방지매트
 - 설명서
- ▶ **주요기능**
 - 고령자 및 거동이 불편한 분들에게 미끄러짐이나 낙상사고를 예방 및 방지하기 위하여 거실이나 욕실에서 사용
 - 고무 재질 사용
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작

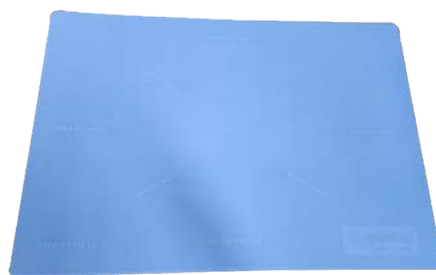

⚙ 사용방법

- ① 매트 사용 시 사용할 장소의 바닥면을 깨끗이 청소하고 물기와 이물질을 제거 한 후 사용하세요.
- ② 매트를 사용할 바닥면에 놓고 바닥에 들뜸이 없는지 확인 후 사용하세요.

ATS-101

☎ 제품명 ATS-101

☎ 코드번호 3123103010700010

☎ 연락처 031-677-7522

📅 등록일 2022년(상반기)

🏢 업체명 (주)에이엠이

💰 등록가격 105,000원

제품사양

크기(mm)	670(가로) × 1780(세로)
제품 중량	1.8 kg
재질	나일론(외피, 내피), 폴리에스테르(충전재, 수납가방)

- ▶ 구성품목
- 롤링시트(외피)
 - 매트(내피)
 - 충전재
 - 수납가방
 - 설명서

- ▶ 주요기능
- 보호자가 큰 힘을 들이지 않고 사용자를 수월하고 안전하게 이동
 - 정전기 방지 기능과 방수기능으로 세척이 쉽고 내구성이 좋음
 - 매트 안에 충전재가 내장되어 있어 단차가 있어도 쉽게 환자를 이송

- ▶ 유통망(판매 가능 지역) • 전국

- ▶ 제조(수입) 구분 • 국내제작



⚙️ 사용방법

- ① 이동하고자 하는 위치에 본 제품을 놓고 사용자의 양손을 배꼽 위에 포갠 다음, 보호자가 무릎을 세워 사용자의 어깨와 무릎을 감싸 안 듯이 안쪽으로 당겨 회전 시켜 주세요.
- ② 시트를 사용자의 등 밑으로 밀어 넣은 뒤 어깨와 다리를 잡고 평행하게 밀어주세요.
- ③ 시트가 회전하면서 적은 힘으로도 쉽게 이동이 가능합니다.

남성 비즈니스 캐주얼 룩 1

☎ **제 품 명** 남성 비즈니스 캐주얼 룩 1
 ☎ **코드번호** 3090300008400550
 ☎ **연 락 처** 070-7130-7660

☎ **등 록 일** 2021년(하반기)
 ☎ **업 체 명** 삼성물산 패션부문 하티스트
 ☎ **등록가격** 150,000원

제품사양

- 남성 네이비 FLEX 투버튼 재킷
 - 색상 : 네이비
 - 사이즈(단위 : mm)

구분	L	XL	XXL
가슴둘레	1120	1170	1220
밑단둘레	1140	1190	1240
소매길이	615	625	635
소매통너비	410	430	450
소맷부리너비	275	285	295
어깨너비	485	505	525
옷길이	680	690	700
허리둘레	1070	1120	1170
재질	겉감 : 면 50%, 폴리에스터 30%, 레이온 17%, 폴리우레탄 3% 안감 : 폴리에스터 100%		

- 남성 네이비 캐주얼 팬츠
 - 색상 : 네이비
 - 사이즈(단위 : mm)

구분	L	XL	XXL
밑단너비	360	372	384
앞 밑위길이	250	260	270
영덩이둘레	1040	1090	1140
옷길이(아웃심)	1050	1060	1070
옷길이(인심)	780	780	780
허리둘레	840	890	940
재질	폴리에스터 100%		

- ▶ **구성품목**
- 남성 네이비 FLEX 투버튼 재킷 1매
 - 남성 네이비 캐주얼 팬츠 1매
 - 품질보증서, 가격택, 폴리백
- ▶ **주요기능**
- 남성 네이비 FLEX 투버튼 재킷
 - 액션밴드 : 암홀 부분에 신축성 있는 원단 적용
 - FLEX BACK : 뒷 중심에 수직으로 스트레치 소재 MIX
 - 남성 네이비 캐주얼 팬츠
 - 밑위 길이 및 벨트고리 보강, 긴지퍼와 지퍼고리, 벨크로 여밈, 고리 스트링, 페이크 포켓
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작



사용방법

- ① 외출 시 기성복과 동일한 방법으로 착용합니다.

남성 비즈니스 캐주얼 룩 2

☎ **제 품 명** 남성 비즈니스 캐주얼 룩 2
 ☎ **코드번호** 3090300008400560
 ☎ **연 락 처** 070-7130-7660

☎ **등 록 일** 2021년(하반기)
 ☎ **업 체 명** 삼성물산 패션부문 하티스트
 ☎ **등록가격** 150,000원

제품사양

- 남성 그레이 폴 집업 변형 사파리 재킷
 - 색상 : 그레이
 - 사이즈(단위 : mm)

구분	L	XL	XXL
가슴둘레	1170	1220	1270
밑단둘레	1180	1230	1280
소매길이	620	630	640
소매통너비	425	445	465
소맷부리너비	270	280	290
어깨너비	495	515	535
옷길이	640	650	660
허리둘레	1140	1190	1240
재질	겉감 : 폴리에스테르 70%, 나일론 30% 안감1 : 폴리에스터 100% 안감2 : 폴리에스터 73%, 폴리우레탄 3%		

- 남성 네이비 베이직 팬츠
 - 색상 : 네이비
 - 사이즈(단위 : mm)

구분	L	XL	XXL
밑단너비	370	382	394
앞 밑위길이	250	260	270
영덩이둘레	1060	1110	1160
옷길이(아웃심)	1060	1070	1080
옷길이(안심)	790	790	790
허리둘레	850	900	950
재질	폴리에스터 100%		

- ▶ **구성품목**
- 남성 그레이 폴 집업 변형 사파리 재킷 1매
 - 남성 네이비 베이직 팬츠 1매
 - 품질보증서, 가격택, 폴리백

- ▶ **주요기능**
- 남성 그레이 폴 집업 변형 사파리 재킷
 - 터널형 액션밴드 : 등판 상부 전체에 신축성 있는 원단 적용
 - 상의 지퍼고리
 - 남성 네이비 베이직 팬츠
 - 밑위 길이 및 벨트고리 보강, 긴지퍼와 지퍼고리, 벨크로 여밈, 고리 스트링, 페이크 포켓

▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국

▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작



사용방법

- ① 외출 시 기성복과 동일한 방법으로 착용합니다.

남성 비즈니스 캐주얼 룩 6

☎ **제 품 명** 남성 비즈니스 캐주얼 룩 6
 ☎ **코드번호** 3090300008400600
 ☎ **연 락 처** 070-7130-7660

📅 **등 록 일** 2021년(하반기)
 🏢 **업 체 명** 삼성물산 패션부문 하티스트
 💰 **등록가격** 150,000원

제품사양

- 남성 네이비 남성 반팔 셔츠 셔츠
 - 색상 : 네이비
 - 사이즈(단위 : mm)

구분	L	XL	XXL
가슴둘레	1140	1190	1240
목둘레	450	465	480
밑단둘레	1140	1190	1240
소매길이	235	240	245
소매통너비	415	435	455
소맷부리너비	370	390	410
어깨너비	490	510	530
옷길이	695	705	715
허리둘레	1130	1180	123
재질	면 65%, 마 35%		

- 남성 카키 슬림핏 치노 팬츠
 - 색상 : 카키
 - 사이즈(단위 : mm)

구분	L	XL	XXL
밑단너비	350	362	374
앞 밑위길이	250	260	270
영덩이둘레	1020	1070	1120
옷길이(아우싱)	1060	1070	1080
옷길이(인싱)	790	790	790
허리둘레	840	890	940
재질	면 77%, 폴리에스터 19%, 폴리우레탄 4%		

- 남성 화이트 카라 변형 피케 티셔츠
 - 색상 : 화이트
 - 사이즈(단위 : mm)

구분	L	XL	XXL
가슴둘레	1090	1140	1190
밑단둘레	1090	1140	1190
소매길이	235	240	245
소매통너비	410	430	450
소맷부리너비	360	380	400
어깨너비	470	490	510
옷길이	710	720	730
허리둘레	1070	1120	1170
재질	면 62%, 폴리에스터 34%, 폴리우레탄 4%		

- **구성품목**
- 남성 네이비 남성 반팔 셔츠 셔츠 1매
 - 남성 화이트 카라 변형 피케 티셔츠 1매
 - 남성 카키 슬림핏 치노 팬츠 1매
 - 품질보증서, 가격택, 폴리백
- **주요기능**
- 남성 네이비 남성 반팔 셔츠 셔츠
 - 액션밴드 : 암홀 부분에 신축성 있는 원단 적용
 - 마그네틱 버튼 : 위 2개 버튼 마그네틱
 - 남성 화이트 카라 변형 피케 티셔츠
 - 마그네틱 버튼 : 위 2개 버튼 마그네틱
 - 남성 카키 슬림핏 치노 팬츠
 - 밑위 길이 및 벨트고리 보강, 긴지퍼와 지퍼고리, 벨크로 여밈, 고리스트링, 허리 E-BAND, 사이드 지퍼

➤ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국

➤ **제조(수입) 구분** • 국내제작

🔧 사용방법

- ① 외출 시 기성복과 동일한 방법으로 착용합니다.



여성 비즈니스 캐주얼 룩 1

☎ **제품명** 여성 비즈니스 캐주얼 룩 1
 ☎ **코드번호** 3090300008400620
 ☎ **연락처** 070-7130-7660

☎ **등록일** 2021년(하반기)
 ☎ **업체명** 삼성물산 패션부문 하티스트
 ☎ **등록가격** 150,000원

제품사양

- 여성 네이비 싱글 재킷
 - 색상 : 네이비
 - 사이즈(단위 : mm)

구분	S	M	L
가슴둘레	920	970	1020
밑단둘레	1010	1060	1110
소매길이	570	580	590
소매통너비	310	330	350
소맷부리너비	230	240	250
어깨너비	400	420	440
옷길이	590	600	610
허리둘레	890	940	990
재질	겉감 : 모 80%, 나일론 15%, 폴리우레탄 5% 안감1 : 폴리에스터 100% 안감2 : 폴리에스터 84%, 폴리우레탄 16%		

- 여성 블루 데님 팬츠
 - 색상 : 블루
 - 사이즈(단위 : mm)

구분	S	M	L
밑단너비	328	340	352
앞 밑위길이	200	210	220
엉덩이둘레	870	920	970
옷길이(아웃싱)	970	980	990
옷길이(인싱)	740	740	740
허리둘레	720	770	820
재질	면 90%, 폴리에스터 8%, 폴리우레탄 2%		

- > **구성품목**
 - 여성 네이비 싱글 재킷 1매
 - 여성 블루 데님 팬츠 1매
 - 품질보증서, 가격택, 폴리백
- > **주요기능**
 - 여성 네이비 싱글 재킷
 - 터널형 액션밴드 : 등판 상부 전체에 신축성 있는 원단 적용
 - 여성 블루 데님 팬츠
 - 밑위 길이 및 벨트고리 보강, 긴지퍼와 지퍼고리, 벨크로 여밈, 고리 스트링, 페이크 포켓
- > **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- > **제조(수입) 구분** • 국내제작



사용방법

- ① 외출 시 기성복과 동일한 방법으로 착용합니다.

여성 비즈니스 캐주얼 룩 2

☎ **제 품 명** 여성 비즈니스 캐주얼 룩 2
 ☎ **코드번호** 3090300008400630
 ☎ **연 락 처** 070-7130-7660

☎ **등 록 일** 2021년(하반기)
 ☎ **업 체 명** 삼성물산 패션부문 하티스트
 ☎ **등록가격** 150,000원

제품사양

- 여성 숏기장 트위드 재킷
 - 색상 : 블루
 - 사이즈(단위 : mm)

구분	S	M	L
가슴둘레	950	1000	1050
밑단둘레	950	1000	1050
소매길이	580	590	600
소매통너비	320	340	360
소맷부리너비	240	250	260
어깨너비	390	410	430
옷길이	540	550	560
허리둘레	930	980	1030
재질	겉감 : 면 55%, 아크릴 24%, 폴리에스터 13%, 레이온 8% 안감1 : 폴리에스터 100% 안감2 : 폴리에스터 84%, 폴리우레탄 16%		

- 여성 네이비 베이직 팬츠
 - 색상 : 네이비
 - 사이즈(단위 : mm)

구분	S	M	L
밑단너비	348	360	372
앞 밑위길이	190	200	210
엉덩이둘레	860	910	960
옷길이(아웃싱)	950	960	970
옷길이(인싱)	750	750	750
허리둘레	710	760	810
재질	폴리에스터 87%, 폴리우레탄 13%		

- > **구성품목**
 - 여성 숏기장 트위드 재킷 1매
 - 여성 네이비 베이직 팬츠 1매
 - 품질보증서, 가격택, 폴리백
- > **주요기능**
 - 여성 숏기장 트위드 재킷
 - 터널형 액션밴드 : 등판 상부 전체에 신축성 있는 원단 적용
 - 여성 네이비 베이직 팬츠
 - 밑위 길이 및 벨트고리 보강, 긴지퍼와 지퍼고리, 벨크로 여밈, 고리 스트링, 페이크 포켓
- > **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- > **제조(수입) 구분** • 국내제작



사용방법

- ① 외출 시 기성복과 동일한 방법으로 착용합니다.

여성 비즈니스 캐주얼 룩 4

☎ **제 품 명** 여성 비즈니스 캐주얼 룩 4
 ☎ **코드번호** 3090300008400650
 ☎ **연 락 처** 070-7130-7660

☎ **등 록 일** 2021년(하반기)
 ☎ **업 체 명** 삼성물산 패션부문 하티스트
 ☎ **등록가격** 150,000원

제품사양

- 여성 네이비 반팔 도트패턴 셔츠
 - 색상 : 네이비
 - 사이즈(단위 : mm)

구분	S	M	L
가슴둘레	1030	1080	1130
목둘레	415	430	445
밑단둘레	1040	1090	1140
소매길이	245	250	255
소매통너비	330	350	370
소맷부리너비	350	370	390
어깨너비	395	415	435
옷길이	640	650	660
허리둘레	1030	1080	1130
재질	면 100%		

- 여성 그레이 데님 팬츠
 - 색상 : 그레이
 - 사이즈(단위 : mm)

구분	S	M	L
밑단너비	328	340	352
앞 밑위길이	200	210	880
영덩이둘레	870	920	970
옷길이(아우싱)	970	980	990
옷길이(인싱)	740	740	740
허리둘레	720	770	820
재질	면 99%, 폴리우레탄 1%		

- 여성 반팔 피케 티셔츠
 - 색상 : 화이트, 핑크
 - 사이즈(단위 : mm)

구분	S	M	L
가슴둘레	930	980	1030
밑단둘레	970	1020	1070
소매길이	180	185	190
소매통너비	315	335	355
소맷부리너비	280	300	320
어깨너비	380	400	420
옷길이	620	630	640
허리둘레	950	100	1050
재질	면 95%, 폴리우레탄 5%		

- ▶ **구성품목**
- 여성 네이비 반팔 도트패턴 셔츠 1매
 - 여성 반팔 피케 티셔츠 1매
 - 여성 그레이 데님 팬츠 1매
 - 품질보증서, 가격택, 폴리백

- ▶ **주요기능**
- 여성 네이비 반팔 도트패턴 셔츠
 - 액션밴드 : 암홀 부분에 신축성 있는 원단 적용
 - 마그네틱 버튼 : 위 2개 버튼 마그네틱
 - 여성 반팔 피케 티셔츠
 - 마그네틱 버튼 : 위 2개 버튼 마그네틱
 - 여성 그레이 데님 팬츠
 - 밑위 길이 및 벨트고리 보강, 긴지퍼와 지퍼고리, 벨크로 여밈, 고리 스트링, 페이크 포켓

▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국

▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작



사용방법

- ① 외출 시 기성복과 동일한 방법으로 착용합니다.

지체·뇌병변·심장·호흡장애 | 의류 및 신발(장애인용의복)

남성 캐시미어 혼방 무스탕 숏 코트

☎제 품 명 남성 캐시미어 혼방 무스탕 숏 코트

☎코드번호 3090300008400660

☎연 락 처 070-7130-7660

📅등 록 일 2023년(상반기)

🏢업 체 명 삼성물산 패션부문 하티스트

💰등록가격 150,000원

제품사양

크기(mm)	〈100 사이즈 기준〉 가슴둘레 : 116cm 소매길이 : 61.5cm
재질	폴리에탈렌(58%), 모(20%), 캐시미어(16%) 등

- ▶ 구성품목 • 코트 1장
- ▶ 주요기능 • 보아 소재의 안감 배색이 돋보이는 무스탕 스타일 재킷
• 휠체어 사용자의 체형을 고려한 사이즈와 착탈 편의성, 액션밴드
- ▶ 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- ▶ 제조(수입) 구분 • 국내제작



지체·뇌병변·심장·호흡장애 | 의류 및 신발(장애인용의복)

남성 울 헤링본 집업 숏 코트

☎제 품 명 남성 울 헤링본 집업 숏 코트

☎코드번호 3090300008400670

☎연 락 처 070-7130-7660

📅등 록 일 2023년(상반기)

🏢업 체 명 삼성물산 패션부문 하티스트

💰등록가격 150,000원

제품사양

크기(mm)	〈100 사이즈 기준〉 가슴둘레 : 115cm 소매길이 : 62.5cm
재질	모(90%), 나일론(10%)

- ▶ 구성품목 • 코트 1장
- ▶ 주요기능 • 울 헤링본 집업 숏 코트
• 휠체어 사용자의 체형을 고려한 사이즈와 착탈 편의성
• 터널형 액션밴드, 상의 지퍼고리
- ▶ 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- ▶ 제조(수입) 구분 • 국내제작



지체·뇌병변·심장·호흡장애 | 의류 및 신발(장애인용의복)

남성 뉴 스탠다드 핏 셋업 재킷

☎제 품 명 남성 뉴 스탠다드 핏 셋업 재킷

☎코드번호 3090300008400680

☎연 락 처 070-7130-7660

📅등 록 일 2023년(상반기)

🏢업 체 명 삼성물산 패션부문 하티스트

💰등록가격 89,000원

제품사양

크기(mm)	〈100 사이즈 기준〉 가슴둘레 : 109cm 소매길이 : 62.5cm
재질	폴리에스터(67%), 레이온(29%), 폴리우레탄(4%)

- ▶ 구성품목 • 재킷 1장
- ▶ 주요기능 • 휠체어 사용자의 체형을 고려한 사이즈와 착탈 편의성
• 터널형 액션밴드
- ▶ 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- ▶ 제조(수입) 구분 • 국내제작



지체·뇌병변·심장·호흡장애 | 의류 및 신발(장애인용의복)

남성 코튼워싱 셔츠 재킷

☎ **제 품 명** 남성 코튼워싱 셔츠 재킷
 ☎ **코드번호** 3090300008400690
 ☎ **연 락 처** 070-7130-7660

☎ **등 록 일** 2023년(상반기)
 ☎ **업 체 명** 삼성물산 패션부문 하티스트
 ☎ **등록가격** 99,000원

제품사양

크기(mm)	〈100 사이즈 기준〉 가슴둘레 : 110cm 소매길이 : 61cm
재질	면(98%), 폴리에탄(2%)

- ☞ **구성품목** • 재킷 1장
- ☞ **주요기능** • 바이오 워싱처리한 셔츠형 재킷
• 휠체어 사용자의 체형을 고려한 사이즈와 착탈 편의성, 터널형 액션밴드
- ☞ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ☞ **제조(수입) 구분** • 국내제작



지체·뇌병변·심장·호흡장애 | 의류 및 신발(장애인용의복)

남성 스트라이프 에센셜 셔츠

☎ **제 품 명** 남성 스트라이프 에센셜 셔츠
 ☎ **코드번호** 3090300008400700
 ☎ **연 락 처** 070-7130-7660

☎ **등 록 일** 2023년(상반기)
 ☎ **업 체 명** 삼성물산 패션부문 하티스트
 ☎ **등록가격** 44,000원

제품사양

크기(mm)	〈100 사이즈 기준〉 가슴둘레 : 114cm 소매길이 : 62cm
재질	면(100%)

- ☞ **구성품목** • 셔츠 1장
- ☞ **주요기능** • 휠체어 사용자의 체형을 고려한 사이즈와 착탈 편의성
• 점액선밴드, 마그네틱 버튼
- ☞ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ☞ **제조(수입) 구분** • 국내제작



지체·뇌병변·심장·호흡장애 | 의류 및 신발(장애인용의복)

매쉬 이지핏 스웨트 셔츠

☎ **제 품 명** 매쉬 이지핏 스웨트 셔츠
 ☎ **코드번호** 3090300008400710
 ☎ **연 락 처** 070-7130-7660

☎ **등 록 일** 2023년(상반기)
 ☎ **업 체 명** 삼성물산 패션부문 하티스트
 ☎ **등록가격** 44,000원

제품사양

크기(mm)	〈95 사이즈 기준(남여공용)〉 가슴둘레 : 118cm 소매길이 : 61cm
재질	면(100%)

- ☞ **구성품목** • 셔츠 1장
- ☞ **주요기능** • 상체 발달 휠체어 사용자를 위해 목둘레, 가슴둘레, 소매둘레에 여유가 있고, 기성복에 비해 총기장을 짧게 제작
- ☞ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ☞ **제조(수입) 구분** • 국내제작



지체·뇌병변·심장·호흡장애 | 의류 및 신발(장애인용의복)

남성 뉴 스탠다드 핏 셋업 팬츠

☎ **제 품 명** 남성 뉴 스탠다드 핏 셋업 팬츠
 ☎ **코드번호** 3090300008400720
 ☎ **연 락 처** 070-7130-7660

📅 **등 록 일** 2023년(상반기)
 🏢 **업 체 명** 삼성물산 패션부문 하티스트
 💰 **등록가격** 49,000원

제품사양

크기(mm)	〈XL 사이즈 기준〉 허리둘레 : 92cm / 옷길 : 84.5(인) ~109(아웃)cm / 엉덩이둘레 : 115cm
재질	폴리에스터(67%), 레이온(29%), 폴리우레탄(4%)

- ▶ **구성품목** • 팬츠 1장
- ▶ **주요기능** • 휠체어 사용자의 체형을 고려한 사이즈와 착탈 편의성
• 편안한 밑위길이, 벨트고리 보강, 긴지퍼와 지퍼고리 적용, 페이크 포켓
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작



지체·뇌병변·심장·호흡장애 | 의류 및 신발(장애인용의복)

남성 레귤러 코튼 팬츠

☎ **제 품 명** 남성 레귤러 코튼 팬츠
 ☎ **코드번호** 3090300008400730
 ☎ **연 락 처** 070-7130-7660

📅 **등 록 일** 2023년(상반기)
 🏢 **업 체 명** 삼성물산 패션부문 하티스트
 💰 **등록가격** 49,000원

제품사양

크기(mm)	〈35 사이즈 기준〉 허리둘레 : 90cm / 옷길 : 80(인) ~107(아웃)cm / 엉덩이둘레 : 107cm
재질	면(97%), 폴리우레탄(3%)

- ▶ **구성품목** • 팬츠 1장
- ▶ **주요기능** • 휠체어 사용자의 체형을 고려한 사이즈와 착탈 편의성
• 편안한 밑위길이, 벨트고리 보강, 긴지퍼와 지퍼고리 적용, 페이크 포켓
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작



지체·뇌병변·심장·호흡장애 | 의류 및 신발(장애인용의복)

남성 슬림핏 카고 팬츠

☎ **제 품 명** 남성 슬림핏 카고 팬츠
 ☎ **코드번호** 3090300008400740
 ☎ **연 락 처** 070-7130-7660

📅 **등 록 일** 2023년(상반기)
 🏢 **업 체 명** 삼성물산 패션부문 하티스트
 💰 **등록가격** 49,000원

제품사양

크기(mm)	〈35 사이즈 기준〉 허리둘레 : 89cm / 옷길 : 79(인) ~107(아웃)cm / 엉덩이둘레 : 107cm
재질	면(77%), 폴리에스터(19%) 폴리우레탄(4%)

- ▶ **구성품목** • 팬츠 1장
- ▶ **주요기능** • 휠체어 사용자의 체형을 고려한 사이즈와 착탈 편의성
• 편안한 밑위길이, 벨트고리 보강, 긴지퍼와 지퍼고리 적용, 페이크 포켓
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작



장애인보조기기 교부사업

장애인보조기기 교부사업
42개 품목

장애인보조기기 상담
및 정보제공처

장애인보조기기 교부사업
참고서식

자주 묻는 질문 Q & A

지체·뇌병변·심장·호흡장애 | 의류 및 신발(장애인용의복)

여성 캐시미어 100% 숏 재킷

☎ **제품명** 여성 캐시미어 100% 숏 재킷
 ☎ **코드번호** 3090300008400750
 ☎ **연락처** 070-7130-7660

☎ **등록일** 2023년(상반기)
 ☎ **업체명** 삼성물산 패션부문 하티스트
 ☎ **등록가격** [129,000원](#)

제품사양

크기(mm)	〈95 사이즈 기준〉 가슴둘레 : 98cm 소매길이 : 57.5cm
재질	캐시미어(100%)

- ☞ **구성품목** • 재킷 1장
- ☞ **주요기능** • 휠체어 사용자의 체형을 고려한 사이즈와 착탈 편의성
• 터널형 액션밴드
- ☞ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ☞ **제조(수입) 구분** • 국내제작



지체·뇌병변·심장·호흡장애 | 의류 및 신발(장애인용의복)

여성 카멜 실크 레디베어 숏 코트

☎ **제품명** 여성 카멜 실크 레디베어 숏 코트
 ☎ **코드번호** 3090300008400760
 ☎ **연락처** 070-7130-7660

☎ **등록일** 2023년(상반기)
 ☎ **업체명** 삼성물산 패션부문 하티스트
 ☎ **등록가격** [150,000원](#)

제품사양

크기(mm)	〈95 사이즈 기준〉 가슴둘레 : 103cm 소매길이 : 57cm
재질	낙타(76%), 실크(24%)

- ☞ **구성품목** • 코트 1장
- ☞ **주요기능** • 휠체어 사용자의 체형을 고려한 사이즈와 착탈 편의성
• 터널형 액션밴드, 마그네틱 버튼
- ☞ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ☞ **제조(수입) 구분** • 국내제작



지체·뇌병변·심장·호흡장애 | 의류 및 신발(장애인용의복)

여성 모헤어 집업 숏 코트

☎ **제품명** 여성 모헤어 집업 숏 코트
 ☎ **코드번호** 3090300008400770
 ☎ **연락처** 070-7130-7660

☎ **등록일** 2023년(상반기)
 ☎ **업체명** 삼성물산 패션부문 하티스트
 ☎ **등록가격** [150,000원](#)

제품사양

크기(mm)	〈95 사이즈 기준〉 가슴둘레 : 104cm 소매길이 : 57cm
재질	모헤어(68%), 면(32%)

- ☞ **구성품목** • 코트 1장
- ☞ **주요기능** • 휠체어 사용자의 체형을 고려한 사이즈와 착탈 편의성
• 터널형 액션밴드, 상의 지퍼고리
- ☞ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ☞ **제조(수입) 구분** • 국내제작



지체·뇌병변·심장·호흡장애 | 의류 및 신발(장애인용의복)

여성 트위드 클래식 싱글 재킷

☎ **제 품 명** 여성 트위드 클래식 싱글 재킷
 ☎ **코드번호** 3090300008400780
 ☎ **연 락 처** 070-7130-7660

☎ **등 록 일** 2023년(상반기)
 ☎ **업 체 명** 삼성물산 패션부문 하티스트
 ☎ **등록가격** 89,000원

제품사양

크기(mm)	〈M 사이즈 기준〉 가슴둘레 : 97cm 소매길이 : 60cm
재질	면(92%), 나일론(7%), 폴리우레탄(1%)

- ▶ **구성품목** • 재킷 1장
- ▶ **주요기능** • 휠체어 사용자의 체형을 고려한 사이즈와 착탈 편의성
• 터널형 액션밴드
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작



지체·뇌병변·심장·호흡장애 | 의류 및 신발(장애인용의복)

여성 이지핏 롤업 브라우스

☎ **제 품 명** 여성 이지핏 롤업 브라우스
 ☎ **코드번호** 3090300008400790
 ☎ **연 락 처** 070-7130-7660

☎ **등 록 일** 2023년(상반기)
 ☎ **업 체 명** 삼성물산 패션부문 하티스트
 ☎ **등록가격** 44,000원

제품사양

크기(mm)	〈M 사이즈 기준〉 가슴둘레 : 109cm 소매길이 : 56cm
재질	면(66%), 폴리에스터(30%), 폴리우레탄(4%)

- ▶ **구성품목** • 코트 1장
- ▶ **주요기능** • 휠체어 사용자의 체형을 고려한 사이즈와 착탈 편의성
• 터널형 액션밴드, 상의 지퍼고리
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작



지체·뇌병변·심장·호흡장애 | 의류 및 신발(장애인용의복)

여성 콤포트 배색 레이어드 원피스

☎ **제 품 명** 여성 콤포트 배색 레이어드 원피스
 ☎ **코드번호** 3090300008400800
 ☎ **연 락 처** 070-7130-7660

☎ **등 록 일** 2023년(상반기)
 ☎ **업 체 명** 삼성물산 패션부문 하티스트
 ☎ **등록가격** 49,000원

제품사양

크기(mm)	〈95 사이즈 기준〉 가슴둘레 : 100cm 소매길이 : 56cm 옷길이 : 98cm
재질	면(95%), 폴리우레탄(5%)

- ▶ **구성품목** • 원피스 1장
- ▶ **주요기능** • 휠체어 사용자의 체형을 고려한 사이즈와 착탈 편의성
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작



지체·뇌병변·심장·호흡장애 | 의류 및 신발(장애인용의복)

여성 트위드 H라인 스커트

☎제 품 명 여성 트위드 H라인 스커트
 ☎코드번호 3090300008400810
 ☎연 락 처 070-7130-7660

☎등 록 일 2023년(상반기)
 ☎업 체 명 삼성물산 패션부문 하티스트
 ☎등록가격 39,000원

제품사양

크기(mm)	〈M 사이즈 기준〉 허리둘레 : 77cm 옷길이 : 57cm
재질	면(92%), 나일론(7%), 폴리우레탄(1%)

- ▶ 구성품목 • 스커트 1장
- ▶ 주요기능 • 휠체어 사용자의 체형을 고려한 사이즈와 착탈 편의성
• 긴 밑위길이, 벨트고리 보강, 긴지퍼와 지퍼고리 적용
- ▶ 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- ▶ 제조(수입) 구분 • 국내제작



지체·뇌병변·심장·호흡장애 | 의류 및 신발(장애인용의복)

여성 울 블랜드 레귤러핏 팬츠

☎제 품 명 여성 울 블랜드 레귤러핏 팬츠
 ☎코드번호 3090300008400820
 ☎연 락 처 070-7130-7660

☎등 록 일 2023년(상반기)
 ☎업 체 명 삼성물산 패션부문 하티스트
 ☎등록가격 55,000원

제품사양

크기(mm)	〈31 사이즈 기준〉 허리둘레 : 76cm / 옷길이 : 75(인) ~95(아웃)cm / 엉덩이둘레 : 93cm
재질	폴리에스터(53%), 모(46%), 폴리우레탄(1%)

- ▶ 구성품목 • 팬츠 1장
- ▶ 주요기능 • 휠체어 사용자의 체형을 고려한 사이즈와 착탈 편의성
• 밑위길이, 벨트고리 보강, 긴지퍼와 지퍼고리 적용
• 벨크로 여밈, 고리 스트링, 페이크 포켓
- ▶ 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- ▶ 제조(수입) 구분 • 국내제작



지체·뇌병변·심장·호흡장애 | 의류 및 신발(장애인용의복)

남성 비즈니스 캐주얼 정장셋업(2PC)

◎제품명 남성 비즈니스 캐주얼 정장셋업(2PC)
◎코드번호 3090300008400830
◎연락처 070-7130-7660

◎등록일 2023년(상반기)
◎업체명 삼성물산 패션부문 하티스트
◎등록가격 138,000원

제품사양

- 남성 뉴 스탠다드 핏 셋업 재킷 참고
- 남성 뉴 스탠다드 핏 셋업 팬츠 참고

▷구성품목 • 재킷 1장, 팬츠 1장

▷주요기능 • 휠체어 사용자의 체형을 고려한 사이즈와 착탈 편의성
• (재킷) 터널형 액션밴드
• (팬츠) 편안한 밑위길이, 벨트고리 보강, 긴지퍼와 지퍼고리 적용, 페이크 포켓

▷유통망(판매 가능 지역) • 전국

▷제조(수입) 구분 • 국내제작



지체·뇌병변·심장·호흡장애 | 의류 및 신발(장애인용의복)

남성 캐주얼 이너 2 & 팬츠세트(3PCS)

◎제품명 남성 캐주얼 이너 2 & 팬츠세트(3PCS)
◎코드번호 3090300008400840
◎연락처 070-7130-7660

◎등록일 2023년(상반기)
◎업체명 삼성물산 패션부문 하티스트
◎등록가격 137,000원

제품사양

- 남성 스트라이프 에센셜 셔츠 참고
- 매쉬 이지핏 스웨트 셔츠 참고
- 남성 슬림핏 카고 팬츠 참고

▷구성품목 • 셔츠 2장, 팬츠 1장

▷주요기능 • 휠체어 사용자의 체형을 고려한 사이즈와 착탈 편의성
• (셔츠) 액션밴드, 마그네틱 버튼
• (팬츠) 편안한 밑위길이, 벨트고리 보강, 긴지퍼와 지퍼고리 적용, 페이크 포켓

▷유통망(판매 가능 지역) • 전국

▷제조(수입) 구분 • 국내제작



지체·뇌병변·심장·호흡장애 | 의류 및 신발(장애인용의복)

여성 비즈니스 트위드 정장 셋업(2PC)

☉제 품 명 여성 비즈니스 트위드 정장 셋업(2PC)
 ☉코드번호 3090300008400850
 ☉연 락 처 070-7130-7660

☉등 록 일 2023년(상반기)
 ☉업 체 명 삼성물산 패션부문 하티스트
 ☉등록가격 128,000원

제품사양

- 여성 트위드 클래식 싱글 재킷 참고
- 여성 트위드 H라인 스커트 참고
- > 구성품목 • 재킷 1장, 스커트 1장
- > 주요기능 • 휠체어 사용자의 체형을 고려한 사이즈와 착탈 편의성
 • (재킷) 터널형 액션밴드
 • (스커트) 긴 밑위길이, 벨트고리 보강, 긴지퍼와 지퍼고리 적용
- > 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- > 제조(수입) 구분 • 국내제작



지체·뇌병변·심장·호흡장애 | 의류 및 신발(장애인용의복)

남성 캐주얼 코튼 점퍼&팬츠 세트(2PCS)

☉제 품 명 남성 캐주얼 코튼 점퍼&팬츠 세트(2PCS)
 ☉코드번호 3090300008400860
 ☉연 락 처 070-7130-7660

☉등 록 일 2023년(상반기)
 ☉업 체 명 삼성물산 패션부문 하티스트
 ☉등록가격 148,000원

제품사양

- 남성 코튼워싱 셔츠 재킷 참고
- 남성 레귤러 코튼 팬츠 참고
- > 구성품목 • 재킷 1장, 팬츠 1장
- > 주요기능 • 휠체어 사용자의 체형을 고려한 사이즈와 착탈 편의성
 • (재킷) 터널형 액션밴드, 상의 지퍼고리
 • (팬츠) 편안한 밑위길이, 벨트고리 보강, 긴지퍼와 지퍼고리 적용, 페이크 포켓
- > 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- > 제조(수입) 구분 • 국내제작



지체·뇌병변·심장·호흡장애 | 의류 및 신발(장애인용의복)

여성 캐주얼 이너&원피스&팬츠 세트(3PCS)

☉제 품 명 여성 캐주얼 이너&원피스&팬츠 세트(3PCS)
 ☉코드번호 3090300008400870
 ☉연 락 처 070-7130-7660

☉등 록 일 2023년(상반기)
 ☉업 체 명 삼성물산 패션부문 하티스트
 ☉등록가격 148,000원

제품사양

- 여성 이지핏 롱슬리브 블라우스 참고
- 여성 토퍼트 배색 레이어드 원피스 참고
- 여성 울 블렌드 레귤러핏 팬츠 참고
- > 구성품목 • 블라우스 1장, 원피스 1장, 팬츠 1장
- > 주요기능 • 휠체어 사용자의 체형을 고려한 사이즈와 착탈 편의성
 • (블라우스) 액션밴드, 마그네틱 버튼
 • (팬츠) 밑위길이, 벨트고리 보강, 긴지퍼와 지퍼고리 적용, 벨크로 여밈, 고리 스트링, 페이크 포켓
- > 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- > 제조(수입) 구분 • 국내제작



지체·뇌병변·심장·호흡장애 | 의류 및 신발(장애인용의복)

전동휠체어용 우비

◎제 품 명 전동휠체어용 우비
 ◎코드번호 3090300006900010
 ◎연 락 처 051-516-9823

◎등 록 일 2022년(상반기)
 ◎업 체 명 우비팩토리
 ◎등록가격 79,000원

제품사양

크기(mm)	120~140(가로)×720(세로)×900~1000(높이) 휴대 시 : 300×200×130
무게	550~580 ±20 g
재질	PU코팅 폴리에스터 또는 나일론 원단, PVC투명시트

- ▶ 구성품목
 - 우비
 - 휴대용 주머니
 - 사용설명서
 - 품질보증서
- ▶ 주요기능
 - 원단의 내수도는 800cmH2O 이상
 - 재봉선의 바늘구멍을 통해 빗물이 스며드는 것을 방지하기 위하여 방수 테이핑 처리
 - 흐리거나 야간에 사용 시 재귀반사소재를 적용하여 전후좌우 4방향에서 사용자 식별이 용이함.
 - 방풍기능으로 체온 보호
 - 휴대폰 사용 및 조이스틱 사용이 용이하도록 해당 부위에 투명시트 적용.
 - 사용자의 시야 확보를 위하여 모자 챙 부위에는 투명시트 적용
 - 양팔을 바깥으로 뻗 수 있도록 디자인
 - 다양한 형태의 전동휠체어에 사용가능 하도록 사이즈 조절 기능
 - 헤드레스트 탈부착 유무와 관계없이 사용 가능

▶ 유통망(판매 가능 지역) • 전국

▶ 제조(수입) 구분 • 국내제작



사용방법

- ① 제품을 휴대용주머니에서 꺼냅니다.
- ② 모자 부분부터 착용을 하고, 전동휠체어 앞 또는 뒤쪽 부분을 비에 젖지 않도록 완전히 씌워 줍니다.
- ③ 목 부분과 뒤통수의 벨크로를 사용자에게 맞게 조절을 하고, 의자 뒤쪽 사이즈 조절 밴드로 전동휠체어에 밀착되도록 조절합니다.
- ④ 탈착시에는 착용의 반대 순서로 합니다.
- ⑤ 사용 후 눈/비에 젖은 제품은 통풍이 되는 그늘에서 옷걸이 등을 이용하여 최대한 펴진 상태로 자연 건조합니다.
- ⑥ 오염된 부분은 해당 부분만 비누 또는 울샴푸를 이용하여 손으로 약하게 문질러 세척한 후 비틀어 물기를 제거하지 말고 그대로 통풍이 되는 그늘에서 자연 건조합니다.
- ⑦ 세탁기나 드라이클리닝의 방법으로 세탁해서는 절대로 안 됩니다.

여성 스트레치 밴딩바지

☎ **제 품 명** 여성 스트레치 밴딩바지
 ☎ **코드번호** 3090300011200010
 ☎ **연 락 처** 033-813-8040

☎ **등 록 일** 2023년(상반기)
 ☎ **업 체 명** ㈜엠엘피
 ☎ **등록가격** 70,000원

제품사양

크기(cm) 〈허리둘레 사이즈 28/29 기준〉	허리둘레 : 최소 63cm 바지길이 : 95cm 밑단둘레 : 42cm
무게	-
재질	면(97%), 폴리우레탄(3%)

- > **구성품목** • 바지 1벌
- > **주요기능**
 - 앉은 자세를 적용한 밑위 길이
 - 고탄력 넓은 허리밴딩 처리
 - 앞허리 교차형 밴딩 디자인
 - 앞벨트 고리 및 사방 신축성 면소재 사용
- > **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- > **제조(수입) 구분** • 국내제작



🔧 사용방법

- ① 휠체어 장애인의 신체장애 정도에 따라 침대에 누운 자세 또는 휠체어나 의자에 앉은 상태에서 다리를 바지에 끼우고 올려 착용합니다.

여성 데일리 셔츠

☎ **제 품 명** 여성 데일리 셔츠
 ☎ **코드번호** 3090300011200020
 ☎ **연 락 처** 033-813-8040

☎ **등 록 일** 2023년(상반기)
 ☎ **업 체 명** ㈜엠엘피
 ☎ **등록가격** 80,000원

제품사양

크기(cm) 〈상의 사이즈 90 기준〉	가슴둘레 : 107cm 어깨너비 : 39.5cm 소매길이 : 57cm 셔츠길이 : 56~60cm 소매단둘레 : 22cm
제품 중량	-
재질	면(76.4%), 나일론(19.9%) 폴리우레탄(3.7%)

- > **구성품목** • 셔츠 1벌
- > **주요기능**
 - 앉은 자세에 최적화된 핏
 - 셔츠 앞길이는 앉은자세에서 넓다리까지, 뒷길이는 엉덩이를 충분히 감싸도록 설계
 - 거드랑이 둘레에 충분한 여유량
 - 소매 커프스 엣지 밴딩 처리 및 신축성 면소재 사용
- > **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- > **제조(수입) 구분** • 국내제작



🔧 사용방법

- ① 휠체어 또는 의자에 착석한 상태에서 재킷의 단추를 열고 왼팔과 오른팔을 끼워 착용합니다.

여성 정장슈트

☎ **제 품 명** 여성 정장슈트
 ☎ **코드번호** 3090300011200030
 ☎ **연 락 처** 033-813-8040

📅 **등 록 일** 2023년(상반기)
 🏢 **업 체 명** (주)엠엘피
 💰 **등록가격** 220,000원

제품사양

크기(cm) 〈상의 사이즈 90, 허리둘레 사이즈 28/29 기준〉	〈재킷〉 가슴둘레 : 95cm 어깨너비 : 38cm 소매길이 : 58cm 재킷길이 : 52~56cm 소매단둘레 : 23cm
	〈바지〉 허리둘레 : 63cm(~75cm) 밑위길이 : 24(앞)~50(뒤)cm 바지길이 : 94cm 밑단둘레 : 53cm
제품 중량	-
재질	〈겉감〉 폴리에스테르(74.9%), 레이온(19.2%), 폴리우레탄(5.9%) 〈안감〉 폴리에스테르(100%)



- **구성품목** • 정장 재킷 + 정장 바지
- **주요기능**
 - 앉은 자세의 체형을 가장 잘 커버할 수 있는 최적의 패턴 설계
 - 기존 비장애인용 재킷보다 여유량을 주어 휠체어 추진 시 활동이 편리하며 입체적 소매패턴으로 팔의 활동범위와 착용감을 향상
 - 바지의 경우 착석시 뒤틀림을 줄이고 엉덩이를 충분히 커버할 수 있도록 패턴 설계
- **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- **제조(수입) 구분** • 국내제작

🔧 사용방법

- ① 정장 재킷은 휠체어에 착석한 상태에서 재킷의 단추를 열고 왼팔과 오른팔을 끼워 착용합니다.
- ② 정장 바지는 휠체어 장애인의 신체 장애 정도에 따라 침대에 누운 자세 또는 휠체어나 의자에 앉은 상태에서 다리를 바지에 끼우고 올려 착용합니다.

허기

☎ **제 품 명** 허기
 ☎ **코드번호** 3090300009700010
 ☎ **연 락 처** 070-4452-5300

☎ **등 록 일** 2021년(상반기)
 ☎ **업 체 명** 돌봄드림
 ☎ **등록가격** 253,000원

제품사양

크기(mm)	406 × 483(130호, 150호)
무게	350g
재질	TPU(공기압박튜브), 나일론(겉감), 면(안감), 폴리에스테르(엮구리), 실리콘(공기호스)

- ▶ **구성품목**
- 패키지 박스
 - 설명서
 - 손펌프
 - 조끼
 - 펠트 장난감
- ▶ **주요기능**
- 펌프로 조끼 내부의 에어튜브에 공기를 넣어 부풀어 올릴수 있음
 - 지퍼와 지퍼가리개 적용
 - 벨크로 부착이 가능한 겉감 소재 사용
 - 겉감 : 나일론 100%
 - 안감 : 면 34%, 폴리에스테르 66%
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작



⚙ 사용방법

- ① 제품의 지퍼를 해제하고 제품 후면에 있는 조임 벨크로를 모두 분리한 후 제품을 착용합니다.
- ② 편안한 착용감을 위해 얇은 티셔츠 위에 착용하는 것을 권장합니다.
- ③ 만약 사용자가 홀로 착용하기 힘든 상황일시, 주변의 보호자가 착용을 도와줄 수 있습니다
 * 주의사항: 제품 착용 시 제품 내 공기를 모두 제거하고 착용하세요.
- ④ 제품 착용 후 지퍼를 완전히 올리고 스냅 단추를 채운 후 제품 측면의 조임 벨크로를 채웁니다.
- ⑤ 이때 흉부에 압박감이 느껴지도록 상단 조임 벨크로를 비스듬히 아래로 최대한 당겨 채웁니다.
- ⑥ 그 후 하단 조임 벨크로를 채우는데, 복부의 심한 압박을 방지하기 위해 손가락 2~3개 정도의 여유를 가지고 채웁니다.
- ⑦ 제품이 신체에 완전히 밀착해 흔들리지 않도록 착용한 이후, 제품 측면 하단 수동 공기 펌프를 이용해 제품에 공기를 주입합니다.
- ⑧ 이때 공기 펌프 측면 밸브가 잠겨 있는지 확인합니다.
- ⑨ 사용자가 불편함을 느끼지 않으면서 흉부에 압박감이 느껴질 때까지 공기를 주입합니다.
- ⑩ 제품 착용 시 사용자가 불편함을 느낄 경우 퀵 커플링을 해제하여 공기 펌프를 분리할 수 있습니다.
- ⑪ 필요 시에는 다시 퀵 커플링을 장착하여 공기를 주입하거나 제거할 수 있습니다
 * 주의사항 : 공기 펌프를 제품과 분리하더라도 제품의 공기 조절 시 필요하므로 공기 펌프를 항상 휴대해주세요.
- ⑫ 제품 사용이 끝난 후에는 공기 방출 밸브를 반시계 방향으로 돌려 제품 내 공기를 모두 제거합니다.
- ⑬ 이후 조임 벨크로를 모두 해제한 후 스냅 단추와 지퍼를 분리해 제품을 완전히 착용 해제합니다.

휠체어용 담요 자루형

☎제 품 명 휠체어용 담요 자루형

☎코드번호 3090300006000020

☎연 락 처 070-8835-1779

☎등 록 일 2021년(하반기)

☎업 체 명 헤스테나

☎등록가격 150,000원

제품사양

사이즈	가로(mm)	세로(mm)	무게(g)	겉감, 속지, 안감
XS	700	800	490	폴리
S	900	900	630	폴리
M	900	950	690	폴리
L	1000	1,100	770	폴리

> 구성품목

- 담요
- 품질보증서
- 사용설명서
- 휴대용 가방

> 주요기능

- 방수, 방풍 기능
- 제품이 가벼움
- 휠체어 사용자가 편리하게 사용할 수 있는 디자인
- 바람으로부터 하체를 완전히 차단해 보온성이 높음

> 유통망(판매 가능 지역) • 전국

> 제조(수입) 구분 • 국내제작



🔧 사용방법

- ① 휠체어 의자 끝부분 적당한 지점에 담요 뒷면 상단에 있는 한 쪽 끈을 묶어줍니다.
- ② 반대편 끈도 동일한 방법으로 묶어 담요와 휠체어를 고정시킵니다.
- ③ 뒷면 상단에 위치한 지퍼를 내려 끝까지 열어줍니다.
- ④ 사용자가 휠체어에 앉습니다.
- ⑤ 하단의 지퍼를 끝까지 올려줍니다.
- ⑥ 몸에 맞게 담요를 잘 펼칩니다.
- ⑦ 벨트를 몸 또는 휠체어에 둘러 고정해 줍니다.
- ⑧ 한쪽의 담요를 허벅지 아래로 끼우며 담요 윗부분을 엉덩이 옆으로 끼웁니다.
- ⑨ 반대편도 담요를 허벅지 아래로 끼우며 담요 윗부분을 엉덩이 옆으로 끼웁니다.

휠체어용 담요 짧은 자루형

☎ **제 품 명** 휠체어용 담요 짧은 자루형
 ☎ **코드번호** 3090300006000070
 ☎ **연 락 처** 070-8835-1779

☎ **등 록 일** 2021년(하반기)
 ☎ **업 체 명** 헤스테나
 ☎ **등록가격** 130,000원

제품사양

사이즈	가로(mm)	세로(mm)	무게(g)	겉감, 속지, 안감
M	800	700	540	폴리
L	900	800	570	폴리

- > **구성품목**
 - 담요
 - 품질보증서
 - 사용설명서
 - 보관주머니
- > **주요기능**
 - 하지절단장애인이 또는 선천적으로 하체가 짧은 장애인이 편리하게 사용
 - 방풍, 방수 기능
 - 휠체어 사용자가 편리하게 사용
- > **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- > **제조(수입) 구분** • 국내제작



⚙ 사용방법

- ① 휠체어에 앉습니다.
- ② 담요를 펼쳐 다리를 덮어 무릎위에 올려놓습니다.
- ③ 본인 또는 보조인이 담요 윗부분의 벨트를 몸 또는 휠체어에 둘러 고정합니다.
- ④ 담요를 몸에 맞게 잘 펼친 후 양 쪽의 담요를 허벅지 아래로 끼워 바람이 통하지 않도록 정리해 줍니다.

지체·뇌병변·심장·호흡장애 | 의류 및 신발(장애인용의복)

휠체어용 발열담요 담요형

☎제 품 명 휠체어용 발열담요 담요형
 ☎코드번호 3090300006000080
 ☎연 락 처 070-8835-1779

☎등 록 일 2021년(하반기)
 ☎업 체 명 헤스테나
 ☎등록가격 240,000원

제품사양

사이즈	가로(mm)	세로(mm)	무게(g)	겉감, 속지, 안감
XS	650	750	320	폴리
S	800	900	420	폴리
M	800	1,000	470	폴리
L	900	1,100	570	폴리

- ▶ 구성품목
 - 담요
 - 발열체 세트
 - 품질보증서
 - 사용설명서
- ▶ 주요기능
 - 전동휠체어/스쿠터의 배터리를 이용해 발열패드에서 열을 냄
 - 따뜻한 발열로 휠체어 사용자의 부족한 체온을 보충
 - 하체가 모두 막혀 있어 보온성이 우수
 - 방풍, 방수 기능
 - 제품이 가벼움
 - 휠체어 사용자가 편리하게 사용

▶ 유통망(판매 가능 지역) • 전국

▶ 제조(수입) 구분 • 국내제작



⚙ 사용방법

- ① 담요 뒷면의 지퍼를 열어 줍니다.
- ② 발열패드를 원하는 위치에 부착시켜 줍니다.
- ③ 주머니 안쪽의 지퍼를 통해 조절기를 꺼내 줍니다.
- ④ 뒷면의 지퍼를 잠그고 앞쪽 주머니로 빠진 조절기에 캐논잭을 연결해 줍니다.
- ⑤ 휠체어에 앉습니다.
- ⑥ 담요를 펼쳐 다리를 덮어 무릎위에 올려놓습니다.
- ⑦ 본인 또는 보조인이 담요 뒷부분의 벨트를 몸 또는 휠체어에 돌려 고정합니다.
- ⑧ 담요를 몸에 맞게 잘 펼친 후 양 쪽의 담요를 허벅지 아래로 끼워 바람이 통하지 않도록 정리해 줍니다.
- ⑨ 캐논잭을 전동휠체어에 연결한 후 전원을 켜줍니다.

휠체어용 발열담요 자루형

☎ **제 품 명** 휠체어용 발열담요 자루형
 ☎ **코드번호** 3090300006000090
 ☎ **연 락 처** 070-8835-1779

☎ **등 록 일** 2021년(하반기)
 ☎ **업 체 명** 헤스테나
 ☎ **등록가격** 290,000원

제품사양

사이즈	가로(mm)	세로(mm)	무게(g)	겉감, 속지, 안감
S	900	900	840	폴리
M	900	950	880	폴리
L	1000	1,100	940	폴리

- > **구성품목**
 - 담요
 - 발열체 세트
 - 품질보증서
 - 사용설명서
- > **주요기능**
 - 전동휠체어/스쿠터의 배터리를 이용해 발열패드에서 열을 냄
 - 방풍, 방수 기능
 - 제품이 가벼움
 - 휠체어 사용자가 편리하게 사용
- > **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- > **제조(수입) 구분** • 국내제작



⚙ 사용방법

- ① 담요 뒷면의 지퍼를 열어 줍니다.
- ② 발열패드를 원하는 위치에 부착시켜 줍니다.
- ③ 주머니 안쪽의 지퍼를 통해 조절기를 꺼내 줍니다.
- ④ 뒷면의 지퍼를 잠그고 앞쪽 주머니로 빠진 조절기에 캐논잭을 연결해 줍니다.
- ⑤ 휠체어 의자 끝부분 적당한 지점에 담요 뒷면 상단에 있는 한 쪽 끈을 묶어 줍니다.
- ⑥ 반대편 끈도 동일한 방법으로 묶어 휠체어와 담요를 고정시킵니다.
- ⑦ 뒷면 상단에 위치한 지퍼를 내려 끝까지 열어 줍니다.
- ⑧ 사용자가 휠체어에 앉습니다.
- ⑨ 하단의 지퍼를 끝까지 올려 줍니다.
- ⑩ 몸에 맞게 담요를 잘 펼칩니다.
- ⑪ 벨트를 몸 또는 휠체어에 둘러 고정해 줍니다.
- ⑫ 담요 양쪽을 허벅지 아래로 끼우며 담요 윗부분을 엉덩이 옆으로 끼웁니다.
- ⑬ 캐논잭을 전동휠체어에 연결한 후 전원을 켜 줍니다.

발열풋워머

☎ **제 품 명** 발열풋워머
 ☎ **코드번호** 3090300006000100
 ☎ **연 락 처** 070-8835-1779

☎ **등 록 일** 2021년(하반기)
 ☎ **업 체 명** 헤스테나
 ☎ **등록가격** 150,000원

제품사양

사이즈	M	L
가로(mm)	330	36
세로(mm)	280	300
높이(mm)	260	260
무게(g)	390	460
겉감, 속지, 안감	폴리	폴리

- ▶ **구성품목**
 - 발열풋워머
 - 발열풋워머용 전용배터리(5V 10,000mA)
- ▶ **주요기능**
 - 방수 및 방풍
 - 발열 온도조절 및 보온성
 - 벨크로, 똑딱이단추
 - 전용배터리 사용
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작



⚙ 사용방법

- ① 배터리를 발열풋워머와 연결하고 배터리 주머니에 넣습니다.
- ② 발열풋워머에 두 발을 넣고 중앙벨크로를 체결합니다.
- ③ 전원스위치를 길게 눌러 전원을 키고 1단, 2단, 3단 원하는 온도에서 사용합니다.
- ④ 세탁은 세탁기를 사용하며 일반, 드럼세탁기 다 사용이 가능하며 건조기는 원단에 손상을 주어 권장하지 않습니다.
- ⑤ 세탁 후 완전히 건조시킨 후에 사용하시면 됩니다.
- ⑥ 꼭 양말 등을 착용하고 사용합니다.
- ⑦ 배터리의 전원이 꺼져있으면 전기가 공급되지 않습니다.
- ⑧ 전원이 켜지지 않으면 배터리의 전원을 키거나, 연결잭을 뺐다 다시 연결하시면 됩니다.

휠체어용담요셋트

☎ **제 품 명** 휠체어용담요셋트
 ☎ **코드번호** 3090300006000110
 ☎ **연 락 처** 070-8835-1779

☎ **등 록 일** 2021년(하반기)
 ☎ **업 체 명** 헤스테나
 ☎ **등록가격** 150,000원

제품사양

• 담요

사이즈	XS	S	M	L
가로(mm)	650	800	800	900
세로(mm)	750	900	1000	1100
무게(g)	320	420	520	570
겉감, 속지, 안감	폴리	폴리	폴리	폴리

• 풋워머

사이즈	M	L
가로(mm)	320	380
세로(mm)	280	320
높이(mm)	250	250
무게(g)	285	315
겉감, 속지, 안감	폴리	폴리

▶ **구성품목** • 담요
 • 풋워머
 • 품질보증서, 사용설명서, 휴대용 가방

▶ **주요기능** • 방풍, 상수 및 보온성
 • 담요 하단의 라운드
 • 담요 주머니
 • 담요 상단 중앙 홈
 • 담요상단 끝의 돌출부
 • 풋워머 중앙벨크로
 • 풋워머 눈슬립패드

▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국

▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작



🔧 사용방법

- ① 휠체어에 앉습니다.
- ② 풋워머를 휠체어 발판 위에 올려놓고 두 발을 넣습니다.
- ③ 풋워머 상단 중앙의 벨크로를 체결합니다.
- ④ 담요를 펼쳐 다리를 덮어 무릎위에 올려놓습니다.
- ⑤ 담요 윗부분의 벨트를 허리 또는 목에 걸쳐 고정합니다.
- ⑥ 담요 하단의 벨크로를 붙여줍니다.
- ⑦ 담요를 몸에 맞게 잘 펼친 후 양 쪽의 담요를 허벅지 아래로 끼워 바람이 통하지 않도록 정리해줍니다.

지체·뇌병변·심장·호흡장애 | 휠체어 액세서리(휠체어용 탑승자 고정장치 및 기타액세서리)

휠체어 팔고정 벨트

◎제 품 명 휠체어 팔고정 벨트
◎코드번호 3122400006700020
◎연 락 처 02-353-3973

◎등 록 일 2022년(상반기)
◎업 체 명 서북의료기상사
◎등록가격 19,000원

제품사양

크기(mm)	350(가로)×95(세로)
무게	85 g
재질	폴리에스테르, 메쉬천

- ▶ 구성품목 • 본체(팔고정벨트)
- ▶ 주요기능 • 팔고정 벨트는 휠체어용 고정장치로 뇌성마비 등 편마비 장애인들의 팔을 팔받이에 고정시켜 주어 팔받이와 몸 사이에 팔이 끼이는 현상을 막아주며 원형타입 벨크로로 사용자의 체형에 맞게 조절이 가능한 맞춤형 고정장치
• 메쉬천으로 통기성이 좋으며 위생적으로 사용 가능
- ▶ 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- ▶ 제조(수입) 구분 • 국내제작

🔧 사용방법

- ① 본체(팔받이)고정벨트를 휠체어의 팔받이에 고정시켜줍니다.
- ② 사용자가 휠체어에 착석한 후 팔고정벨트의 한쪽을 열어 팔을 고정시킵니다.



지체·뇌병변·심장·호흡장애 | 휠체어 액세서리(휠체어용 탑승자 고정장치 및 기타액세서리)

휠체어 다리고정 벨트

◎제 품 명 휠체어 다리고정 벨트
◎코드번호 3122400006700030
◎연 락 처 02-353-3973

◎등 록 일 2022년(상반기)
◎업 체 명 서북의료기상사
◎등록가격 59,000원

제품사양

크기(mm)	900(가로)×105(세로)
무게	180 g
재질	폴리에스테르, 메쉬천

- ▶ 구성품목 • 본체(다리고정벨트)
- ▶ 주요기능 • 발이 뒤로 떨어지는 것 뿐만 아니라 경직으로 인해 다리를 뻗는다는가 앞으로 떨어지는 현상을 방지하며 사용자가 손쉽게 다리를 고정 할 수 있도록 원형의 벨크로 타입으로 제작
• 메쉬천으로 통기성이 좋으며 위생적으로 사용 가능
• 벨크로 타입으로 휠체어와 장착이 용이
- ▶ 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- ▶ 제조(수입) 구분 • 국내제작

🔧 사용방법

- ① 본체(휠체어)고정벨트를 좌우에서 휠체어에 고정시켜줍니다.
- ② 풀림 방지를 위한 보조고정벨트를 상하에서 고정시켜줍니다.
- ③ 원형의 다리고정벨트를 사용자에게 맞게 적당히 고정시켜줍니다.



휠체어 안전벨트

☎ **제 품 명** 휠체어 안전벨트
 ☎ **코드번호** 3122400006700040
 ☎ **연 락 처** 02-353-3973

☎ **등 록 일** 2022년(상반기)
 ☎ **업 체 명** 서북의료기상사
 ☎ **등록가격** 45,000원

제품사양

크기(mm)	1250(가로)×1000(세로)
무게	250 g
재질	폴리에스테르, 메쉬천

- > **구성품목** • 안전벨트 + 고정클립 일체형
- > **주요기능**
 - 휠체어 안전벨트는 탑승자의 허벅지를 감싸는 형태
 - 메쉬원단을 사용하여 통풍성을 강조
 - 복부부분은 망사원단을 사용 통풍성을 더욱 강조
 - 허벅지를 감싸는 부분은 마찰 방지를 위해 두껍게 함으로써 자극을 극소화
- > **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- > **제조(수입) 구분** • 국내제작



⚙️ 사용방법

- ① 휠체어에 안전벨트를 내려놓고 사용자 체형에 맞춘 후 휠체어 등판 뒤쪽에서 크립으로 채웁니다.
- ② 사용자를 휠체어에 착석케 한 후 복부를 감싸 휠체어 등판 뒤쪽에서 크립으로 채웁니다.

바디서포트(중형)

☎ **제 품 명** 바디서포트(중형)
 ☎ **코드번호** 3122400006700010
 ☎ **연 락 처** 02-353-3973

☎ **등 록 일** 2021년(하반기)
 ☎ **업 체 명** 서북의료기상사
 ☎ **등록가격** 160,000원

제품사양

크기(mm)	295(가로)×295(세로)×140(높이)
무게	1200 g
재질	메쉬천

- ▶ **구성품목**
 - 고정판
 - 몸체 지지블럭
 - 가슴 지지블럭
- ▶ **주요기능**
 - 휠체어용 고정장치로 뇌성마비등 장애로 신체를 제대로 가눌 수 없는 장애인에게 L자모양의 몸체 지지블럭이 몸을 안정적으로 잡아주며 벨크로 타입으로 되어있어 사용자의 체형에 맞게 손쉽게 조절이 가능
 - 메쉬천 재질로 통기성이 좋으며, 분리하여 세탁이 가능하므로 위생적으로 사용 가능
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작



⚙ 사용방법

- ① 고정판에 사용자의 체형에 맞게 몸체 지지블럭을 붙여 줍니다.
- ② 고정판의 위쪽 좌우고리를 휠체어 손잡이에 걸어 바디서포트가 내려가지 않도록 고정시킵니다.
- ③ 고정판의 상하 고정벨트를 휠체어의 등판에 채워 바디서포트를 고정 합니다.
- ④ 사용자가 앉은 후 고정벨트 버클을 채우고 사용자에게 맞게 벨트 길이를 조절하여 사용 합니다.

바디서포트(대형)-1단

☎ **제 품 명** 바디서포트(대형)-1단
 ☎ **코드번호** 3122400006700050
 ☎ **연 락 처** 02-353-3973

☎ **등 록 일** 2022년(하반기)
 ☎ **업 체 명** 서북의료기상사
 ☎ **등록가격** 100,000원

제품사양

크기(mm)	370(가로)×175(세로)×180(높이)
무게	840 g
재질	메쉬천

- ▶ **구성품목** • 고정판, 몸체 지지블럭
- ▶ **주요기능**
 - L자모양의 몸체 지지블럭
 - 벨크로 타입으로 되어 있어 사용자의 체형에 맞게 조절 가능
 - 지지블럭은 메쉬천으로 통기성이 좋으며, 분리하여 세탁이 가능하므로 위생적으로 사용 가능
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작



🔧 사용방법

- ① 고정판에 사용자의 체형에 맞게 몸체 지지블럭을 붙여줍니다.
- ② 고정판의 위쪽 좌우고리를 휠체어 손잡이에 걸어 바디서포트가 내려가지 않도록 고정시켜 줍니다.
- ③ 고정판의 고정벨트를 휠체어의 등판에 채워 바디서포트를 고정합니다.
- ④ 사용자가 앉은 후 고정벨트 버클을 채우고 사용자에게 맞게 벨트 길이를 조절하여 사용합니다.

바디서포트(대형)-2단

☎ **제 품 명** 바디서포트(대형)-2단
 ☎ **코드번호** 3122400006700060
 ☎ **연 락 처** 02-353-3973

☎ **등 록 일** 2022년(하반기)
 ☎ **업 체 명** 서북의료기상사
 ☎ **등록가격** 160,000원

제품사양

크기(mm)	370(가로)×375(세로)×180(높이)
무게	1,470 g
재질	메쉬천

- ▶ **구성품목** • 고정판, 몸체 지지블럭
- ▶ **주요기능**
 - L자모양의 몸체 지지블럭
 - 벨크로 타입으로 되어 있어 사용자의 체형에 맞게 조절 가능
 - 지지블럭은 메쉬천으로 통기성이 좋으며, 분리하여 세탁이 가능하므로 위생적으로 사용 가능
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작



🔧 사용방법

- ① 고정판에 사용자의 체형에 맞게 몸체 지지블럭을 붙여줍니다.
- ② 고정판의 위쪽 좌우고리를 휠체어 손잡이에 걸어 바디서포트가 내려가지 않도록 고정시켜 줍니다.
- ③ 고정판의 고정벨트를 휠체어의 등판에 채워 바디서포트를 고정합니다.
- ④ 사용자가 앉은 후 고정벨트 버클을 채우고 사용자에게 맞게 벨트 길이를 조절하여 사용합니다.

WS7730

☎제 품 명 WS7730
 ☎코드번호 3181210007500010
 ☎연 락 처 031-864-0394

📅등 록 일 2021년(하반기)
 🏢업 체 명 (주)우성이엔지
 💰등록가격 1,200,000원

제품사양

크기(mm)	990(가로)×2,180(세로)×300~600(높이)
무게	98 kg
재질	- 스틸/분체도장 : 프레임, 판넬, 사이드 레일 - 압축스펀지/난연헤드 : 매트리스 - 사출 : 헤드, 풋보드

- ▶ 구성품목
 - 침대본체
 - 액세서리(헤드/풋보드, 식탁, 사이드레일, 바퀴)
 - 모터세트(리모컨포함)
 - 3단매트리스
 - 매뉴얼(제품보증서 포함)
- ▶ 주요기능
 - 무단계 리모컨으로 침대의 움직임이 환자에게 방해가 되지 않음
 - 침대 본체의 높낮이는 수직으로 상승 하강하여 공간 절약
 - 식탁을 내릴 때 브레이크 기능이 있어서 소음이 없으며 안전
- ▶ 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- ▶ 제조(수입) 구분 • 국내제작



🔧 사용방법

[사이드레일 조작]


- ① 사용 : 사이드 레일을 침대 프레임의 홈에 맞춰 고정시켜 사용합니다.
- ② 비사용 : 사이드 레일의 상측 부분을 잡고 들어올려 탈착시킵니다.

[식탁 사용법]

- ① 사용 : 식탁의 윗부분을 잡고 머리쪽으로 들어 올린 후 사용합니다.
- ② 비사용 : 식탁의 윗부분을 잡고 다리쪽으로 내려 고정시킵니다.

[바퀴의 고정/해제]

- ① 고정(잠금) : 바퀴를 수평상태로 유지하여 잠금레버를 내려 고정시킵니다.
- ② 해제 바퀴 잠금레버를 위로 올려 잠금 상태를 해제시킵니다.

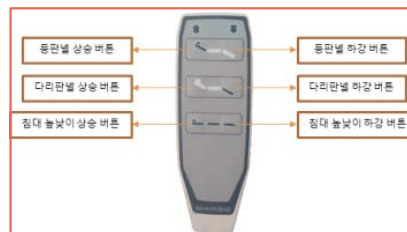

의료용 전동침대(WS 900)

☎ 제품명 의료용 전동침대(WS 900)

☎ 코드번호 3181210007500020

☎ 연락처 031-864-0394

☎ 등록일 2022년(하반기)

☎ 업체명 (주)우성이엔지

☎ 등록가격 1,400,000원

제품사양

크기(mm)	970(폭) × 2140(길이) × 300~600(높이/매트릭스제외)
제품 중량	90 kg
재질	프레임 - 스틸 / 매트릭스 - 스펀지, 우레탄 / 보드 - PP

- > 구성품목
 - 침대 본체
 - 액세서리(헤드/풋보드, 식탁, 사이드레일, 바퀴)
 - 모터세트(리모컨 포함)
 - 매트릭스
 - 매뉴얼
- > 주요기능
 - 광폭매트릭스 사용(폭 970mm, 매트릭스 900mm)
 - 특수 고강도 플라스틱 관절부싱 장착
 - 수직 상승, 하강 높이 조절 가능
 - 쇼트 분체 방식 도장처리, 침대 프레임 끼임방지
 - 양면 매트릭스 사용 가능
- > 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- > 제조(수입) 구분 • 국내제작



🔧 사용방법

- ① 리모컨을 이용해 등판넬 상하강, 침대 높낮이 상하강, 다리판넬 상하강을 조절하여 사용합니다.
- ② 사이드 레일 : 사이드 레일을 침대 프레임 홈에 맞춰 고정시킨 다음 상측 부분을 들어올려 사용합니다.
바퀴의 조작 : 잠금레버를 발로 밟아 수평상태로 유지하여 고정시키고, 레버를 다시 밀어 잠금상태를 해제합니다.
식탁의 조작 : 식탁의 윗부분을 잡고 끌어올려서 사용합니다.

지체·뇌병변·심장·호흡장애 | 침대 및 탈착식 침대 판/전동조절식 매트리스 지지단(전동침대)

의료용 전동침대(WS 901)

☎ 제품명 의료용 전동침대(WS 901)

☎ 코드번호 3181210007500030

☎ 연락처 031-864-0394

☎ 등록일 2022년(하반기)

☎ 업체명 (주)우성이엔지

☎ 등록가격 1,550,000원

제품사양

크기(mm)	970(폭) × 2130(길이) × 300~600(높이/매트 제외)
제품 중량	95 kg
재질	프레임 - 스틸 / 매트리스 - 스펀지,우레탄 / 보드 - 편백나무

- > 구성품목**
 - 침대 본체
 - 액세서리(헤드/풋보드, 식탁, 사이드레일, 바퀴)
 - 모터세트(리모컨 포함)
 - 매트리스
 - 매뉴얼
- > 주요기능**
 - 머리판, 다리판, 식판을 편백나무 소재 사용
 - 광폭매트리스 사용(폭 970mm, 매트리스 900mm)
 - 특수 고강도 플라스틱 관절부싱 장착
 - 수직 상승, 하강 높이 조절 가능
 - 쇼트 분체 방식 도장처리, 침대 프레임 끼임방지
 - 양면 매트리스 사용 가능
- > 유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- > 제조(수입) 구분** • 국내제작



🔧 사용방법

- ① 리모컨을 이용해 등판넬 상하강, 침대 높낮이 상하강, 다리판넬 상하강을 조절하여 사용합니다.
- ② 사이드 레일 : 사이드 레일을 침대 프레임 홈에 맞춰 고정시킨 다음 상측 부분을 들어올려 사용합니다.
바퀴의 조작 : 잠금레버를 발로 밟아 수평상태로 유지하여 고정시키고, 레버를 다시 밀어 잠금상태를 해제합니다.
식탁의 조작 : 식탁의 윗부분을 잡고 끌어올려서 사용합니다.

의료용 전동침대(WS 950)

☎ 제품명 의료용 전동침대(WS 950)

☎ 코드번호 3181210007500040

☎ 연락처 031-864-0394

☎ 등록일 2022년(하반기)

☎ 업체명 (주)우성이엔지

☎ 등록가격 1,500,000원

제품사양

크기(mm)	1020(폭) × 2200(길이) × 300~600(높이/매트릭스 제외)
제품 중량	95 kg
재질	프레임 - 스틸 / 매트릭스 - 스펀지, 우레탄 / 보드 - PP

- > 구성품목
 - 침대 본체
 - 액세서리(헤드/풋보드, 식탁, 사이드레일, 바퀴)
 - 모터세트(리모컨 포함)
 - 매트릭스
 - 매뉴얼
- > 주요기능
 - 광폭매트릭스 사용(폭 1020mm, 매트릭스 950mm)
 - 특수 고강도 플라스틱 관절부싱 장착
 - 수직 상승, 하강 높이 조절 가능
 - 쇼트 분체 방식 도장처리, 침대 프레임 끼임방지
 - 양면 매트릭스 사용 가능
- > 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- > 제조(수입) 구분 • 국내제작



⚙ 사용방법

- ① 리모컨을 이용해 등판넬 상하강, 침대 높낮이 상하강, 다리판넬 상하강을 조절하여 사용합니다.
- ② 사이드 레일 : 사이드 레일을 침대 프레임 홈에 맞춰 고정시킨 다음 상측 부분을 들어올려 사용합니다.
바퀴의 조작 : 잠금레버를 발로 밟아 수평상태로 유지하여 고정시키고, 레버를 다시 밀어 잠금상태를 해제합니다.
식탁의 조작 : 식탁의 윗부분을 잡고 끌어올려서 사용합니다.

의료용 전동침대(WS 951)

☎ **제 품 명** 의료용 전동침대(WS 951)

☎ **코드번호** 3181210007500050

☎ **연 락 처** 031-864-0394

☎ **등 록 일** 2022년(하반기)

☎ **업 체 명** (주)우성이엔지

☎ **등록가격** 1,650,000원

제품사양

크기(mm)	1020(폭) × 2165(길이) × 300~600(높이/매트제외)
제품 중량	95 kg
재질	프레임 - 스틸 / 매트리스 - 스펀지,우레탄 / 보드 - 편백나무

- > **구성품목**
 - 침대 본체
 - 액세서리(헤드/풋보드, 식탁, 사이드레일, 바퀴)
 - 모터세트(리모컨 포함)
 - 매트리스
 - 매뉴얼
- > **주요기능**
 - 머리판, 다리판, 식판을 편백나무 소재 사용
 - 광폭매트리스 사용(폭 1020mm, 매트리스 950mm)
 - 특수 고강도 플라스틱 관절부싱 장착
 - 수직 상승, 하강 높이 조절 가능
 - 쇼트 분체 방식 도장처리, 침대 프레임 끼임방지
 - 양면 매트리스 사용 가능
- > **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- > **제조(수입) 구분** • 국내제작



🔧 사용방법

- ① 리모컨을 이용해 등판넬 상하강, 침대 높낮이 상하강, 다리판넬 상하강을 조절하여 사용합니다.
- ② 사이드 레일 : 사이드 레일을 침대 프레임 홈에 맞춰 고정시킨 다음 상측 부분을 들어올려 사용합니다.
바퀴의 조작 : 잠금레버를 발로 밟아 수평상태로 유지하여 고정시키고, 레버를 다시 밀어 잠금상태를 해제합니다.
식탁의 조작 : 식탁의 윗부분을 잡고 끌어올려서 사용합니다.

에스브이

◎제품명 에스브이

◎코드번호 3181210011300015

◎연락처 1588-6367

◎등록일 2023년(상반기)

◎업체명 (주)케어빌리지

◎등록가격 2,770,000원

제품사양

크기(mm)	- 1027(폭) / 2110(침대 총길이) 285~625(상판 높이)
제품 중량	113 kg (매트리스 포함) (안전하중 : 170kg)
재질	프레임 - 강판, 알루미늄폴리에스테르수지 침상판 - 폴리프로필렌수지 매트리스 - 화이버, 우레탄

- ▶ 구성품목
- 수신기
 - 침대프레임, 캐스터, 머리 및 다리축 보드판 2개
 - 리모컨, 전원코드, 전원플러그, 고정 부품, 침상판
 - 매트리스, 사이드난간 2개, 식판
- ▶ 주요기능
- 리모컨 스위치로 등올림, 다리올림 각도 조절과 침상 전체 높이 조절 가능
 - 여유로운 침대사이즈, 저장형 설계
 - 오작동방지 리모컨, 독립형 쌍륜 캐스터, 항균 매트리스
- ▶ 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- ▶ 제조(수입) 구분 • 수입(일본)



⚙️ 사용방법

- ① 침대 프레임의 가정의 전원과 가까운 위치에 이동 및 고정합니다.
- ② 매트리스 스톱퍼를 사용하여 매트리스를 부착하고, 측면 난간 손잡이를 부착한 뒤 전원 코드를 연결합니다.
- ③ 리모컨 위치를 확인한 뒤 등올림 / 다리올림 / 침대 상하 승강 등 리모컨을 작동합니다.
- ④ 침대 하부 캐스터를 고정합니다.

전동침대

☎ **제 품 명** 전동침대

☎ **코드번호** 3181210007400050

☎ **연 락 처** 031-353-3877

☎ **등 록 일** 2023년(하반기)

☎ **업 체 명** 주식회사 에이원의료기산업

☎ **등록가격** 1,650,000원

제품사양

크기(mm)	- 930(폭) / 2180(침대 총길이) 290~610(바닥 높이)
재질	본체유닛-PP, 스틸 매트리스-친환경 매트폼

- > **구성품목**
 - 침대, 매트리스, 리모콘
 - 사이드레일, 식판, 이동바퀴
 - 취급설명서, 카달로그, 간편사용설명서
- > **주요기능**
 - 침대의 등판, 다리판, 높낮이 조절이 가능
 - PP 매트리스 지지판, 탈부착 가능한 헤드/풋보드
 - 꽃이식 사이드 또는 접이식사이드 레일 선택가능
- > **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- > **제조(수입) 구분** • 국내제작



🔧 사용방법

- ① 리모컨(등판, 다리판, 높낮이 조절 버튼)을 이용하여 부위별 각도 또는 높낮이를 조절합니다.
- ② 헤드보드, 풋보드의 경우 하늘색 버튼을 올려 탈착, 침대프레임에 연결하여 버튼을 내려 부착합니다.
- ③ 꽃이식 사이드 레일은 위로 들어 올려 제거, 사용 시에는 삽입하여 사용합니다.
- ④ 접이식 사이드 레일은 손잡이 부분을 눌러 내리고 다시 원상태로 올려 사용합니다.
- ⑤ 바퀴의 경우 아래로 내려 잠그고, 위로 올려 잠금해제 합니다.

라피오 라이트

☎ **제 품 명** 라피오 라이트
 ☎ **코드번호** 3181210010900015
 ☎ **연 락 처** 031-792-1092

☎ **등 록 일** 2022년(하반기)
 ☎ **업 체 명** (주)시니어가이던스
 ☎ **등록가격** 3,870,000원

제품사양

크기(mm)	1000(폭) × 2070(길이) × 230~650(높이)
제품 중량	100 kg
재질	프레임 - 스틸, ABS수지 / 매트리스 - 스펀지, 우레탄 / 보드 - PE수지

- > **구성품목** • 침대 본체, 매트리스, 사이드레일, 식판, 설명서
- > **주요기능**
 - 4모터 하이백서포트 기능으로 삼킴, 숨쉬기 편한 자세를 구현
 - 수직승강으로 좁은 공간에서도 사용 가능
 - 23cm부터 65cm까지 자유로운 높이 조절 가능
 - 풋리프트 기능, 원버튼 리클라이닝 기능
- > **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- > **제조(수입) 구분** • 수입(베트남)



🔧 사용방법

- ① 리모컨의 버튼을 용도에 맞게 눌러 연동(리클라이닝), 하이백(머리고개), 무릎의 각도 및 높낮이를 조절하여 사용합니다.
- ② 높낮이 하강버튼을 누르고 바닥높이 23cm에 가까워지면 경고음이 울립니다. 이때 간병인의 발 위치를 확인하도록 합니다.
- ③ 침대를 이동할 때는 이동바퀴의 잠금장치 4개를 모두 해제해야 하며, 사용하지 않을 때는 반드시 모두 잠궈주시기 바랍니다.

지체·뇌병변·심장·호흡장애 | 침대 및 탈착식 침대 판/전동조절식 매트리스 지지단(전동침대)

미오렛III 프라임

◎제 품 명 미오렛III 프라임
 ◎코드번호 3181210010900025
 ◎연 락 처 031-792-1092

◎등 록 일 2023년(하반기)
 ◎업 체 명 (주)시니어가디언스
 ◎등록가격 3,809,000원

제품사양

크기(mm)	- 1000(폭) / 2020(침대 총길이) 285~625(바닥 높이)
제품 중량	96 kg (매트리스 포함) (최대하중 : 138kg)
재질	본체유닛-스틸, ABS수지 매트리스-우레탄폼

- > 구성품목
 - 침대프레임, 매트리스
 - 사이드레일, 식판, 이동바퀴
 - 취급설명서, 카달로그, 간편사용설명서
- > 주요기능
 - 3모터 : 등, 다리, 높이 조절
 - 리클라이닝 : 리모컨 버튼 하나로 등, 엉덩이, 무릎이 연동하여 편안한 자세 실현
 - 침대 피팅기능 : 별도 부품없이 사용자의 키와 허벅지 길이에 맞춰 침대길이 조절
 - 10cm 이동바퀴 : 일반 가정용·병원용 침대보다 큰 바퀴를 적용하여 흔들림없이 조용하고 부드럽게 이동
 - 수직승강 : 스윙이 아니라 수직으로 움직여 승강시 어지러움 저감
- > 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- > 제조(수입) 구분 • 수입(베트남)



⚙ 사용방법

- ① 연동버튼(등올림, 등내림 리클라이닝), 등버튼, 다리버튼, 높이조절 버튼, 리모컨 잠금장치를 사용하여 간편하게 원하는 침대의 동작을 할 수 있습니다.
- ② 리모컨의 버튼을 누르는 동안 동작을 하고, 손을 떼면 동작을 멈춥니다.
- ③ 버튼사용 방법, 침대피팅, 보드 탈부착방법, 접이식 사이드레일 홀더 사용방법, 이동바퀴 사용방법, 침대높이 확인 방법 등을 숙지하고 사용하시기 바랍니다.

SE7010

◎제품명 SE7010

◎코드번호 3181210009200010

◎연락처 031-355-5297

◎등록일 2023년(하반기)

◎업체명 성심ENG

◎등록가격 1,420,000원

제품사양

크기(mm)	950 × 2,160 × 295~660
무게	90 kg
상체 각도 조절	0 ~ 70 ± 5°
하체 각도 조절	0 ~ 12 ± 3°
각도 조절 시간	20초
매트리스	난연 스프링 매트



- ▷ 구성품목
- 본체, 리모컨, 컨트롤박스, 모터, 매트리스, 식판, 보드, 캐스터, 사이드레일, 사이드레일 거치대
 - 각 부품에 따른 볼트류
 - 설명서

- ▷ 주요기능
- 상부와 하부 프레임은 핀으로 분리, 조립 가능
 - 사이드레일 장착(사이드레일 보관 거치대 설치)
 - 보드 4곳에 링걸 곳이 장착, 보드 롤러 범퍼 장착, 매트리스 밀림방지대 설치
 - 스플라인 기능이 장착된 모터 사용(자동 잠금, 안전회로 내장)
 - 자가 진단가능 컨트롤 박스
 - IPX 4단계 인증된 모터와 리모컨
 - 커버가 장착된 캐스터 사용
 - 하부프레임 교체만으로 4모터로 업그레이드 가능
 - 식탁 범퍼 장착(우측 뎀핑 쇼바 장착)

- ▷ 유통망(판매 가능 지역) • 전국

- ▷ 제조(수입) 구분 • 국내제작

사용방법

[설치 방법]

- ① 바닥이 수평을 이루는 곳에 설치합니다.
- ② 침대 상부와 하부를 잇는 곳에 4핀을 장착하여 고정합니다.
- ③ 식판과 헤드, 풋보드를 장착합니다.
- ④ 컨트롤 박스에 전원을 연결합니다.

[사용 방법]

- ① 리모컨 상단 버튼을 사용하여 상체 각도를 올리거나 내립니다.
- ② 리모컨 중단 버튼을 사용하여 침대 높낮이를 조절합니다.
- ③ 리모컨 하단 버튼을 사용하여 하체 각도를 올리거나 내립니다.
- ④ 사이드레일은 원하는 위치에 고정시켜 사용 할 수 있으며, 비사용 시 사이드레일 상측 부분을 잡고 들어올려 탈착 후 식판과 풋보드 사이 거치대를 보관합니다.
- ⑤ 식탁은 윗부분을 잡고 머리쪽으로 들어올린 후 사용합니다.
- ⑥ 비사용 시 식탁을 다리쪽으로 내려 고정시킵니다.
- ⑦ 리모컨 비사용 시 사이드레일에 걸어 보관합니다.
- ⑧ 바퀴를 수평상태로 유지하여 레버를 고정시켜 잠금상태를 유지합니다.
- ⑨ 바퀴 잠금 레버를 위로 올려 잠금 상태를 해제합니다.
- ⑩ 침대를 사용하지 않을 때에는 침대 상부와 하부를 수평으로 유지해주세요.

엑셀 NC-9000 낙상방지 SET

☎ **제 품 명** 엑셀 NC-9000 낙상방지 SET

☎ **코드번호** 3222718008300015

☎ **연 락 처** 032-563-1384

☎ **등 록 일** 2022년(상반기)

☎ **업 체 명** 란달유디케어스

☎ **등록가격** 935,000원

제품사양

	수신기	발신기	침대센서
L	60 × 91 × 20	50 × 85 × 18	390(가로) × 850(세로)
XL	68 g	56 g	500 g
XXL	ABS	ABS	PVC

> 구성품목

- 수신기
- 발신기
- 침대센서

> 주요기능

- 감압방식 침대센서를 통해 침대에서 일어나는 동작을 감지
- 수신기 한 대로 99개 까지 관리가 가능하며, 다양한 환경에 맞는 발신기 선택 가능
- 원거리 통신으로 신호 손실을 줄여 관리 범위가 넓으며, 소리와 진동 선택 가능, 센서 민감도 조절 가능
- 바닥이 아닌, 침대(센서를 다 편 상태) 또는 휠체어(반을 접은 상태) 에서 사용해야함

> 유통망(판매 가능 지역) • 전국

> 제조(수입) 구분 • 수입(대만)



🔧 사용방법

- ① 침대센서와 발신기를 연결해주세요.
- ② 수신기의 가운데 버튼을 누른 상태에서 전원을 켜주세요.
- ③ 수신기 화면에 'Regist 01'이라고 뜨면 침대센서를 누르고, 발신기에 불이 들어오는지 확인해주세요.
- ④ 수신기 가운데 버튼을 다시 누르면 'bed'라고 설정이 완료되고 침대센서를 침대에 깔 뒤 그 위에 이불을 덮어 사용하면 됩니다.

이지오토앵글 데스크(각도조절책상)

☎ **제 품 명** 이지오토앵글 데스크(각도조절책상)

☎ **코드번호** 3180306010500010

☎ **연 락 처** 02-701-1233

☎ **등 록 일** 2023년(상반기)

☎ **업 체 명** (주)해피로드

☎ **등록가격** 1,000,000원

제품사양

크기(mm)	118 × 780 × 20 (각도조절 상판사이즈 : 800 × 490 × 20 / 각도조절 범위 : 최대 45도, 13단계로 조절 가능)
제품 중량	(최대하중 : 80kg)
재질	자작나무합판

▶ **구성품목** • 책상, 전원케이블

▶ **주요기능** • 수동 및 전동휠체어 사용자들의 접근성 향상 및 작업 효율성 증대
 • 상판의 각도를 높혀 사용자의 피로도 감소 및 바른 자세 유지 가능
 • 메모리 기능(3가지 높이를 저장 및 설정 가능)
 • LCD창(책상의 높이가 LCD창에 표시)
 • 잠금장치 및 물리적 버튼을 통해 사고 방지
 • 내구성 및 내구성이 뛰어난 자작나무 합판 사용

▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국

▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작



⚙️ 사용방법

- ① + / - 버튼을 이용해 원하는 높이로 조절합니다.
- ② 원하는 높이에서 M(메모리) 버튼을 누르고 숫자 버튼을 누르면 해당 높이가 저장됩니다.
(3가지의 높이 저장이 가능하고, 필요에 따라 숫자만 누르면 저장된 높이로 셋팅이 됩니다.)
- ③ M 버튼을 5초 이상 길게 누르면 높이 잠금 및 잠금해제가 가능합니다.

브릭에어쿠션(NSBS-bim1416)

☉제 품 명	브릭에어쿠션(NSBS-bim1416)	☉등 록 일	2021년(하반기)
☉코드번호	1043303005900030	☉업 체 명	(주)엔에스비에스
☉연 락 처	031-965-7989	☉등록가격	270,000원

제품사양

크기(mm)	420(가로)×420(세로)×65(높이)
무게	1,660 ± 10 g
재질	TPU + 폴리우레탄 폼

- > 구성품목**
 - 욕창 예방 쿠션
 - 방석커버
 - 제품설명서
 - 수리용 패치
 - 소도습
 - 에코 백
 - 실리콘 호스 / 펌프
- > 주요기능**
 - 욕창을 예방하는 목적으로 하는 의료기기
 - 2등급 제품
 - 공기만 사용하는 기존제품의 대안으로 공기의 유출(찢어짐, 터짐 등)이 발생해도 욕창을 예방
 - 공기의 자동 충전식 방식으로 사용자의 편리성을 높임
 - 공기주입구의 위치 개선품으로 편리성을 높임
- > 유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- > 제조(수입) 구분** • 국내제작



🔧 사용방법

[사용 전 준비사항]

- ① 제품을 꺼내어 제품에 이상이 없는지 확인합니다.
- ② 제품(욕창예방쿠션), 커버를 확인합니다.
- ③ 제품설명서를 잘 읽고 사용법을 숙지한 후 사용합니다.

[사용방법 및 조작순서]

- ① 공기주입구를 왼쪽으로 돌려서 엽니다.
- ② 손펌프 입구에 실리콘호스를 끼웁니다.
- ③ 공기주입구에 실리콘호스가 끼워진 손펌프를 끼워서 공기를 주입한 후 공기주입구를 오른쪽으로 돌려서 닫습니다.
- ④ 사용자가 편안한 자세로 앉은 후 공기주입구를 열어 공기를 조절합니다.
- ⑤ 조절이 끝나면 공기 주입구를 닫고, 사용자는 편안한 자세를 유지합니다.

NSBS-sbim1416

☎ **제 품 명** NSBS-sbim1416
 ☎ **코드번호** 1043303005900070
 ☎ **연 락 처** 031-965-7989

☎ **등 록 일** 2022년(상반기)
 ☎ **업 체 명** (주)엔에스비에스
 ☎ **등록가격** 350,000원

제품사양

크기(mm)	400(가로)×360(세로)×65(높이)
무게	1,390±10 g
재질	TPU, PU, FOAM

- > **구성품목**
 - 욕창 예방 쿠션
 - 커버
 - 제품설명서
 - 수리용 패치/일회용 알콜 스왑
 - 예코백
- > **주요기능**
 - 공기만 사용하는 기존제품의 대안으로 공기의 유출(찢어짐, 터짐 등)이 발생해도 욕창을 예방하며 공기의 자동 충전식 방식
 - 공기주입구의 위치 개선품으로 편리성을 높임
- > **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- > **제조(수입) 구분** • 국내제작



🔧 사용방법

[사용 전 준비사항]

- ① 제품을 꺼내어 제품에 이상이 없는지 확인합니다.
- ② 제품(욕창예방쿠션), 커버를 확인합니다.
- ③ 제품설명서를 잘 읽고 사용법을 숙지한 후 사용합니다.

[사용방법]

- ① 공기주입구를 왼쪽으로 돌려서 엽니다.(공기 자동 충전)
- ② 공기주입구를 오른쪽으로 돌려서 닫고, 사용자는 편안한 자세로 앉습니다.
- ③ 공기주입구를 열어 공기를 천천히 뱉습니다.
- ④ 조절이 끝나면 공기 주입구를 닫고, 사용자는 편안한 자세를 유지합니다.

NSBS-4WAY88

☎ **제 품 명** NSBS-4WAY88
 ☎ **코드번호** 1043303005900090
 ☎ **연 락 처** 031-965-7989

📅 **등 록 일** 2022년(하반기)
 🏢 **업 체 명** (주)엔에스비에스
 💰 **등록가격** 350,000원



제품사양

크기(mm)	440 × 440 × 80
제품 중량	1.9 kg
재질	TPU, 우레탄 폼

- ▶ **구성품목**
 - 욕창예방방식, 커버
 - 설명서, 수리키트
- ▶ **주요기능**
 - 체중에 의한 공기격자 간 이동을 통해 균등한 압력 분포 제공
 - 자동 충전 방식으로 공기의 유출(뺏어짐, 터짐 등)이 발생해도 욕창예방이 가능
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작



🔧 사용방법

- ① 공기주입구를 왼쪽으로 돌려서 열어주세요.
- ② 공기주입구를 오른쪽으로 돌려서 닫고, 편안한 자세로 앉아주세요.
- ③ 공기주입구를 열어 공기를 천천히 빼면서 공기압을 조절하세요. (조절 이후 다시 공기 주입구를 닫아주세요. 밸브가 열린 상태로 사용해도 무관합니다.)

SJ-001

◎제품명 SJ-001

◎코드번호 1043303009900010

◎연락처 043-836-8593

◎등록일 2021년(상반기)

◎업체명 에스제이

◎등록가격 250,000원

제품사양

크기(mm)	370 × 415 × 80
무게	1,250g
재질	합성고무

▶ 구성품목 • 인박스, 수리키트, 펌프, 커버, 방식, 사용설명서

▶ 주요기능 • 방식의 방부와 하부에 셀이 형성되어 있으며,
돌출되어있는 셀이 신체부위에 가해지는 압력을
줄여 체압 분산
• 에어 셀의 높이가 높게 구성되어도 셀이 좌굴되지 않도록 상부와 하부 사이에 지지대 삽입

▶ 유통망(판매 가능 지역) • 전국

▶ 제조(수입) 구분 • 국내제작



⚙️ 사용방법

- ① 포장을 열어 내용물을 확인합니다.
- ② 방식, 커버, 펌프, 수리키트 등을 확인합니다.
- ③ 방식을 놓을 위치를 확인합니다.
- ④ 공기 주입구를 왼쪽으로 돌려서 열어줍니다.
- ⑤ 펌프로 공기 주입구에 고무호스를 연결 후 공기를 주입하여 줍니다.
- ⑥ 공기 주입구를 오른쪽으로 닫아줍니다.
- ⑦ 사용자는 방식에 편안한 자세로 앉습니다.
- ⑧ 한 손으로 사용자와 방식 사이 손을 넣어 위치 확인과 적정공기를 확인하여 줍니다.
- ⑨ 공기가 많은 경우 주입구를 열어 천천히 공기를 뱉니다.
- ⑩ 손가락과 바닥까지의 거리가 1~1.5cm 되도록 공기를 뱉니다.
- ⑪ 공기 주입구를 닫습니다.

심장장애 | 욕창예방 방식

ABM-101

☎ **제 품 명** ABM-101
 ☎ **코드번호** 1043303010700010
 ☎ **연 락 처** 031-677-7522

📅 **등 록 일** 2022년(상반기)
 🏢 **업 체 명** (주)에이엠이
 💰 **등록가격** 129,000원

제품사양

크기(mm)	454(폭) × 404(길이) × 45, 60, 70(높이)
제품 중량	1.45 kg
재질	천연고무, 클로로프렌, 고무



- ▶ **구성품목** • 방석, 커버, 공기주입기, 설명서, 수선키트
- ▶ **주요기능** • ABM-101은 공기주입구가 한 개(압력이 골고루 분산)
 • 난연커버 적용 욕창예방 방식, 천연고무 재질 사용
 • 커버 바닥면 미끄럼 방지 코팅 처리, 매쉬 재질로 통기성이 뛰어나
 • 고정 스트랩으로 방석의 이탈 예방
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작

🔧 사용방법

- ① 공기주입구의 밸브를 반시계방향으로 돌려 개방한 상태에서 제품의 주입구에 공기주입기(스포이드펌프)의 연결부를 끼워주세요.
- ② 공기주입기의 밸브를 시계방향으로 완전히 돌려주세요. 이 상태에서 펌프를 눌러주면 공기배출을 차단한 상태로 공기주입이 됩니다.
- ③ 손바닥으로 욕창예방 방식 윗면을 살짝 눌러보고 압력이 적당한지, 사용자 자신의 상황에 맞게 압력을 조절합니다.

심장장애 | 욕창예방 방식

ABM-103

☎ **제 품 명** ABM-103
 ☎ **코드번호** 1043303010700020
 ☎ **연 락 처** 031-677-7522

📅 **등 록 일** 2022년(상반기)
 🏢 **업 체 명** (주)에이엠이
 💰 **등록가격** 119,000원

제품사양

크기(mm)	454(폭) × 404(길이) × 45, 60, 70(높이)
제품 중량	1.45 kg
재질	천연고무, 클로로프렌, 고무



- ▶ **구성품목** • 방석, 커버, 공기주입기, 설명서, 수선키트
- ▶ **주요기능** • ABM-103은 공기주입구가 두 개(양쪽의 압력을 각각 조절 할 수 있음)
 • 난연커버 적용 욕창예방 방식
 • 천연고무 재질 사용
 • 커버 바닥면 미끄럼 방지 코팅 처리
 • 매쉬 재질로 통기성이 뛰어나
 • 고정 스트랩으로 방석의 이탈 예방
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작

🔧 사용방법

- ① 공기주입구의 밸브를 반시계방향으로 돌려 개방한 상태에서 제품의 주입구에 공기주입기(스포이드펌프)의 연결부를 끼워주세요.
- ② 공기주입기의 밸브를 시계방향으로 완전히 돌려주세요. 이 상태에서 펌프를 눌러주면 공기배출을 차단한 상태로 공기주입이 됩니다.
- ③ 손바닥으로 욕창예방 방식 윗면을 살짝 눌러보고 압력이 적당한지, 사용자 자신의 상황에 맞게 압력을 조절합니다.

HG-100 M1 TPU

☎ **제 품 명** HG-100 M1 TPU
 ☎ **코드번호** 1043306005100040
 ☎ **연 락 처** 031-499-3367

☎ **등 록 일** 2022년(상반기)
 ☎ **업 체 명** 포에버헬스케어
 ☎ **등록가격** 350,000원

제품사양

1. 에어펌프

크기(mm)	140(가로)×260(세로)×100(높이)
무게	1.3 kg
정격전압	220V, 60Hz
소비전력	10VA
공기순환주파	5분

2. 매트리스

크기(mm)	2000(가로)×860(세로)×70(높이)
무게	2.0 kg
적정하중	140 kg
재질	TPU
셀 타입	큰 공기 버블 타입

- ▶ **구성품목**
 - 매트리스
 - 에어펌프
 - 공기 주입 호스
 - 수리키트
- ▶ **주요기능**
 - TPU 재질은 PVC 재질보다 내구성이 우수
 - 5분마다 공기방이 순환되며, 환자의 몸에 가해지는 압력을 분산시켜 욕창을 예방
 - 기존 제품에 비해 더 큰 공기방을 채택
 - 기존 제품에 비해 소음이 적다.
 - 다이얼식 압력조절 기능으로 사용자의 편의에 맞게 조절하여 사용 가능
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작



⚙️ 사용방법

- ① 박스에서 구성품(교대부양매트리스, 에어펌프, 에어호스, 수리키트)을 꺼냅니다.
- ② 매트리스를 침대 위나 평평한 지역에 펼치십시오.
- ③ 에어펌프는 침대걸이에 걸거나 안전한 장소에 내려놓으세요.
- ④ 에어호스를 펌프 공기 배출구 양쪽에 연결하시고 전원 플러그를 콘센트에 꽂으십시오.
- ⑤ 매트리스 설치 시 호스가 접히거나 꺾인 곳은 없는지 확인하시기 바랍니다.
- ⑥ 전원스위치를 켜시고 에어펌프에서 공기가 배출되는지 확인하시기 바랍니다.
- ⑦ 공기량을 최대로 맞추고, 공기가 완전히 찰 때까지 채우십시오.(30분 정도 소요, 전원을 끄지 마십시오.)
- ⑧ 공기가 완전히 채워졌으면, 공기압량을 사용자의 편의에 맞게 조절하여 사용하십시오.

GR-1004H

☎ **제 품 명** GR-1004H
 ☎ **코드번호** 1043306011600010
 ☎ **연 락 처** 070-8808-5200

📅 **등 록 일** 2023년(하반기)
 🏢 **업 체 명** 그린계기(주)
 💰 **등록가격** 333,000원



제품사양

크기(mm)	1900 × 900 × 70
제품 중량	매트리스-1.8 kg 제어기-1.4 kg
재질	PVC

- **구성품목** • 매트리스, 제어기, 에어호스, 설명서
- **주요기능** • 매트리스에 유입되는 공기에 열 보온기능을 통해 겨울철에 환자의 체온유지에 도움
 • 저온화상 등으로부터 환자를 보호하기 위해 높은 온도가 발생되지 않도록 온도센서를 적용
- **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- **제조(수입) 구분** • 국내제작



🔧 사용방법

- ① 에어매트와 제어기박스를 연결호스로 연결하고 움직이지 않게 고정 후 전원코드를 연결합니다.
- ② 제어기 중앙에 위치한 전원버튼을 켜고 약 10~15분 경과 후 에어매트에 공기가 일정부분 차면 단계를 3단계로 조정합니다.

아이러뷰 13

☎ **제 품 명** 아이러뷰 13
 ☎ **코드번호** 3220318008600020
 ☎ **연 락 처** 070-7707-3947

☎ **등 록 일** 2021년(상반기)
 ☎ **업 체 명** 씨애플
 ☎ **등록가격** 3,380,000원

제품사양

크기 (mm)	320 × 373 × 420 접을시 : 320 × 373 × 61
화면	13.3인치 와이드 LCD (1920x1080p)
확대배율	최소 1.8x~최대 250x (기본배율 : 1.8x~30x)
무게	3.91kg
사용시간	최대 5시간

- ▶ **구성품목**
 - 독서확대기
 - 전원 어댑터
 - 제품용 파우치
 - 사용 설명서
 - 디스플레이 클리너
- ▶ **주요기능**
 - 최대 35가지 컬러 모드(사용자 맞춤형 색상 선택 및 편집 가능)
 - 영상 최적화 기능(화면 밝기 5단계)
 - 실시간 영상 캡처 및 라인&마스크 기능(특화된 영상 캡처 및 스크롤 기능으로 읽고자 하는 텍스트를 간편하게 확인 가능)
 - 외부 모니터(대형모니터) 연결을 통한 고해상도 영상 출력 기능
 - 자동 절전 및 자동 전원 오프 기능(사용자 시간 선택)
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작



⚙️ 사용방법

- ① 제품의 좌측면에 있는 전원 스위치를 눌러 전원을 켭니다.
- ② 제품의 확대판에 책, 신문 등 보고자 하는 대상을 놓거나(독서모드), 카메라를 회전하여 원거리의 대상을 봅니다.(멀리보기/셀프뷰)
- ③ 모니터 중간에 위치한 (+), (-) 줌 배율 회전식 키를 좌우로 이동시켜 원하는 배율 조절을 합니다.
- ④ 모니터 우측의 컬러모드 버튼을 이용해 원하는 컬러모드를 선택합니다.
- ⑤ 캡처버튼을 이용하여 정지된 화면을 부분 확대하여 원하는 부분을 이동하여 읽을 수 있습니다.

소리안탭

☎ **제 품 명** 소리안탭
 ☎ **코드번호** 3220318005200010
 ☎ **연 락 처** 032-875-2295

☎ **등 록 일** 2021년(하반기)
 ☎ **업 체 명** (주)어니스트비전
 ☎ **등록가격** 2,700,000원

제품사양

CPU	옥타코아, 2GHz
Display	10.5" (해상도 : 2,000 × 1,200)
메모리	62GB
네트워크	WiFi, LTE 지원
O/S	안드로이드
카메라	1,820만화소, zoom-광학 10배, 원거리/근거리 기능

- ▶ **구성품목**
 - 소리안탭 본체
 - 탭거치대(카메라일체형)
 - 충전기
 - 이어폰
 - 매뉴얼 각 1EA
- ▶ **주요기능**
 - 원거리(광학), 근거리 30배까지 확대 가능
 - 미디어플레이어(MP3, MP4 재생 등) 기능 사용 가능
 - 데이지, 텍스트플레이어 기능
 - 블루투스 지원되는 외부기기(체중계, 혈압계)와 연계 시 음성안내 기능 가능
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작



🔧 사용방법

- ① 제품의 좌측면에 있는 전원 스위치를 눌러 전원을 켭니다.
- ② 제품의 확대판에 책, 신문 등 보고자 하는 대상을 놓거나(독서모드), 카메라를 회전하여 원 거리에 있는 대상을 봅니다.(멀리보기/셀프뷰)
- ③ 모니터 중간에 위치한 (+), (-) 줌 배율 회전식 키를 좌우로 이동시켜 원하는 배율 조절을 합니다.
- ④ 모니터 우측의 컬러모드 버튼을 이용해 원하는 컬러모드를 선택합니다.
- ⑤ 캡처버튼을 이용하여 정지된 화면을 부분 확대하여 원하는 부분을 이동하여 읽을 수 있습니다.

페블 HD

☎ 제품명 페블 HD

☎ 코드번호 3220318007700015

☎ 연락처 02-463-4669

📅 등록일 2022년(하반기)

🏢 업체명 바투비전

💰 등록가격 850,000원

제품사양

크기(mm)	139(가로)×78(세로)×32(높이)
무게	320 g
확대배율	1.25 ~ 13.5배 손잡이 접었을 때(5단계) : 4.5, 5.5, 7.9, 9.5, 13.5배

- 구성품목
- 버킷(변기통) 및 커버
 - 설명서

- 주요기능
- HD 화질의 가볍고, 손잡이를 장착한 휴대용 확대기(손잡이를 부착하여 들고 보거나, 접었을 경우에는 스탠드로 사용할 수 있음)
 - HD 카메라를 장착한 4.3 인치 휴대용 확대기(와이드)
 - 5단계 화면 밝기 조절 가능(On/Off 가능)
 - 터치형 조절 스위치
 - 최대 3시간 연속사용이 가능한 리튬이온 배터리 장착
(자동 절전 모드 : 3분 이상 미 사용시 절전기능)
 - 0° ~ 210° 로 조절이 가능한 손잡이
 - 32색상 보기모드(컬러, 흑백, 고대비, 역상, 특수색상 28색상)
 - 화면 캡처 : 정지된 영상의 확대/축소 가능

- 유통망(판매 가능 지역) • 전국

- 제조(수입) 구분 • 수입(미국)



🔧 사용방법

- ① 페블 HD의 전원 스위치를 눌러 전원을 켭니다.
- ② 보고자 하는 문서, 책 또는 신문 등 위에 페블 HD를 올리거나 손잡이를 펴서 손에 잡습니다.
- ③ 시력에 적합한 배율을 배율조절 스위치를 눌러 선택하여 줍니다.
- ④ 보기에 편안한 색상모드를 보기모드 스위치를 눌러 선택하여 줍니다.
- ⑤ 페블 HD를 상하좌우로 움직여 문서, 책 또는 신문 등을 읽습니다.

캔디6

☎ **제품명** 캔디6
 ☎ **코드번호** 3220318011000025
 ☎ **연락처** 042-879-3056

☎ **등록일** 2023년(하반기)
 ☎ **업체명** (주)셀바스헬스케어
 ☎ **등록가격** 800,000원



제품사양

크기(mm)	160 × 80 × 110
제품 중량	210g
재질	-

- ▶ **구성품목** • 본체, 충전 어댑터, 휴대용 파우치, 사용설명서
- ▶ **주요기능**
 - 확대배율 : 2.5~19배
 - 화면밝기 : 5단계 조절
 - 색상변경 : 자연색 포함 12가지
 - 13MP 카메라 사용
 - HD급 고해상도 선명한 화질과 5.5인치 넓은 화면 제공
 - 인체공학적으로 설계된 회전식 손잡이
 - 간단하게 설정 가능한 옵션 UI 설계
 - Auto Focus기능 : 사물 거리에 관계없이 모든 사물에 자동초점
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 수입(중국)



🔧 사용방법

- ① 전원 켜기 : 제품 상단면 우측에 위치한 전원 버튼을 비프음이 나올때까지 3초간 누릅니다.
- ② 읽기 기능 : 인쇄물 위에 받침대를 펼친 기기를 올려놓고 확대/축소버튼, 컬러모드 등 본인시력에 맞게 조절하고 좌우상하로 이동하면서 읽습니다. (손잡이 사용 시에는 편한 각도로 맞추어 손잡이를 잡고 읽습니다.)

비소룩스디지털XL FHD

◎제품명 비소룩스디지털XL FHD

◎코드번호 3220318005600065

◎연락처 02-784-0118

◎등록일 2023년(하반기)

◎업체명 주식회사 아이루페

◎등록가격 1,900,000원

제품사양

크기(mm)	290 × 200 × 40
제품 중량	1,050 g

- > 구성품목
 - 본체, 충전기 및 케이블, 손잡이끈, 설명서
 - 아크릴 거치대, 하드폼 케이스
- > 주요기능
 - 11.6인치의 FULL HD 해상도 (배율 : 2~22배)
 - 흑/백 등 14가지 화면 모드
 - 다이내믹 라인 스크롤 기능으로 본체를 움직이지 않고 보이는 이미지를 이동 할 수 있음
 - PC나 다른 기기 모니터로 볼 수 있으며 터치스크린
- > 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- > 제조(수입) 구분 • 수입(독일)



⚙️ 사용방법

- ① 100% 충전을 완료하고 전원버튼을 1초 동안 눌러 전원을 켭니다.
- ② 줌인버튼과 줌아웃버튼을 눌러 2~22배까지 확대 배율을 조정합니다.
- ③ 터치스크린으로 화면 확대 및 축소를 손으로 조작이 가능합니다.
- ④ 조명버튼, 화면밝기, 컨트라스트버튼, 독서 가이드라인, 다이내믹 라인 스크롤, 캡처 기능을 사용해 보세요.

스마트룩스디지털

☎ **제 품 명** 스마트룩스디지털
 ☎ **코드번호** 3220318005600075
 ☎ **연 락 처** 02-784-0118

☎ **등 록 일** 2023년(하반기)
 ☎ **업 체 명** 주식회사 아이루페
 ☎ **등록가격** 800,000원



제품사양

크기(mm)	185 × 90 × 45
제품 중량	240 g

- > **구성품목**
 - 본체, 어댑터, 충전기, 손잡이끈, 설명서
 - 하드폼 케이스
- > **주요기능**
 - 5인치의 LCD 해상도 (배율 : 3~15배)
 - 흑/백 등 14가지 화면 모드
 - 화면 캡처, 저장, LCD 밝기 조정 가능
- > **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- > **제조(수입) 구분** • 수입(독일)



⚙ 사용방법

- ① 100% 충전을 완료하고 전원버튼을 1초 동안 눌러 전원을 켭니다.
- ② 손에 들고, 지면 거치, 쓰기 겸용 거치 중 모드를 정하여 사용 합니다.
- ③ 배율버튼, 밝기버튼, 컨트라스트버튼, 독서 가이드라인 기능을 사용해 보세요.

비소룩스디지털HD

☎ 제품명 비소룩스디지털HD
 ☎ 코드번호 3220318005600045
 ☎ 연락처 02-784-0118

📅 등록일 2023년(하반기)
 🏢 업체명 주식회사 아이루페
 💰 등록가격 1,140,000원

제품사양

크기(mm)	200 × 138 × 29
무게	460 g
배율	2 ~ 22x
화면	7인치(17.9cm) TFT LCD
펄스컬러	14 종류
USB	C 타입
SD카드	8 GB
배터리 사용시간	3.5시간
스탠드 타입	2종류



- 구성품목
 - 본체
 - 어댑터 및 케이블
 - 클리너천
 - 한글 사용설명서
 - 파우치
- 주요기능
 - 다이내믹 라인 스크롤 기능 탑재(본체를 움직이지 않고 보이는 이미지 이동 가능)
 - USB포트로 외부 모니터와 연결 사용 가능
 - 화면 모드는 흑/백 등 14가지 모드
 - 조명 조절 기능(명 밝기 조절 가능)
 - 화면 밝기 조절 기능
 - 스탠드를 이용하여 본체 아래에서의 쓰기 가능
- 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- 제조(수입) 구분 • 수입(독일)

⚙️ 사용방법

- ① 충전하기 : 처음 충전할 때는 100% 완전 충전 합니다.
- ② 전원켜기 : <전원버튼>을 1초 동안 누르면 켜지고, 다시 1초 누르면 꺼집니다.
- ③ 사용방법에 따라 (1)손에 들고, (2)지면 거치, (3)쓰기 겸용 거치 사용 모드를 조절합니다.
 - 지면 거치와 쓰기 겸용 거치 사용 시, 뒷면에 부착한 <스탠드>를 펴서 조절하여 사용합니다.
- ④ 사용 목적에 맞게 배율을 조정합니다.
 - <줌인버튼>을 누르면 22배까지 확대되고, <줌아웃>버튼 누르면 2배까지 조절 가능합니다.
- ⑤ 환경에 따라 조정합니다.
 - 주위 환경과 독서 대상에 따라 <조명버튼>과 화면밝기를 조정합니다.
- ⑥ 사용자의 눈 상태에 따라 <컨트라스트버튼>을 눌러 화면모드를 (1)칼라, (2)흑/백, (3)백/흑, (4)흑/노랑, (5)노랑/흑 식으로 화면 모드를 선택하여 사용합니다.
- ⑦ 독서 가이드 라인을 켜거나 꺼서 사용합니다.
- ⑧ 다이내믹 라인 스크롤 기능으로 편리하게 독서 가능합니다.
- ⑨ 화면 캡처가 필요하면 <사진버튼>을 눌러 화면을 캡처합니다.

쓰리스타

◎제 품 명 쓰리스타
◎코드번호 3223021005200010
◎연 락 처 032-875-2295

◎등 록 일 2021년(하반기)
◎업 체 명 (주)어니스트비전
◎등록가격 800,000원

제품사양

크기(mm)	122 × 60.2 × 16.1
무게	164 g
CPU	Qualcomm / WTR 1.4GHz Quad core
Display	3.8" 96.6mm WVGA TFT
카메라	전면 : 5MP F1.9 / 후면 : 8MP F2.2
메모리	2GB RAM / 32GB ROM
배터리	1,950mAh
O/S	Android
S/W	소리안(음성 및 광학문자판독 지원 S/W)

- ▶ 구성품목
- 본체
 - 매뉴얼
 - 배터리
 - 충전기
 - 이어폰 각 1EA

- ▶ 주요기능
- 촬영한 문자를 변환하여 음성으로 제공
 - 음성인식 및 단축키로 메뉴 선택
 - 버튼 원터치로 모드(일반모드/심플모드) 변경, 음성인식 실행
 - 화면 UI에서 각 메뉴 선택 시 해당 메뉴를 음성으로 제공 (한글자로 듣기도 가능)
 - 문자 메시지 도착 시 음성으로 메시지 내용(발신자, 내용) 전달
 - 데이지플레이어 기능 지원

- ▶ 유통망(판매 가능 지역) • 전국

- ▶ 제조(수입) 구분 • 국내제작



🔧 사용방법

- ① 핸드폰에서 메뉴 버튼을 한번 누르면 모드 변환(일반모드 → 심플모드)
- ② 심플모드에서 화면 UI의 메뉴를 스크롤하면 선택된 메뉴가 음성으로 출력
- ③ 원하는 메뉴 선택하여 누르면 해당 메뉴가 실행
- ④ 카메라 버튼을 한번 누르면 음성인식 실행
- ⑤ 음성인식이 실행되면 음성을 통하여 사용하고자 하는 기능의 메뉴를 선택(예 : 문서변환, 전화걸기, 문자메시지 보내기, 음악듣기, 상태정보 확인 등)
- ⑥ 선택 메뉴에서 음성으로 원하는 기능을 실행

소리안썬더

◎제품명 소리안썬더
 ◎코드번호 3223021005200020
 ◎연락처 032-875-2295

◎등록일 2021년(하반기)
 ◎업체명 ㈜어니스트비전
 ◎등록가격 3,780,000원

제품사양

크기(mm)	360 × 230 × 13
무게	1.05 kg
CPU	Intel Core i7(11세대)
Display	15.6" FHD AMOLED Display
메모리	2GB RAM / 32GB ROM
저장장치	256GB SSD
네트워크	Bluetooth / WiFi
포트	USB 포트(A type 1EA, C type 2EA) HDMI
O/S	Window 10
S/W	소리안(OCR S/W), 소리안리더(스크린리더 S/W)

- ▶ 구성품목
 - 소리안썬더 본체(배터리 내장)
 - 소리안카메라(OCR카메라)
 - 연결테이블, 전원아답터, 매뉴얼, 이동용 가방
- ▶ 주요기능
 - 배터리가 탑재된 광학문자판독기로 일반문자(각종 도서, 고지서, 우편물)를 음성으로 제공
 - 윈도우 O/S를 런처 방식으로 구성하여 시각장애인의 편리한 접근성 확보
 - 인터넷 검색 기능 및 스크린리더 기능 사용
 - 녹음 기능 및 모든 타입의 멀티미디어 파일 재생 가능
 - 한글, 영문, 한자(기본 4,888자) 인식
 - 캡처 후 빠른 시간(200자 원고지 기준 7초 이내)에 음성 변환 가능
 - 1300만 화소 카메라로 목자 및 외부파일 변환 가능



▶ 유통망(판매 가능 지역) • 전국

▶ 제조(수입) 구분 • 국내제작

🔧 사용방법

[소리안리더(스크린리더) 프로그램 사용]

- ① 소리안썬더 전원스위치를 누르면 구동되며 안내메시지 출력합니다.
- ② 소리안리더 프로그램이 자동 실행되며 스크린리더 기능 진행합니다.
- ③ 키패드를 이용해서 원하는 프로그램을 선택(파일 편집, 인터넷 URL 변경 등)하고 음성지원을 통해 필요한 작업을 진행합니다.

[소리안 프로그램(OCR S/W) 사용]

- ① 소리안썬더와 소리안카메라를 USB 케이블로 연결
- ② 소리안 프로그램 실행
- ③ 읽고자 하는 일반 목자 문서를 소리안카메라로 캡처
- ④ 캡처된 문서는 자동으로 TEXT 파일로 변환되고, 소리안리더 프로그램을 통해 음성으로 출력합니다.
(소리안 프로그램의 메뉴 사용 및 기능은 단축키로 쉽게 사용 가능)
- ⑤ 확대 기능 사용하면 소리안카메라를 활용하여 문서 또는 가까운 사물을 확대하여 볼 수 있음

책마루3

☎ **제 품 명** 책마루3
 ☎ **코드번호** 3223021011000010
 ☎ **연 락 처** 042-879-3056

☎ **등 록 일** 2022년(하반기)
 ☎ **업 체 명** (주)셀바스헬스케어
 ☎ **등록가격** 800,000원

제품사양

크기(mm)	64 × 130 × 14.5
제품 중량	150 g

- ▶ **구성품목**
 - 본체, 배터리
 - USB 케이블
 - 충전기, 이어폰
 - 매뉴얼
- ▶ **주요기능**
 - 저장공간 : 64GB / RAM : 4GB
 - Wifi : 2.4GHz, 5.0GHz 지원
 - 독서모드 : 내외장 디스크 공간에 있는 데이지, 텍스트, HWP 등 다양한 문서파일을 책마루 키패드로 조작하여 듣고 이동 가능
 - 파일관리 : 문서파일, 오디오파일, 동영상 등 다양한 파일을 복사, 잘라내기, 붙여넣기, 파일명 변경 등 편집 가능
 - 멀티미디어 : 음원재생, FM라디오, 웹라디오, 팟캐스트 등 다양한 멀티미디어 기능 탑재
 - OCR : 13MP 고화질 카메라를 통한 인쇄물 스캔 후 문자를 음성으로 읽어주는 기능 탑재
 - 그 외, 음성녹음, 메모장, 라디오, 알람, 계산기 등 다양한 부가기능
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작



🔧 사용방법

- ① 전원 버튼을 2초 이상 길게 눌러 전원을 켭니다.
- ② 위 또는 아래 방향키를 눌러 음악, 라디오, 북리더, 녹음, OCR 등 원하는 기능으로 이동하고, 방향키 가운데 선택 버튼을 눌러 실행합니다.

시각장애인용 공용리모콘

☎제 품 명 시각장애인용 공용리모콘
 ☎코드번호 3123909003800010
 ☎연 락 처 031-486-9015

☎등 록 일 2021년(하반기)
 ☎업 체 명 휴먼케어
 ☎등록가격 30,000원

제품사양

크기(mm)	620(가로)×400(세로)×136±1.5(높이)
재질	Poly Carbonate

- > 구성품목
 - 설명서
 - 배터리포함
- > 주요기능
 - 절전기능
 - 정 전압 안정회로 내장
 - 건전지 교체시기 알람 기능
 - 인체 공학적 외형디자인
- > 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- > 제조(수입) 구분 • 국내제작



⚙️ 사용방법

[시각장애인용 음향신호기, 리모컨 (경찰청규격, TTA시험기준)]

- ① 리모컨의 위치안내음향 버튼(작은 버튼)을 누르면 음악(G장조 미뉴엣)이 나옵니다.
- ② 교차로에 있는 음향신호기는 음악이 나온 후, 왼쪽 횡단보도는 남자 목소리로, 오른쪽 횡단보도는 여자 목소리로 안내합니다.
- ③ 안내에 따라 횡단보도 앞에 도착하여 신호안내음향 버튼(큰 버튼)을 누르면 보행신호등의 신호가 안내됩니다.
- ④ 신호등이 녹색으로 바뀔 때, 음향신호기의 안내에 따라 도로를 건너세요. 이때, 교차로의 왼쪽 횡단보도는 남자 목소리로, 오른쪽 횡단보도는 여자 목소리로 안내됩니다.

[교차로에서 횡단보도를 건널 때에는 왼쪽 횡단보도는 남자 목소리를, 오른쪽 횡단보도는 여자 목소리를 따라서 행동하면 안전하게 건널 수 있습니다.]

[시각장애인용 음성유도기, 리모컨 (KICS, TTA 시험기준)]


- ① 리모컨의 음성안내버튼(작은 원형 버튼)을 건물 또는 공공시설물에서 누르면 위치, 지명, 방향 등의 음성안내 방송이 나옵니다.

시각장애 | 녹음 및 재생장치(음성증폭기)

리보3S

☎ **제 품 명** 리보3S
☎ **코드번호** 3221803009400020
☎ **연 락 처** 070-4120-5402

☎ **등 록 일** 2023년(하반기)
☎ **업 체 명** 리보 주식회사
☎ **등록가격** 980,000원

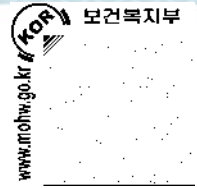

제품사양

크기(mm)	98 × 52 × 9.5
무게	52g

- ▶ **구성품목** • 본체, 충전 케이블, 스트랩, 이어폰, 케이스
- ▶ **주요기능** • 초소형 스마트 컨버전스 기기로 시각장애인의 효과적인 스마트폰 탐색/문자/전화 기능
• 음성 메모, 통화 녹음, MP3 음악/오디오북 재생
• 음성/진동시계, 계산기, 점자사전 등의 기능 제공
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작



⚙ 사용방법

- ① 블루투스 연결 후 홈버튼을 눌러 홈 메뉴에 접근합니다.
- ② L4버튼을 길게 눌러 음성녹음, 통화 중 녹음을 할 수 있습니다.

장애인보조기기 교부사업

장애인보조기기 교부사업
42개 품목

장애인보조기기 상담
및 정보제공처

장애인보조기기 교부사업
참고서식

자주 묻는 질문
Q & A

소리신호기

☎제품명 소리신호기

☎코드번호 3222704003100020

☎연락처 031-745-0025

☎등록일 2021년(하반기)

☎업체명 함께하는사람들

☎등록가격 190,000원

제품사양

1. TP-SH300 - LED 매직 무드등(소리신호기)

크기(mm)	90(상부)×172(하부)×130(높이)
무게(g)	180
재질	플라스틱
사용전원	DC5V 1A

2. TP-SR3000 - 무선 리모콘

크기(mm)	30(가로)×53(세로)×11(높이)
무게(g)	11
재질	플라스틱
사용전원	코인 배터리 DC3V(CR2032)

> 구성품목

- 소리신호기 본체(TP-SH300R)
- 무선 리모콘(TP-SR3000)
- 전기아답터 (DC5V, 1A)
- 사용설명서(품질보증서)

> 주요기능

- 무선 리모컨 기능
- 설치 및 휴대의 편리성
- 소리에 반응하여 조명과 진동으로 알려주는 기능
- 스마트 폰 충전 기능 및 거치 기능
- 조명 기능



> 유통망(판매 가능 지역) • 전국

> 제조(수입) 구분 • 국내제작

🔧 사용방법

- ① 제품을 개봉합니다.
- ② 제품을 사용할 곳에 설치한 후 아답터를 연결합니다.
- ③ 전원 버튼을 이용하여 조명을 On합니다.
- ④ 컬러 버튼을 이용하여 색상을 선택합니다.
- ⑤ USB충전 포트를 확인하고 충전합니다.
- ⑥ 조명이 On되어 있는 상태에서 전원 버튼 또는 컬러 버튼을 2초 이상을 터치하면 소리감지 모드로 운영됩니다.
- ⑦ 사용자 환경에 맞게 사용하시면 됩니다.
- ⑧ 무선 리모컨을 눌러 소리신호기의 호출 동작을 확인하시면 됩니다.

노크알리미

☎제품명 노크알리미

☎코드번호 3222704003100040

☎연락처 031-745-0025

☎등록일 2021년(하반기)

☎업체명 함께하는사람들

☎등록가격 140,000원

제품사양

크기(mm)	120(가로)×120(가로)×43(높이)
무게(g)	200
재질	플라스틱, 실리콘 커버
사용전원	DC5V 1A, 리튬 폴리머 충전 배터리(3.7V 1500mAh)

- > 구성품목
 - 노크알리미(TP-SH400) / 실리콘 커버
 - 전기가답터(DC5V, 1A)
 - 자석 고리
 - 사용설명서(품질보증서)
- > 주요기능
 - 노크알리미의 소리 감지 및 알림 기능(2단계 소리 감지 기능)
 - 설치 및 휴대의 편리성
 - 배터리 충전 기능
 - 조명 기능(4단계 밝기 조절)
- > 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- > 제조(수입) 구분 • 국내제작



🔧 사용방법

- ① 제품을 개봉 및 설치합니다.
- ② 제품 설치를 진행합니다.
- ③ 사용 설명서를 읽고 제품의 기능을 숙지합니다.
- ④ 노크 알리미의 뒷면의 전원버튼을 1초 이상 누르면 조명이 켜집니다.
- ⑤ 노크 알리미의 터치 버튼을 이용하여 조명을 선택합니다.(4단계 밝기)
- ⑥ 노크 알리미의 소리에 반응하는 기능을 선택합니다.
- ⑦ 소리 모드를 해제하려면 2단계 소리 모드에서 다시 터치 버튼을 누르면 해제됩니다.(청색 LED 소등)

영상부르미

☎ **제 품 명** 영상부르미
 ☎ **코드번호** 3222704003100050
 ☎ **연 락 처** 031-745-0025

☎ **등 록 일** 2021년(하반기)
 ☎ **업 체 명** 함께하는사람들
 ☎ **등록가격** 980,000원

제품사양

1. TP-SH4000 - 무선부르미

크기(mm)	240(가로)×142(세로)×24(높이)
무게(g)	820
재질	플라스틱, 7인치 칼러LCD, 철, 기타
사용전원	DC12V 1.5A

2. TP-SV4000 - 무선 표시기

크기(mm)	118(가로)×118(세로)×43(높이)
무게(g)	230
재질	플라스틱
사용전원	DC5V 2A, 충전 배터리

3. TP-VB2000 - 무선 진동 알람기

크기(mm)	50(가로)×68(세로)×20(높이)
재질	플라스틱
사용전원	DC5V 1A, 충전 배터리

▶ **구성품목** • 무선 부르미(TP-SH4000), C-MOS 카메라, 전기 아답터(DC12V, 1.5A), 무선 표시기(TP-SV4000)
 전기아답터 (DC5V, 2A) - 1개, 무선 진동알람기(TP-VB2000), 전기아답터 (DC5V, 1A) - 1개,
 사용설명서(품질보증서)

▶ **주요기능** • 방문객 호출 및 확인 기능, 무선 부르미의 조명 기능(PIR-동체감지센서)
 무선 부르미의 소리알림 기능, 사용자 화면 저장(녹화) 기능, 저장(녹화) 사진 재생 기능
 무선 표시기의 알람 기능, 무선 표시기의 소리 감지 및 알람 기능, 무선 표시기 충전 기능
 조명 기능, 스마트 폰 제어 및 알람 기능

▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국

▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작



⚙ 사용방법

- ① 제품을 개봉 및 설치합니다.
- ② 제품 설치가 완료하면 제품 시험을 진행합니다.
- ③ 사용 설명서를 읽고 제품의 기능을 숙지합니다.
- ④ 무선 부르미 호출 기능 및 무선 표시기 호출 기능을 시험 합니다.
- ⑤ 무선 부르미의 녹화, 재생 기능을 차례로 시험합니다.
- ⑥ 무선 표시기 밝기, 칼라 버튼을 이용하여 조명을 선택합니다.
- ⑦ 무선 표시기의 소리(소리에 반응하는)기능을 설명합니다.
- ⑧ 무선 표시기는 사용자 환경에 설치하여 사용하시면 됩니다.
 (단, 무선 제품으로 환경에 따라 거리제한이 있으므로 거실처럼 중앙에 두어 사용하시면 됩니다.)

스마트신호기

☎ **제 품 명** 스마트신호기
 ☎ **코드번호** 3222704003100060
 ☎ **연 락 처** 031-745-0025

📅 **등 록 일** 2021년(하반기)
 👥 **업 체 명** 함께하는사람들
 💰 **등록가격** 470,000원



제품사양

1. TP-SV4000 - 무선 표시기

크기(mm)	118(가로)×118(세로)×43(높이)
무게(g)	230
재질	플라스틱
사용전원	DC5V 1A, 충전 배터리

2. TP-SR3000 - 무선 리모콘

크기(mm)	30(가로)×53(세로)×11(높이)
무게(g)	11
재질	플라스틱
사용전원	코인 배터리 DC3V(CR2032)

3. TP-VB2000 - 무선 진동알림기

크기(mm)	50(가로)×68(세로)×20(높이)
재질	플라스틱
사용전원	DC5V 1A, 충전 배터리

- **구성품목**
- 무선 표시기(TP-SV4000)
 - 무선 진동알림기(TP-VB2000)
 - 전기아답터 (DC5V, 1A) - 2개, 무선 리모콘(TP-SR3000)
 - 스마트 폰 어플(스마트신호기)
 - 사용설명서(품질보증서)

- **주요기능**
- 무선 리모컨 기능
 - 무선 표시기의 알람 기능
 - 무선 표시기의 소리 감지 및 알람 기능
 - 무선 표시기 충전 기능
 - 조명 기능
 - 스마트 폰 제어 및 알람 기능

➤ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국

➤ **제조(수입) 구분** • 국내제작



🔧 사용방법

- ① 제품을 개봉 및 설치합니다.
- ② 제품 설치가 완료하면 제품 시험을 진행합니다.
- ③ 사용 설명서를 읽고 제품의 기능을 숙지합니다.
- ④ 무선 리모컨 호출 기능을 시험 합니다.
- ⑤ 무선 표시기 밝기, 칼라 버튼을 이용하여 조명을 선택합니다.
- ⑥ 무선 표시기의 소리(소리에 반응하는)기능을 설명합니다.
- ⑦ 무선 표시기는 사용자 환경에 설치하여 사용하시면 됩니다.
- ⑧ 스마트 폰 어플을 시험합니다.

데프신호기세트

☎ **제 품 명** 데프신호기세트
 ☎ **코드번호** 3222704003100070
 ☎ **연 락 처** 031-745-0025

☎ **등 록 일** 2021년(하반기)
 ☎ **업 체 명** 함께하는사람들
 ☎ **등록가격** 580,000원

제품사양

1. TP-VB3000(블루투스 진동기)

크기(mm)	48(가로)×70(세로)×20(높이)
무게(g)	37
재질	플라스틱, 바이브레이터, 충전배터리
사용전원	DC5V 1A
충전배터리	리튬폴리머 3.7V (450mAh)

2. TP-SH300R(소리신호기)

크기(mm)	90(가로)×172(세로)×130(높이)
무게(g)	180
재질	플라스틱
사용전원	DC 5V 1A

3. TP-SR3000(무선 리모컨)

크기(mm)	30(가로)×53(세로)×11(높이)
무게(g)	15
재질	플라스틱
사용전원	코인배터리 3V (CR2032)

4. 스마트 폰 어플

- ▶ **구성품목** • 블루투스진동알림기(TP-VB3000), 소리신호기(TP-SH300R)
전기아답터 (DC5V, 1A) - 2개, 무선 리모컨(TP-SR3000)
스마트폰 어플(데프신호기), 사용설명서(품질보증서)
- ▶ **주요기능** • 스마트폰 알림 기능, 알람 알림 기능, 네비게이션 알림 기능,
무선 리모컨 기능, 소리를 감지하여 조명으로 알려주는 기능, 조명 기능
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작



⚙️ 사용방법

- ① 제품을 개봉합니다.
- ② 제품을 확인 후 아답터를 연결하여 제품을 충전합니다.
- ③ 스마트 폰 어플을 Download한 후 스마트 폰에 설치합니다.
- ④ 그후 블루투스 진동기(TP-VB3000)의 전원을 ON시킨 후 접속하여 사용자 환경에 맞게 사용합니다.
(전원 버튼을 2초이상 누르면 조명과 진동이 동작하면서 전원이 ON됩니다.)
- ⑤ 무선신호기에 아답터를 연결합니다.
(하단에 있는 터치버튼을 이용하여 색상, 조명 ON/OFF를 할 수 있습니다.)
- ⑥ 조명이 켜져 있는 상태에서 터치(밝기) 버튼을 1초 이상 누르면 소리감지 모드가 동작합니다.
- ⑦ 무선 리모컨(TP-SR3000)을 눌러 무선신호기에 조명이 점멸하는지 확인합니다.
- ⑧ 무선신호기와 무선 리모컨의 사용 거리는 주변 환경에 따라 동작이 제한될 수 있습니다.
(동작 거리를 확인 후 사용하시기 바랍니다.)

아코이알리미

☎ **제 품 명** 아코이알리미
 ☎ **코드번호** 3222704003100080
 ☎ **연 락 처** 031-745-0025

☎ **등 록 일** 2022년(상반기)
 ☎ **업 체 명** 함께하는사람들
 ☎ **등록가격** 350,000원

제품사양

크기(mm)	140(가로) × 140(세로) × 120(높이)
제품 중량	2.85 kg
재질	ABS, PC

- > **구성품목**
 - 아코이알리미
 - 전기가답터
 - 진동자
 - 설명서
- > **주요기능**
 - 스마트폰 벨소리, 아기 울음소리 등 소리를 감지하여 조명과 진동으로 알려줌
 - 기상 알람(진동자), 4단계 조명 기능
- > **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- > **제조(수입) 구분** • 국내제작



⚙️ 사용방법

- ① 제품을 개봉 한 뒤, 아코이알리미에 DC전원과 진동자 잭을 연결해주세요.
- ② 우측 터치 버튼을 눌러 조명 밝기를 선택하세요.(독서, 영상통화, 취침 등 4단계 밝기)
- ③ 좌측 터치 버튼을 눌러 소리감지 단계를 설정하세요.
 (1단계 - 적색 ON, 청색 OFF / 2단계 - 적색 OFF, 청색 ON /
 3단계 - 적색 ON, 청색 ON / 소리감지 OFF - 적색 OFF, 청색 OFF)
- ④ 소리감지를 해제하려면 좌측 버튼을 눌러 터치 LED(적색, 청색)가 꺼지면 해제됩니다.

네오센서리 손목밴드

◎제품명 네오센서리 손목밴드
 ◎코드번호 3222704011700015
 ◎연락처 0507-1397-2774

◎등록일 2023년(하반기)
 ◎업체명 ㈜이글로벌
 ◎등록가격 1,235,000원

제품사양

크기(mm)	밴드길이 (Small-17cm / Large-23cm)
제품 중량	S - 49 g / L - 51 g
재질	의료용 실리콘밴드

- > 구성품목
 - 본품(전용앱 포함), C-type 충전케이블
 - 290mAh 리튬폴리머 배터리
 - 사용설명서, 품질보증서
- > 주요기능
 - 햅틱 진동모터로 구역대, 지역대의 소리 및 음성을 진동으로 변환 (목소리, 환경소리, 음악, 네이게이션 소리 등)
 - 모든 주변 환경소리를 29,000개의 진동패턴으로 구현 (일상, 수면, 음악모드)
 - 스마트폰과 연동하여 사용
- > 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- > 제조(수입) 구분 • 수입(미국)



⚙️ 사용방법

- ① 네오센서리 앱을 스마트폰에 다운로드 받고 로그인 후 손목밴드와 연결합니다.
- ② 착용한 뒤, 전원버튼을 2초 누르면 녹색등 3개가 표시되고 손목밴드가 작동하여 실시간으로 환경소리에 진동으로 반응합니다.
- ③ 더 많은 소리를 진동으로 느끼려면 “+”버튼을, 더 작은 소리를 느끼려면 “-”버튼을 조정하여 감도를 조절합니다.
- ④ 앱을 통해 일상모드, 수면모드, 음악모드로 변경 할 수 있으며 환경소리와 진동을 더욱 잘 인지하기 위한 훈련연습게임, 진동강도, 기기명 변경도 할 수 있습니다.

한뼘의사소통패키지

☎ **제 품 명** 한뼘의사소통패키지
 ☎ **코드번호** 3222109006500010
 ☎ **연 락 처** 055-674-3614

☎ **등 록 일** 2021년(상반기)
 ☎ **업 체 명** 한뼘
 ☎ **등록가격** 600,000원

제품사양

크기(mm)	161.9×246.8×6.9
무게	508 g
통신규격	
운영체제	안드로이드
CPU코어	
클럭	2GH
디스플레이	10.5인치
해상도	1920*1200
램	4G
저장장치(내장/외장)	64GB
카메라	후(800만)전(900만)
블루투스	블루투스 5.0



- ▶ **구성품목** • 설명서, 태블릿PC, 충전기, USB잭
- ▶ **주요기능**
 - 장애인들의 접근성과 유해매체 차단을 위한 홈 화면 앱 제공
 - 대체의사소통에서 상징의 개수에 따라 사용자에게 최적화 되는 UI환경 제공
 - 의사소통 프로그램 속 상징을 학습할 수 있는 6가지 앱 제공
 - 새로운 단어를 자유롭게 추가 삭제 할 수 있는 앱 제공
 - 기타 태블릿 PC 사용과 시지각 훈련에 필요한 교육용 앱 다수 제공
- ▶ **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- ▶ **제조(수입) 구분** • 국내제작

🔧 사용방법

[대화용 장치 접근성을 높여 주는 한뼘 즐겨찾기]

① 자주 사용하는 프로그램 설정, ② 슬라이드 형식의 홈화면 사용

[타이핑형 대화 프로그램]

① 타이핑 후 마이크 터치, ② 단어를 입력 후 선택형 체크, ③ 해당 자음 모음만 생성 단계별 학습 가능

[타이핑형 대화 프로그램]

① 사용자 선택, ② 자신이 원하는 카드 선택, ③ 카드를 조합하여 의사소통 진행, ④ 장애 정도에 따른 상징 수 조절, ⑤ 상징의 수와 크기가 자동 조절

[대화용 장치의 침식을 도와주는 한뼘 카드 생성 앱]

① 사용자 선택, ② 카테고리 선택, ③ 원하는 사진을 선택 후 상징 생성

한뼮 AAC_PRO

☎제품명 한뼮 AAC_PRO
 ☎코드번호 3222109006500020
 ☎연락처 055-674-3614

☎등록일 2022년(상반기)
 ☎업체명 한뼮
 ☎등록가격 600,000원

제품사양

크기(mm)	124(가로) × 210(세로) × 8(두께) / 8인치
제품 중량	0.34 kg
재질	ABS, PC

- > 구성품목
 - 태블릿 PC
 - AAC 소프트웨어
 - 충전기
 - USB잭
- > 주요기능
 - 한국형 상징 라이선스 9000단어 이상 사용 가능
 - 직관적으로 단어의 침식이 가능하며 단어수 무한 확장
 - 실시간 자막 프로그램과 연동
- > 유통망(판매 가능 지역) • 전국
- > 제조(수입) 구분 • 국내제작



🔧 사용방법

- ① 전원을 켜고 아이콘을 눌러 실행해주세요.
- ② 그림과 글자, 문장형과 단어형, 키보드 버튼 등을 통한 문장 형성 후 음성을 출력하세요.
- ③ 추가 및 삭제 기능을 통해 사용자별 맞춤 AAC 제작이 가능합니다.

모모야모모 언어훈련패드

☎ **제 품 명** 모모야모모 언어훈련패드
 ☎ **코드번호** 3222109007900010
 ☎ **연 락 처** 02-736-7077

☎ **등 록 일** 2022년(하반기)
 ☎ **업 체 명** 에듀엔젤
 ☎ **등록가격** 600,000원

제품사양

크기(mm)	259×174×10.1(스마트패드 10.1)
무게	582 g
재질	플라스틱, 실리콘처리
버전	- 뮤패드 Converter10 pro - window10
기타	- 인텔 베이트레일 : T Z3735F(쿼드코어, 1.33GHz) - 메모리 2GB - 입출력단자 USB 2.0 - High Speed 블루투스 - IPS패널(광시야각) - 배터리 7,800mAH



- > **구성품목** • 스마트패드 10.1 (1280x800) (언어훈련 및 의사소통보조기기(AAC) 프로그램 탑재), 사용설명서, 학습지도서(350P), 가정용 지도서(70P), 충전기(5V2A DC Connector), 완충파우치, 패드케이스, 화면보호 필름
- > **주요기능** • 제공된 문장을 통해 신속한 의사표현 가능
 • 주로 쓰는 말을 미리 입력해두어 언제 어디서나 불러내어 의사소통 가능
 • 학습자료가 탑재되어 있어 언어재활을 위한 훈련 가능
 • 중증 장애 사용자의 발생, 발화훈련 가능
 • 게임을 통한 훈련 가능
- > **유통망(판매 가능 지역)** • 전국
- > **제조(수입) 구분** • 국내제작

🔧 사용방법

[프로그램(AAC)]

- ① 왼쪽 상단의 전원스위치를 가볍게 누르면 전원이 들어옵니다.
- ② 홈화면이 나타나면 '간편의사소통'을 터치하고 여러 상황 중 원하는 상황을 더블로 터치한 후 상황에 맞는 문장을 선택하고 화면의 마이크를 터치하면 해당 문장이 소리로 표현됩니다.
- ③ 직접 입력을 한 후 마이크를 터치하면 해당 입력내용이 소리로 나타납니다.
- ④ '문장만들기'를 터치한 후 왼쪽의 해당 메뉴를 선택하고 오른쪽의 단어를 선택합니다.
- ⑤ 단어와 조사 등을 선택한 후 마이크를 터치하면 소리로 표현됩니다.
- ⑥ '내가 만든 문장'을 선택하고 주로 쓰는 문장을 입력해 두면 해당 문장이 저장되어 언제, 어디서나 그 문장을 선택하고 마이크를 터치하여 표현할 수 있습니다.

[언어훈련 프로그램]

- ① 홈 화면에서 해당 학습을 터치하여 학습을 진행합니다.
- ② 하위 메뉴에서 문제 선택하고 학습시작을 터치한 후 학습 진행합니다.
- ③ 문제를 푼 다음 녹음 기능을 활용하여 음성녹음과 재생을 하여 학습 효과 높일 수 있습니다.
- ④ 음성녹음은 발음에 대한 교정뿐만 아니라 학습자의 흥미를 유발시켜 효과 제고합니다.
- ⑤ 음성인식 활용학습에서는 먼저 힌트를 터치하여 성우의 목소리의 고저장단을 그래프로 보면서 학습자가 인식을 하게끔 한 후 음성녹음을 하여 진행합니다.
- ⑥ 모든 학습 진행사항은 자동으로 결과가 저장되므로 이를 활용하면 효과적이고 체계적인 훈련이 가능하고 학습효과 증대.

2024
장애인보조기기 교부사업
품목 정보 안내서

Ⅲ


장애인보조기기 상담 및 정보제공처

1. 보건복지부 보조기기센터
2. 정부 부처별 보조기기 사업 및 문의처
3. 보조기기 품목 등록업체

장애인보조기기 상담 및 정보제공처

01 ▶ 보건복지부 보조기기센터

- 장애인보조기기 마련 방법 상담, 장애인보조기기 적합성 평가·구매 전 체험, 지속적인 장애인보조기기 사후 관리, 장애인보조기기 견학·교육·홍보
- 장애인보조기기 콜센터 ☎ 1670-5529(지역내선번호 : 1~17)

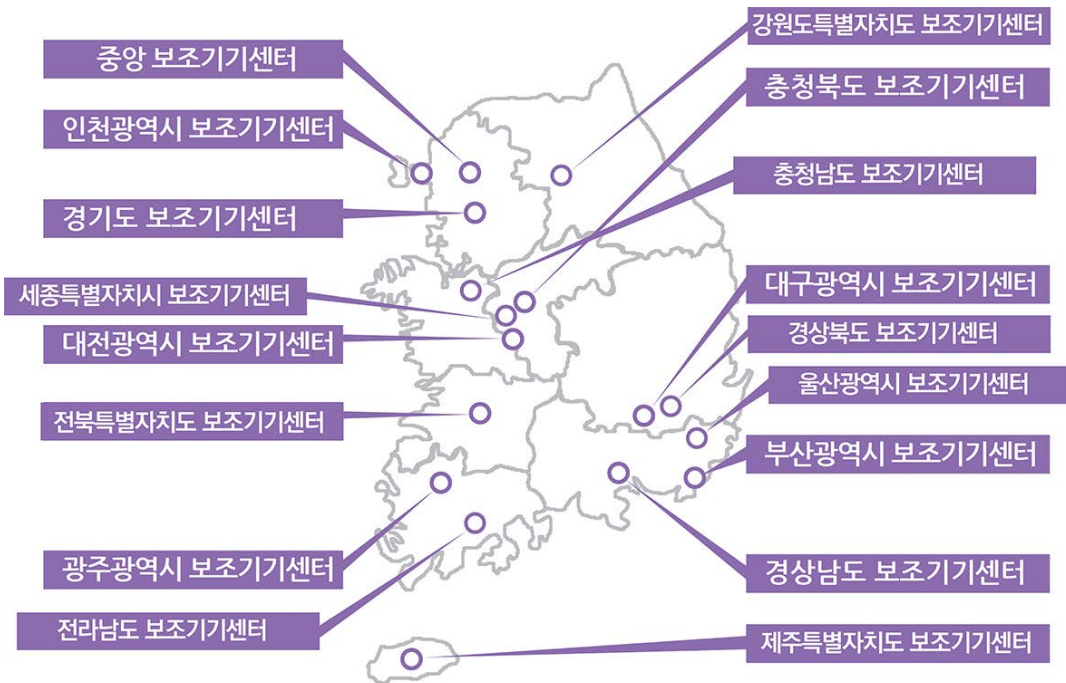

2024 장애인보조기기 교부사업 품목 정보 안내서

센터명	수행기관	주소	전화번호	홈페이지
중앙 보조기기센터	국립재활원	(우)01022 서울특별시 강북구 삼각산로 58 국립재활원 교육행정동 1층 중앙보조기기센터 사무실	1670-5529 (내선 1)	http://knat.go.kr
부산광역시 보조기기센터	부산광역시 장애인 종합복지관	(우)47519 부산 연제구 중앙대로 1150번길 15 부산광역시 장애인종합복지관	051-790-6192~6	http://bratc.or.kr
대구광역시 보조기기센터	대구대학교	(우)42400 대구광역시 남구 성당로 50길 33 대구대학교 대명동캠퍼스 평생교육원 1호관 1201호	053-650-8340	http://datc.daegu.ac.kr
인천광역시 보조기기센터	재단법인 노틀담 수녀회 노틀담복지관	(우)21042 인천광역시 계양구 계양산로 35번길 12-37	032-540-8989	http://icatc.or.kr
광주광역시 보조기기센터	호남권역 재활병원	(우)61027 광주 북구 하서로 590 호남권역재활병원 1층	062-613-9365~6	http://gjat.or.kr
대전광역시 보조기기센터	대전충청권역 의료재활센터	(우)35015 대전 중구 문화로 266 대전충청권역의료재활센터 지하1층	042-338-2982	http://www.yeswecan. or.kr
울산광역시 보조기기센터	울산장애인 자립생활센터	(우)44689 울산 남구 둔질로 131 1층 울산광역시보조기기센터	052-267-5529	http://usat.or.kr
세종특별자치시 보조기기센터	세종시장애인 자립생활센터	(우)30100 세종특별자치시 한누리대로 589, 301호	044-715-5320	http://sjatc.or.kr
경기도 보조기기센터	경기도재활 공학서비스 연구지원센터	(우)11485 경기도 양주시 삼송동 640-18 1층	북부 : 031-852-7363	http://atrac.or.kr
		(우)16639 경기도 수원시 권선구 서수원로 130 누림센터 204	남부 : 031-295-7363	
강원특별자치도 보조기기센터	강원도재활병원	(우)24227 강원도 춘천시 충열로 142번길 24-16	033-248-7751	http://gatc.or.kr
충청북도 보조기기센터	청주교구천주교회 유지재단	(우)28459 충청북도 청주시 흥덕구 1순환로 438번길 39-17 충북재활의원 3층	043-265-0401	http://cbat.or.kr
충청남도 보조기기센터	나사렛대학교	(우)31172 충청남도 천안시 서북구 월봉로 48 믿음관 1층	041-415-2861~5	http://cnat.or.kr
전북특별자치도 보조기기센터	전주예수병원	(우)55046 전라북도 전주시 완산구 서원로 394, 1층	063-230-8083	http://jbat.or.kr
전라남도 보조기기센터	순천제일대학교	(우)57997 전라남도 순천시 제일대학길17 (덕월동), 전라남도 보조기기센터	061-740-1501,3	http://jnat.or.kr
경상북도 보조기기센터	대구대학교 산학협력단	(우)38453 경상북도 경산시 진량읍 대구대로 201, 경상북도 보조기기센터	053-850-5801	http://gbatc.daegu.ac.kr
경상남도 보조기기센터	경상남도장애인 종합복지관	(우)51144 경상남도 창원시 의창구 봉곡로 97번길 85	055-237-8242	http://gnatc.or.kr
제주특별자치도 보조기기센터	사회복지법인 삼다	(우)63311 제주특별자치도 제주시 아복로 433, 2층 제주시각장애인복지관	1670-5529(11)/ 064-753-9997	http://jejuat.or.kr

장애인보조기기 상담 및 정보제공처

02 ▶ 정부 부처별 보조기기 사업 및 문의처

사업명(소관부처)	신청대상자		지급품목	신청기관
장애인 보조기기 교부사업 (보건복지부 장애인자립기반과)	기초생활수급자 또는 차상위 이면서 장애인 (지체, 뇌병변, 시각, 청각, 심장, 호흡, 지적, 자폐성, 언어 장애 등)		• 심장장애 - 욕창예방 방식, 욕창예방 매트리스 • 지체·뇌병변장애 - 보행차, 좌석형 보행차, 탁자형 보행차, 음식 섭취 보조기기, 기립틀 및 기립을 위한 지지대(기립훈련기), 목욕의자, 경사로(휴대용 경사로), 이동변기, 독립형 변기 팔 지지대 및 등지지대, 환경 제어 장치, 지지대 및 손잡이(안전 손잡이), 장애인용 유모차, 바닥 특수 얇기 자세유지용 장치(피더시트), 목욕용 미끄럼방지용품, 대체입력장치(스위치), 차량 내 착석을 위한 좌석과 방식, 액세서리, 개조용품(장애인용 카시트) • 지체·뇌병변·심장·호흡장애 - 미끄럼 및 회전을 위한 보조기기, 의류 및 신발(장애인용의복), 휠체어 액세서리(휠체어용 탑승자 고정장치 및 기타액세서리), 침대 및 탈착식 침대 판/전동조절식 매트리스 지지단(전동침대), 소변수집장치, 개인비상경보시스템(낙상알리기), 독서용 탁자, 책상 및 독서대 • 시각장애 - 음성유도장치(음향신호기리모컨), 음성시계, 영상 확대 비디오 시스템(독서확대기), 문자판독기(광학문자판독기), 녹음 및 재생장치, 특수키보드, 특수출력 소프트웨어 • 청각장애 - 진동시계, 헤드폰(청취증폭기), 신호장치(시각신호 표시기), 표준네트워크 전화기 • 뇌병변·지적·자폐성·청각·언어 장애 - 대화용장치 • 뇌병변·지체·지적·자폐 - 기억지원 보조기기	거주지 관할 행정복지센터 (행정 구역 체계에 따라 읍 또는 행정복지센터) 에 문의
장애인 보조기기 지원사업 (의료급여 : 보건복지부 기초의료 보장과)	장애인 (지체, 뇌병변, 시각, 청각 등)	의료급여 수급자 (기초생활 수급자)	• 의지 보조기, 다리 의지 소모품(소켓 및 라이너) • 수동휠체어, 전동휠체어/스쿠터, 전동보조기기 전지 • 지팡이, 목발, 맞춤형 교정용 신발 • 보청기, 개인용 음성증폭기, 저시력 보조안경, 콘택트렌즈, 돋보기, 망원경, 의안, 흰지팡이 등 • 욕창예방 방식, 욕창예방 매트리스, 이동식 전동리프트, 전방·후방보행차 • 자세보조용구	거주지 관할 행정복지센터 (행정구역 체계에 따라 읍 또는 행정복지센터)에 문의
장애인 보조기기 지원사업 (건강보험급여 : 보건복지부 보험 급여과)		차상위 또는 국민건강 보험 가입자		국민건강보험공단 1577-1000
노인장기요양보험 복지용구 지원사업 (기타재가급여 : 보건복지부 요양보험제도과)	노인장기요양보험법 수급자(1~5등급, 인지지원등급) / 시설 급여를 제공하는 장기요양기관에 입소하지 않은 수급자		• 구입품목 : 이동변기, 목욕의자, 성인용보행기, 안전손잡이, 미끄럼방지용품(미끄럼방지매트, 미끄럼방지책, 미끄럼방지양말), 간이변기(간이대변기·소변기), 지팡이, 욕창예방방식, 자세변환 용구, 요실금패드 • 대여품목 : 수동휠체어, 전동침대, 수동침대, 이동욕조, 목욕 리프트, 배회감지기 • 구입 또는 대여 품목 : 욕창예방매트리스, 경사로(실내용*실외용) • 급여비용 본인 부담률 : 일반대상자 15%, 경감대상자 6% 또는 9%, 기초생활수급자 본인부담금 없음	국민건강보험공단 노인장기요양보험 1577-1000

2024 장애인보조기기 교부사업 품목 정보 안내서

사업명(소관부처)	신청대상자	지급품목	신청기관
정보통신 보조기기 보급사업 (과학기술 정보통신부 디지털포용정책팀)	등록장애인, 국가유공자 상이등급 등	- 화면낭독 소프트웨어, 독서확대기, 점자정보 단말기, 점자 출력기, 데이지 플레이어, 광학문자판독기, 화면확대 소프트웨어, 점자 라벨기, 특수키보드, 특수마우스, 터치 모니터, 영상전화기, 의사소통보조기기, 언어훈련 소프트 웨어, 무선신호기, 음성 증폭기 등 - 본인 부담금 : 일반대상자 20%, 기초생활수급자 및 차상위 계층 10%	거주지 관할 지정 접수처 (at4u.or.kr- "접수처안내" 확인)에 문의
산재보험급여 직무지원형 재활보조기기 지급사업 (고용노동부)	산재보험 가입자 산업재해 장애인	- 하지_인공발, 하지_인공무릎, 하지_관련기능형 제품 - 상지_전동수 및 관련기능형 제품 - 이동기기_휠체어 및 관련기능형 제품	근로복지공단 1588-0075 또는 재활공학연구소 032-509-5269
국가유공자 등 보철구지급사업 (국가보훈부 보훈의료정책과)	국가유공자 등 보철구 지급규정에 해당하는 자	- 제작품 : 다리의지, 팔의지(전자의수 포함), 보조기, 맞춤형 교정용 신발, 기타 보장구(보청기, 의안, 실리콘 제품) - 기성품 : 이동기기(수동휠체어, 전동휠체어, 휠체어동력보조장치, 철크러치, 목발, 지팡이 등), 시각장애용품, 욕창예방용품(욕창 예방방석, 욕창예방매트리스), 자동차 보조 용구(차량 지붕형 휠체어 보관함, 트랜스퍼보드), 기타(자세보조용구, 청각장애 용품, 전동침대, 인공요장, 인공항문 등) - 국가유공자 : 상이처에 해당하는 경우 100%	국가보훈부 1577-0606 중앙보훈병원 02-2225-1266
보조공학기기 지원사업 (고용노동부 장애인고용과)	장애인 근로자, 장애인을 고용한 (또는 고용하려는) 사업주	- 맞춤형 보조공학기기 지원(개조, 자체제작) / 보조공학기기 구입·대여 비용 지원 - 품목 : ①정보접근-점자프린터, 확대독서기 등 ②작업기구-테이블, 특수작업의자 등 ③의사소통-신호장치, 골도 전화기 등 ④사무보조-음성메모기, 수화기홀더 등 ⑤차량용-운전·탑승·탑재 보조장치 등 - 장애인 1인당 1,500만원(중증 2,000만원) 한도 - 지원한도액은 보조공학기기 구입·대여에 소요되는 비용, 맞춤형 보조공학기기 지원액을 전부 합산하여 고용유지기간(2년)동안에는 초과하지 못하며 초과 금액은 본인 부담 가능	1588-1519 한국장애인고용공단

※ 장애인보조기기 지원품목은 사업별로 신청대상, 품목, 신청·접수하는 기관 등에 차이가 있습니다. 또한 해마다 기관별, 사업별로 지급되는 품목과 관련 세부 지침 등에 변동사항이 있을 수 있으니 반드시 해당 신청기관에 확인·문의하시기 바랍니다.

장애인보조기기 상담 및 정보제공처

03 ▶ 보조기기 품목 등록업체

번호	업체명	연락처	E-Mail
1	함께하는사람들	031-745-0025	anada69@naver.com
2	휴먼케어	031-486-9015	human1@humancare.co.kr
3	대안의료기	02-3437-8275	daean1494@hanmail.net
4	(주)보필	031-677-9924	mshc9924@gmail.com
5	포에버헬스케어	031-499-3367	forevercs1@naver.com
6	유광정밀	053-357-5512	injo4162@naver.com
7	케어맥스코리아	1588-4624	cmk@caremaxkorea.com
8	아이루페	02-784-0118	info@iloupe.kr
9	케어라이프코리아	02-455-0858	skywlgud@naver.com
10	(주)엔에스비에스	031-965-7989	lee@nsbs.co.kr
11	헤스테나	070-8835-1779	hesthena@naver.com
12	보림제작소	031-677-9117	bolim1541@naver.com
13	한뽕	055-674-3614	hanppyeom7@naver.com
14	서북의료기상사	02-353-3973	yjs0612@hanmail.net
15	사랑으로	070-7757-2014	loveis_parkhar@naver.com
16	우비팩토리	051-516-9823	odsthink@gmail.com
17	(주)보임	031-666-8979	golf4510@naver.com
18	(주)우성이엔지	031-864-0394	woosung8830@naver.com
19	바투비전	02-463-4669	info@batuvision.com
20	에듀엔젤	02-736-7077	kbj2560@hanmail.net
21	란달유디케어스	032-563-1384	admin@udcares.com
22	하티스트	070-7130-7660	mundo@samsung.com
23	(주)씨엔피	070-7707-3947	nick@chrsparkdesign.com
24	씨피씨	031-443-7783	sales@cypad.com
25	성심ENG	031-355-5297 (1899-5947)	sse7010@gmail.com
26	리보	070-4120-5402	k@rivo.kr
27	(주)세원케어	031-323-1431	sewon1431@daum.net
28	(주)링크옵틱스	062-971-5664	won@linkoptics.com
29	돌봄드림	070-4452-5300	joseph@dolbomdream

2024 장애인보조기기 교부사업 품목 정보 안내서

번호	업체명	연락처	E-Mail
30	(주)유디센터	02-3662-1051 (070-8890-0300)	ud@udcenter.kr
31	에스제이	043-836-8593	sjmedicalcp@naver.com
32	공생	042-932-9101	gongsaeng4@gmail.com
33	(주)오토앤로봇	041-531-9927	park.shinyoung@autonrobot.com
34	삼인라이프룸	051-727-3601	samin21@hanmail.net
35	(주)이도컴퍼니티앤디	1877-4717	cmlim@edocom.co.kr
36	(주)어니스트비전	032-875-2295	soyun@honestvision.co.kr
37	미키코리아메디칼	010-5399-7971	ey-tak@wheelchair-miki.co.kr
38	(주)에이엠이	031-677-7522	ame@ame.co.kr
39	(주)시니어가디언스	031-792-1092	sguardians1@naver.com
40	(주)셀바스헬스케어	042-879-3056	hims@selvashc.com
41	(주)현대메딕스	031-534-2298	hmedics2019@naver.com
42	(주)엠엘피	033-813-8040	sonye09070@gmail.com
43	(주)케어빌리지	1588-6367	info@carevillage.co.kr
44	(주)해피로드	02-701-1233	hr2019@daum.net
45	보원테크	032-670-7827	ko7765@naver.com
46	그린계기(주)	070-8808-5200	robin2187@daum.net
47	(주)이글로벌	0507-1397-2774	simonk7101@eglobal.kr
48	주식회사 에이원의료기산업	031-353-3877	aone09@naver.com

2024
장애인보조기기 교부사업
품목 정보 안내서

IV

장애인보조기기 교부사업 참고서식

1. 20 년 장애인보조기기 교부사업 집중신청기간 운영계획
 2. 장애인 등록 및 서비스 신청서
 3. 장애인보조기기 교부사업 안내문
 4. 서비스 지원 종합조사표
 5. 장애인보조기기 맞춤형 상담·평가 의뢰서
 6. 장애인보조기기 교부사업 평가표
 7. 장애인보조기기 신청(□ 변경 □ 취소) 확인서
 8. 장애 정도 심사용 진단 의뢰서
 9. 장애 정도 심사용 진단서
 10. 장애인보조기기(□ 교부 □ 대여 □ 사후관리(수리, 점검 등)) 의뢰서
 11. 장애인보조기기 교부 확인서
 12. 장애인보조기기(□ 교부 □ 대여 □ 사후관리(수리, 점검 등)) 비용청구서
- 기타. 행복e음 사용법

* 2024 장애인복지사업안내 자료 참고

20 년 장애인보조기기 교부사업 집중신청기간 운영계획

[illegible]

150

2024 장애인보조기기 교부사업 품목 정보 안내서

2. [서식 2] 장애인 등록 및 서비스 신청서

[서식 2]

장애인복지법 시행규칙 [별지 제1호의4서식]

장애인 등록 및 서비스 신청서

※ 색상이 어두운 난은 신청인이 작성하지 않고, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

(4쪽 중 제1쪽)

접수번호	접수일자	처리기간	별도안내
장애인 (본인)	성명	여권상 영문성명	
	주민등록번호(외국인등록번호 또는 국내거소신고번호)		성별 []남 []여
	사회보장 []수급자 []차상위계층 []기타	휴대전화	
	(현)주소	전화번호	
통지방법	☐ 서면 ☐ 전자우편() ☐ 문자메시지서비스(SMS) ☐ 기타()		
법정대리인 또는 보호자	성명	장애인(본인)과의 관계	주민등록번호(외국인등록번호 또는 국내거소신고번호)
	주소		전화번호
복지욕구	☐ 직접적 소득(장애인연금 등) ☐ 간접적 소득(감면 등) ☐ 건강 및 의료 ☐ 고용 ☐ 주거 ☐ 일상생활 ☐ 보육 및 교육 ☐ 문화 및 여가 ☐ 안전 및 권익		
국가유공자, 보훈보상·지원대상자로서 상이등급(1~7급)을 받은 자: []해당 []비해당			
[서비스 신청]			
서비스 종류		신청 구분	비고
☐ 장애인등록 신청		☐ 신규 ☐ 조정 ☐ 재판정	·재발급 사유
☐ 장애인등록증 발급 신청		☐ 신규 ☐ 재발급	☐ 기간만료 ☐ 훼손 ☐ 분실
☐ 장애인통합복지카드 발급 신청	고속도로 통행료 할인 기능	☐ 신규 ☐ 재발급 ☐ 정보변경 ☐ 반납	☐ 기재사항 변경
	☐ 포함 ☐ 미포함		☐ 신용카드등과 통합된 등록증교부신청
	☐ 신용 기능 ☐ 작동 기능		☐ 카드전환(-)
☐ (구)고속도로 통행료 할인 카드		☐ 정보변경 ☐ 반납	☐ 기타
☐ 시각장애인용 점자 스티커		☐ 신규 ☐ 재발급	·반납사유
☐ 장애인사용자동차등표지 발급 신청		☐ 신규 ☐ 재발급	☐ 사망 ☐ 양도·증여 ☐ 폐차 ☐ 등록말소
☐ 장애인보조기기 교부(대여·수리) 신청		☐ 교부 ☐ 대여 ☐ 수리	☐ 기타
☐ 장애인활동지원			※ 사회보장급여(사회서비스이용권) 신청(변경)서를 추가로 작성해야 합니다.
☐ 거주시설 입소		☐ 중증장애인 거주시설 ☐ 장애유형별 거주시설	
☐ 저소득 장애인 진단서 발급비 및 검사비		☐ 진단서 발급비 ☐ 검사비	
[감면서비스 (대행)신청]			
☐ 휴대전화요금		☐ 전기요금	☐ 도시가스요금
☐ 초고속인터넷서비스이용료		☐ TV 수신료	☐ 자동차관련 지방세(자동차세, 면허세, 등록세, 취득세)
☐ [지역난방비]		☐ [지역난방비]	
[타기관 서비스 의뢰]			
☐ 고용 서비스		☐ 실업급여 ☐ 취업성공패키지 ☐ 직업훈련 ☐ 직업진로상담 ☐ 취업지원 및 상담 ☐ 직업생활 지원(근로지원인, 보조공학기기 지원 등)	
☐ 의료 서비스		지역사회중심재활 사업	

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

장애인보조기기 교부사업 참고서식

(4쪽 중 제2쪽)

[신용카드·직불카드와 통합된 장애인등록증을 발급받으려는 경우]

카드구분	[] 신용카드 [] 직불카드		
신청인	[] 본인 [] 법정대리인 또는 보호자(본인과의 관계:)		
직 장	직 장 명	부서명	
※직장이 있는 경우만 기재	직장주소	직장 전화번호	
대금결제	대금청구지 [] 자택 [] 직장 [] 전자우편()		
	대금결제일 매월 일(1일~27일 중에서 선택)		
자동이체 신청	계좌번호	금융기관	예금주
	직불카드 신청시 신한은행 또는 우체국 기재		

[장애인등록증 전국(재)발급 신청]

기존 장애인등록증 발급기관	첨부 (등기 우편료)
장애인등록증 수령방법 [] 신청기관 방문 [] 주민등록기관 방문 [] 개인 등기우편 등기우편 수령 주소 (우)	

[장애인 사용 자동차 등 표지 발급(재발급) 및 고속도로 통행료 할인 신청]

운전자	성명	주민등록번호(외국인등록번호 또는 국내거소신고번호)
	주소	전화번호
	운전면허번호	장애인과의 관계
단체 · 시설	단체·시설명	사업자등록번호
	소재지 (전화번호:)	
	종류 [] 장애인복지단체·시설 [] 노인의료복지시설	
	대표자 성명	주민등록번호(외국인등록번호 또는 국내거소신고번호)
자동차	소유자 성명 (장애인과의 관계:)	주민등록번호(외국인등록번호 또는 국내거소신고번호) (사업자등록번호)
	자동차등록번호	차종/차명
	배기량/승차정원/최대적재량	용도

[장애인보조기구 교부(대여·수리) 신청]

주거형태	[] 재가(자가, 전세, 월세) [] 시설입소 [] 그 밖의 형태					
희망보조기구	[] 장애인보조기구명()					
수리가 필요한 부위				교부(대여·수리)상 특별히 희망하는 사항		
가장 최근에 교부받은실적	교부년도	종류	교부기관	교부년도	종류	교부기관

[저소득 장애인 진단서 발급비 및 검사비]

신청금액 (지원금액)	계좌번호/금융기관/예금주(관계)
-------------	-------------------

「장애인복지법」 제32조제1항 및 같은 법 시행규칙 제3조제1항·제6조제1항에 따라 위와 같이 장애인 등록 및 서비스를 신청합니다.

신청인 년 월 일 (서명 또는 인)


시장·군수·구청장 귀하

장애인보조기기 교부사업 참고서식

(4쪽 중 제4쪽)

처리절차

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.

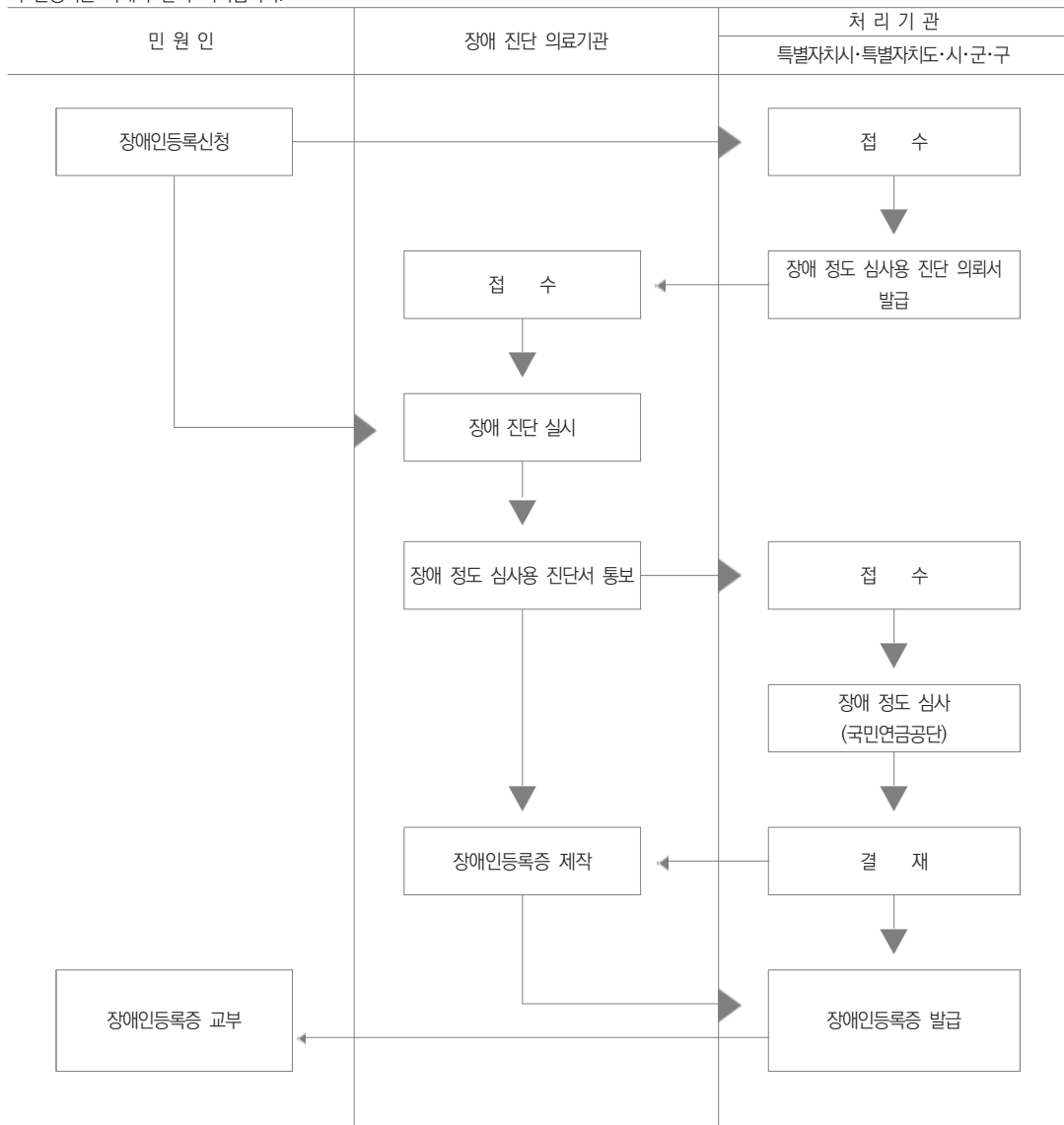

2024 장애인보조기기 교부사업 품목 정보 안내서

3. [서식 3] 장애인보조기기 교부사업 안내문

[서식 3]

장애인보조기기 교부사업 안내문

□ 장애인보조기기 교부사업이란

- 저소득 장애인에게 일상생활에 필요한 장애인보조기기 지원하는 사업

□ 장애인보조기기 교부사업 대상자 (2가지 조건 모두 충족)


- 장애종별: 지체·뇌병변·시각·청각·심장·호흡기·언어·자폐성·지적장애인
- 소득수준: 국민기초생활보장 수급자 및 차상위 계층

□ 장애인보조기기 교부사업 지원품목

- 장애유형별 지원기준에 적합한 보조기기 42개 품목

 신청가능한 품목은 행정복지센터 장애인보조기기 담당자 문의

□ 장애인보조기기 교부 절차

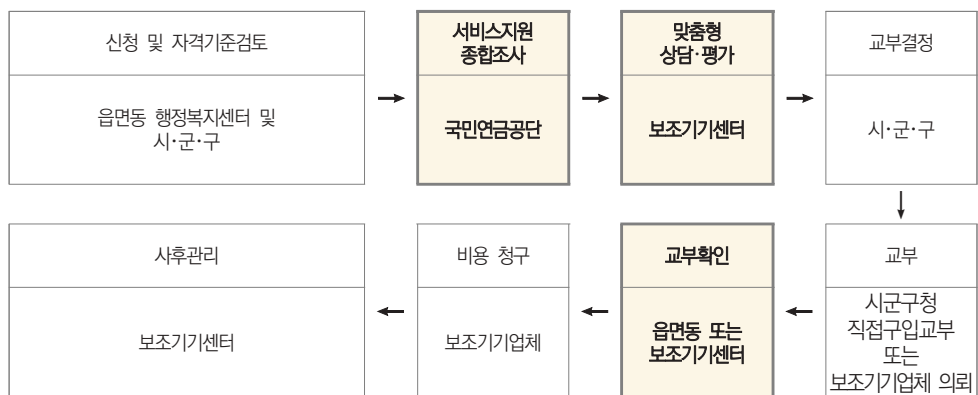

※ 방문 상담 등 안내

- 보조기기 교부사업 신청에 따른 국민연금공단의 「서비스지원 종합조사」 및 보조기기센터의 「맞춤형 상담, 보조기기 담당공무원의 「보조기기의 교부확인」 등 총 3회의 방문 상담 등이 이뤄질 수 있으며, 기성품 교부가 아닌 맞춤형 제작 보조기기를 교부 받는 경우에는 지역보조기기센터의 검수를 위해 추가 방문이 이루어질 수 있습니다.

장애인보조기기 교부사업 참고서식

4. [서식 4] 서비스 지원 종합조사표

[서식 4]

서비스 지원 종합조사표

1. 일반사항

신청서비스		☐ 활동지원급여 ☐ 장애인 보조기기 ☐ 장애인 거주시설 ☐ 주간활동서비스 ☐ 이동지원					
활동 지원 서비스	신청유형	☐ 신규 ☐ 갱신 ☐ 변경 ☐ 이의					
	(변경)신청사유	장애상태	☐ 해당없음 ☐ 신체·정신기능 상태 변화				
		생활환경	☐ 해당없음 ☐ 독거가구 ☐ 취약가구 ☐ 한부모가족 ☐ 조손가족 ☐ 거주지위치 ☐ 학교생활 ☐ 직장생활 ☐ 본인을 제외한 가족의 사회생활				
	특별지원급여	☐ 해당없음 ☐ 출산 ☐ 자립준비 ☐ 보호자 일시부재					
신청인	성명 (성별)	(남/여)		생년월일			
	주소	주민등록상 거주지					
		실 거주지					
	전화번호				휴대전화		
보호자 또는 주 수발자	성명				신청인과의 관계		전화 번호
장애유형	☐ 지체장애 ☐ 뇌병변장애 ☐ 시각장애 ☐ 청각장애 ☐ 언어장애 ☐ 지적장애 ☐ 자폐성장애 ☐ 정신장애 ☐ 신장장애 ☐ 심장장애 ☐ 호흡기장애 ☐ 간장애 ☐ 안면장애 ☐ 장루·요루장애 ☐ 뇌전증장애 * 중복시 모두 체크						
	주된 장애유형				중복 장애유형		
	성명1				일시 (소요시간)	. . . (분)	
성명2							
〈참고사항〉							

국민연금공단 ○○○○지사

2024 장애인보조기기 교부사업 품목 정보 안내서

II. 서비스 필요도 평가를 위한 기본조사

가. 일상생활분야

1. 성인용(만 19세 이상)

1) 가구환경

동거 가구원	☐ 없음 ☐ 있음 (가구원 수 : 명)	
가구원 상세 현황	☐ 배우자 ☐ 자녀 ☐ 부 ☐ 모 ☐ 형제·자매 ☐ 조부 ☐ 조모 ☐ 기타 () * 중복 시 모두 체크	
독거가구	☐ 해당 ☐ 미해당	
취약가구	☐ 해당 ☐ 미해당	
본인을 제외한 가족의 사회생활	☐ 해당 ☐ 미해당	
엘리베이터 설치	☐ 예 ☐ 아니오	
거주지위치	☐ 1층 ☐ 지하 1층 이하 ☐ 지상 2층 이상	
특이사항		

2) 사회활동

학교생활 여부	☐ 예 (학교명 :)	☐ 아니오
직장생활 여부	☐ 예 (직장명 :)	☐ 아니오
특이사항		

장애인보조기기 교부사업 참고서식

3) 일상생활동작(ADL)

구 분		① 지원 불필요	② 일부 지원필요	③ 상당한 지원필요	④ 전적 지원필요	특이사항
1	옷 갈아입기	☐	☐	☐	☐	
2	목욕하기	☐	☐	☐	☐	
3	구강청결	☐	☐	☐	☐	
4	음식물넘기기	☐	☐	☐	☐	
5	식사하기	☐	☐	☐	☐	
6	누운상태에서 자세바꾸기	☐	☐	☐	☐	
7	움거앉기	☐	☐	☐	☐	
8	시청각복합평가	☐	☐	☐	☐	
9	앉은자세유지	☐	☐	☐	☐	
10	실내이동	☐	☐	☐	☐	
11	실외이동	☐	☐	☐	☐	
12	배변	☐	☐	☐	☐	
13	배뇨	☐	☐	☐	☐	

4) 수단적 일상생활 동작(IADL)

구 분		① 지원 불필요	② 일부 지원필요	③ 상당한 지원필요	④ 전적 지원필요	특이사항
1	전화사용	☐	☐	☐	☐	
2	물건사기	☐	☐	☐	☐	
3	식사준비	☐	☐	☐	☐	
4	청소	☐	☐	☐	☐	
5	빨래하기	☐	☐	☐	☐	
6	약챙겨먹기	☐	☐	☐	☐	
7	금전관리	☐	☐	☐	☐	
8	대중교통이용	☐	☐	☐	☐	

5) 인지행동특성

구 분		① 지원 불필요	② 부분적 지원필요	③ 전적 지원필요	특이사항
1	주의력	☐	☐	☐	
2	위험인식 및 대처	☐	☐	☐	
3	환각·망상	☐	☐	☐	
4	조울상태	☐	☐	☐	
5	문제행동	☐	☐	☐	
6	공격행동	☐	☐	☐	
7	자해행동	☐	☐	☐	
8	집단생활부적응	☐	☐	☐	

2024 장애인보조기기 교부사업 품목 정보 안내서

2. 아동용(만 19세 미만)

1) 가구환경

동거 가구원	☐ 없음 ☐ 있음 (가구원 수 : 명)		
가구원 상세 현황	☐ 배우자 ☐ 자녀 ☐ 부 ☐ 모 ☐ 형제·자매 ☐ 조부 ☐ 조모 ☐ 기타 () * 중복 시 모두 체크		
한부모가족	☐ 해당 ☐ 미해당	조손가족	☐ 해당 ☐ 미해당
취약가구	☐ 해당 ☐ 미해당	본인을 제외한 가족의 사회생활	☐ 해당 ☐ 미해당
엘리베이터 설치	☐ 예 ☐ 아니오		
거주지위치	☐ 1층 ☐ 지하 1층 이하 ☐ 지상 2층 이상		
특이사항			

2) 사회활동

학교생활 여부	☐ 예 (학교명 :)	☐ 아니오
직장생활 여부	☐ 예 (직장명 :)	☐ 아니오
특이사항		

장애인보조기기 교부사업 참고서식

3) 일상생활동작(ADL)

구 분		① 지원 불필요	② 일부 지원필요	③ 상당한 지원필요	④ 전적 지원필요	특이사항
1	옷갈아입기	☐	☐	☐	☐	
2	목욕하기	☐	☐	☐	☐	
3	구강청결	☐	☐	☐	☐	
4	식사하기	☐	☐	☐	☐	
5	누운상태에서 자세바꾸기	☐	☐	☐	☐	
6	움거앉기	☐	☐	☐	☐	
7	걷기	☐	☐	☐	☐	
8	화장실사용하기	☐	☐	☐	☐	
9	시청각복합평가	☐	☐	☐	☐	

4) 수단적 일상생활 동작(IADL)

구 분		① 지원 불필요	② 일부 지원필요	③ 상당한 지원필요	④ 전적 지원필요	특이사항
1	전화사용	☐	☐	☐	☐	
2	물건사기	☐	☐	☐	☐	
3	금전관리	☐	☐	☐	☐	
4	대중교통이용	☐	☐	☐	☐	
5	본인물건관리하기	☐	☐	☐	☐	
6	학습하기	☐	☐	☐	☐	

5) 인지행동특성

구 분		① 지원 불필요	② 일부 지원필요	③ 상당한 지원필요	④ 전적 지원필요	특이사항
1	문제해동	☐	☐	☐	☐	
2	공격행동	☐	☐	☐	☐	
3	자해행동	☐	☐	☐	☐	
4	위험인지하기	☐	☐	☐	☐	
5	의사소통하기	☐	☐	☐	☐	

2024 장애인보조기기 교부사업 품목 정보 안내서

나. 이동지원분야

1. 성인용(만 19세 이상)

조사영역	조사항목	① 지원 불필요	② 일부 지원필요	③ 상당한 지원필요	④ 전적 지원필요	특이사항
일상생활동작	1. 옮겨 앉기	☐	☐	☐	☐	
	2. 앉은 자세 유지	☐	☐	☐	☐	
	3. 실내 이동	☐	☐	☐	☐	
	4. 실외 이동	☐	☐	☐	☐	
수단적 일상생활동작	5. 대중교통 이용	☐	☐	☐	☐	
인지행동특성	6. 주의력	☐	☐	☐	☐	
	7. 위험인식 및 대처	☐	☐	☐	☐	

2. 아동용(만 19세 미만)

조사영역	조사항목	① 지원 불필요	② 일부 지원필요	③ 상당한 지원필요	④ 전적 지원필요	특이사항
일상생활동작	1. 옮겨 앉기	☐	☐	☐	☐	
	2. 걷기	☐	☐	☐	☐	
수단적 일상생활동작	5. 대중교통 이용	☐	☐	☐	☐	
인지행동특성	7. 위험 인지하기	☐	☐	☐	☐	

장애인보조기기 교부사업 참고서식

Ⅲ. 욕구조사 및 급여이용 계획

※ 현재 일상생활 및 사회활동을 하는데 있어 어떠한 도움을 받고 앞으로 어떻게 이용하고 싶은지 확인하고 해당란에 ✓표로 표시함

1-1. 도움 내용	1-2. 도움 여부	1-3. 주로 도와주는 사람*	1-4. 이용횟수	1-5. 이용횟수 시간
☐ 신체수발	☐ 예 ☐ 아니오	()번 기타 : _____	()회/월	()시간/회
☐ 가사활동지원 (집안일 및 식사준비)	☐ 예 ☐ 아니오	()번 기타 : _____	()회/월	()시간/회
☐ 목욕지원	☐ 예 ☐ 아니오	()번 기타 : _____	()회/월	()시간/회
☐ 이동지원(병원·약국이동, 쇼핑, 산책, 친구· 이웃방문, 지역사회시설 이용, 종교활동, 문화·여가활동, 여행하기 등)	☐ 예 ☐ 아니오	()번 기타 : _____	()회/월	()시간/회
☐ 통학지원(등하교 이동지원)	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 비해당	()번 기타 : _____	()회/월	()시간/회
☐ 학습보조(학교 등)	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 비해당	()번 기타 : _____	()회/월	()시간/회
☐ 통근지원(출퇴근 이동지원)	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 비해당	()번 기타 : _____	()회/월	()시간/회
☐ 업무보조(직장 등)	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 비해당	()번 기타 : _____	()회/월	()시간/회
☐ 의사소통지원 (듣기, 쓰기, 전화사용 등)	☐ 예 ☐ 아니오	()번 기타 : _____	()회/월	()시간/회
☐ 간호서비스지원(기관지 절개관 간호, 흡인, 산소요법, 욕창간호, 도뇨관리 등)	☐ 예 ☐ 아니오	()번 기타 : _____	()회/월	()시간/회
☐ 기타()	☐ 예 ☐ 아니오	()번 기타 : _____	()회/월	()시간/회

〈보기〉

주로 도와주는 사람*

- | | | | |
|-------|-----------------------|------------------|---------|
| ① 배우자 | ② 부모 | ③ 자녀(며느리, 사위 포함) | ④ 형제·자매 |
| ⑤ 조부모 | ⑥ 손자녀 | ⑦ 친인척 | ⑧ 친구 |
| ⑨ 이웃 | ⑩ 활동지원사·유료 가정봉사원(간병인) | ⑪ 무료 가정봉사원(간병인) | ⑫ 자원봉사자 |
| ⑬ 기타 | | | |

※ 보기 중에서 주로 도와주는 사람을 하나씩만 선택하여 해당되는 번호를 기입해 주십시오.

2024 장애인보조기기 교부사업 품목 정보 안내서

5. [서식 5] 장애인보조기기 맞춤형 상담·평가 의뢰서

[서식 5]

장애인보조기기 맞춤형 상담·평가 의뢰서

성명	생년월일	주소	연락처	소득 수준	장애 유형	장애 정도	신청 보조기기 (품목)	비고

「장애인·노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용촉진에 관한 법률」 제8조제1항 및 같은 법 시행규칙 제4조제2항에 따라 보조기기 신청에 대한 상담 및 평가를 보조기기센터에 의뢰합니다.

20

(시장·군수·구청장) 또는
(읍·면·동장)

(인)

(지역명) 보조기기센터장 귀하

장애인보조기기 교부사업 참고서식

6. [서식 6] 장애인보조기기 교부사업 평가표

[서식 6]

장애인보조기기 교부사업 평가표

※ 교부사업 평가시 교부결정에 대한 참고자료로 활용될 수 있으며, 2p(대상정보~종합의견)는 시·군·구로 보내는 소견서 양식으로 활용

☐ 사용자 실태

① 사용 장소	☐ 가정 ☐ 병원 ☐ 학교(유치원 등) ☐ 시설(복지관 등) ☐ 기타()
② 자가 사용 정도	☐ 가능 ☐ 불가능(주 자원자:)
③ 사용 경험	☐ 있음 ☐ 없음
④ 교부받은 실적	☐ 신규 ☐ 기 교부(년, 교부기관 : , 종류 :)
⑥ 소득계층	☐ 기초생활수급권자 ☐ 차상위계층 ☐ 그외

☐ 장애정보

①	장애원인	발생시기	세
②	장애원인	발생시기	세

▶ 장애 진행 정도 및 문제점
☐ 예(진행원인 및 이유 :) ☐ 아니요

〈장애상태 기술〉

☐ 보조기기 지원의 적정성

항목	상담내용	낮음	←	보통	→	높은
		2	4	6	8	10
교부 환경의 적정성	① 해당 보조기기의 설치 환경의 적정성					
장애상태와 적정성	② 보조기기 사용에 필요한 조작능력					
	③ 장애 정도 및 상태에 따른 보조기기의 적합성					
활용계획의 적정성	④ 활용계획과 신청한 보조기기와의 적합성					
사용의 효과성	⑤ 보조기기 사용을 통한 문제해결의 정도					
총점						

2024 장애인보조기기 교부사업 품목 정보 안내서

□ 대상자 정보

성명		생년월일		성별	남() 여()
연락처	(일반전화) (휴대전화)	장애유형			
주소					
보호자	(성명)	(관계)	(연락처)		

□ 신청보조기기 및 활용계획

구분			
제품명		제품 가격	
활용계획	신청자가 보조기기 수혜시 활용계획을 작성(주요육구)		

□ 종합의견

□ 보조기기 사용에 적합 □ 대체 보조기기 추천 □ 보조기기 사용에 부적합 □ 신청 등 취소	
종합의견	신청 취소시 종합의견란은 취소사유 작성
추천보조기기	품목명(제품의 모델명)
보조기기정보	가격, 업체정보, 추천보조기기의 특성 등 추천보조기기의 정보를 필요한 부분만 작성

평가자 정보

- ▶ 기관명 :
- ▶ 평가자명 :
- ▶ 평가일자 :

장애인보조기기 교부사업 참고서식

□ 평가기준(품목별 확인사항)

장애	보조기기	기본 확인사항
심장	욕창예방 방식	- 독립적인 체위 변환이 어려워 욕창발생 할 가능성이 있는가? - 수동 및 전동휠체어 등의 보조기기를 이용하고 있는가?
심장	욕창예방 매트리스	- 독립적인 체위 변환이 어려워 욕창발생 할 가능성이 있는가?
지체 뇌병변 심장 호흡기	미끄럼 및 회전을 위한 보조기기	- 수동 및 전동휠체어 등의 이동보조기기를 이용하고 있는가? - 수동 및 전동휠체어 등으로 옮겨 앉기에 어려움이 있는가?
	의류 및 신발 (장애인용 의복)	- 관절 구축, 관절가동범위 제한 등으로 옷입기에 어려움이 있는가? - 수동 및 전동휠체어 등 이동보조기기로 이동시 방수, 방한이 필요한가?
	휠체어 액세서리	- 수동 및 전동휠체어 등의 이동보조기기를 이용하고 있는가? - 착석 자세에서 일부 체간의 고정이 필요한가?
	침대 및 탈착식 침대 판/ 전동조절식 매트리스 지지단 (전동침대)	- 누운 상태에서 독립적인 체위변환의 어려움이 있는가? - 누운 상태에서 스스로 일어나 앉기에 어려움이 있는가?
	소변수집장치	- 소변처리 과정에서 보조인의 완전한 도움이 필요한가? - 보행이 불가능한가? - 소변처리를 위해 기저귀 등과 소모성 흡수제품을 사용하는가?
	개인비상경보시스템 (낙상알림기)	- 침대를 사용하고 있는가? - 신체적인 균형 유지(앉기, 서기, 침대에서 내려올 때 등)가 어려워 지원이 필요한가?
	독서용 탁자, 책상 및 독서대	- 일반적인 책상 (이용)접근의 어려움이 있는가? - 책상 활용이 필요한 활동을 하고 있는가?
지체 뇌병변	기립틀 및 기립을 위한 지지대(기립훈련기)	- 골반, 무릎, 발목 등에 구축이 있는가? - 일부 보행이 가능한가? - 병원, 복지관 등 기립보조기기를 이용 경험이 있는가?
	보행차	- 스스로 일어서고, 일부 보행(물체를 잡는 등)이 가능한가?
	좌석형 보행차	- 외출 활동이 있는가?(하루 몇 회, 시간 등) - 지팡이, 유도차, 보행기 사용 경험이 있는가?
	탁자형 보행차	- 주로 이동하는 지면의 상태는 어떠한가?
	음식섭취 보조기기	- 손 및 손목 등의 사용이 가능한가? - 물체를 잡거나 쥐는 등의 동작이 가능한가? - 보호자 또는 보조인의 일부 도움을 통해 식사가 가능한가?
	목욕의자	- 착석시 신체적 균형유지가 가능한가? - 목욕의자를 이용한 경험이 있는가?
	경사로(휴대용 경사로)	- 전동스쿠터, 전동 또는 수동휠체어 등 이동보조기기를 이용하는가? - 일상생활 환경(가정 또는 주요활동장소 등)에 단차해소가 필요한 곳이 있는가?
	이동변기	- 독립적인 보행 및 이동이 어려워 보조인의 일부 또는 완전한 지원이 필요한가? - 신체적인 균형 유지가 어려운가? - 배뇨, 배변활동시 일부 또는 완전한 지원이 필요한가?
	차량 내 착석을 위한 좌석과 방식, 액세서리, 개조용품 (장애인용 카시트)	- 앉을 때 균형잡기의 어려움이 있는가? - 일반 카시트 사용의 어려움이 있는가? - 차량내 탑승시(차량내 벨트 착용) 안정적 자세유지의 어려움이 있는가?

2024 장애인보조기기 교부사업 품목 정보 안내서

장애	보조기기	기본 확인사항
지체 뇌병변	독립형 변기 팔 지지대 및 등지지대	- 앉거나 일어서기가 어려워 일부 지원이 필요한가? - 앉을 때 균형잡기의 어려움이 있는가?
	환경 제어 장치	- 이동의 어려움이 있는가? - 손을 뺀거나 손 조작의 어려움이 있는가?
	지지대 및 손잡이 (안전손잡이)	- 신체적인 균형 유지(앉거나 일어서기 등)가 어려워 일부 지원이 필요한가? - 일상생활 환경(가정 또는 주요 활동 장소 등)에 신체 지지가 필요한 곳이 있는가? - 이동(실내/실외)할 때 신체 지지가 필요한가? - 손잡이를 잡거나 지지할 수 있는가? - 손잡이를 잡고 지지한 채 자세유지가 가능한가?
	장애인용 유모차	- 이동시 보조인의 도움이 필요한가? - 수동휠체어의 기능적 조작 및 추진시 보조인의 도움이 필요한가?
	바닥 특수 얹기 자세유지용 장치(피더시트)	- 머리 가누기의 어려움이 있는가? - 체간 조절의 어려움이 있는가? - 상지 기능의 어려움이 있는가?
	목욕용 미끄럼방지용품	- 이동시 보조인 또는 안전손잡이 등의 도움이 필요한가?
뇌병변 지적 자폐성 청각·언어	대화용장치	- 말이 어눌하고 대화 및 표현의 어려움이 있는가? - 발성에 어려움이 있는가? - 단어 및 문장 등 언어 학습이 필요한가?
청각	신호장치 (시각신호표시기)	- 진동 및 빛 등을 감지하는 능력에 이상이 없는가? - 제품을 설치할 수 있는 환경인가?
	진동시계	- 진동을 감지하는 능력에 이상이 없는가? - 시각적 문제는 없는가?
	헤드폰 (청취증폭기)	- 큰소리(TV, 라디오 소리 등)에는 반응을 하는가? - 보청기를 사용하는가?
	표준네트워크전화기 (영상전화기)	- 수어사용이 가능한가? - 시각적 문제는 없는가?
시각	음성유도장치 (음향신호기 리모컨)	- 청각에 이상이 없는가? - 음향신호기 리모컨 조작이 가능한가?
	음성시계	- 청각에 이상이 없는가?
	영상 확대 비디오 시스템 (독서확대기)	- 확대된 글자를 해독할 수 있는가? - 작은 버튼 등을 조작할 수 있는 손 기능이 원활한가? - 기기 조작이 가능한가? - 돋보기를 통해 글자를 볼 수 있는가?
	문자판독기 (광학문자판독기)	- 청각에 이상이 없는가? - 촉각을 통해 물체의 위치 등을 파악 할 수 있는가? - 기기 조작이 가능한가?
	녹음 및 재생장치	- 청각에 이상이 없는가? - 촉각을 통해 기기조작이 가능한가? - 데이지(DAISY) 플레이어 주요 콘텐츠를 보유하거나 사용할 수 있습니까?

장애인보조기기 교부사업 참고서식

장애	보조기기	기본 확인사항
시각	녹음 및 재생장치	- 청각에 이상이 없는가? - 촉각을 통해 기기조작이 가능한가? - 데이지(DAISY) 플레이어 주요 콘텐츠를 보유하거나 사용할 수 있습니까?
	특수키보드 (모바일제어 특수키보드)	- 촉각을 통해 기기조작이 가능한가? - 청각에 이상이 없는가? - 모바일제어 특수키보드 연결이 가능한가?
	특수출력소프트웨어 (화면읽기 소프트웨어)	- 청각에 이상이 없는가? - 화면확대 기능 활용에도 읽기에 어려움이 있는가?
뇌병변	대체입력장치 (스위치)	- 대화용 장치(AAC)를 사용하고 있는가? - 대화용 장치(AAC)의 표현하고자 하는 단어 등을 손으로 정확하게 누를 수 있는가?
지체 뇌병변 지적, 자폐성	기억 지원 보조기기	- 약을 복용하고 있는가? - 규칙적인(정해진 시간) 약 복용을 위한 지원이 필요한가? - 정량의 약 복용을 위한 지원이 필요한가?

2024 장애인보조기기 교부사업 품목 정보 안내서

7. [서식 7] 장애인보조기기 신청(□ 변경 □ 취소) 확인서

[서식 7]

장애인보조기기 신청 (□ 변경 □ 취소) 확인서

□ 신청한 보조기기(품목) :

□ 변경 : (변경하려는 품목 또는 제품명 기재)

※ 변경 사유 작성 (①대체 보조기기 추천하여 변경하려는 경우, ②대상자가 신청한 보조기기 제품을 변경하려는 경우 등 구체적인 사유를 기재)

□ 취소

※ 취소 사유 작성

위와 같이 장애인보조기기 신청을 (□ 변경, □ 취소) 하였음을 확인합니다.

년 월 일

신청자(또는 대리인) 성명 :

(인)(대리인 관계:)

장애인보조기기 교부사업 참고서식

8. [서식 8] 장애 정도 심사용 진단 의뢰서

[서식 8]

장애인복지법 시행규칙 [별지 제2호서식]

제 호

장애 정도 심사용 진단 의뢰서

○ 성 명 :

(주민등록번호/외국인등록번호 또는 국내거소신고번호 :)

○ 성 별 :

○ 주 소 :

○ 장애유형 :

「장애인복지법 시행규칙」 제3조제2항에 따라 위 사람의 장애진단을 의뢰하오니 같은 법 시행규칙 제2조제2항 및 별표 1에 따른 장애 정도 판정기준에 따라 진단하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

시장·군수·구청장

직인

(의료기관장) 귀하

※ 첨부: 장애 정도 심사용 진단서 서식 2부

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

2024 장애인보조기기 교부사업 품목 정보 안내서

9. [서식 9] 장애 정도 심사용 진단서

[서식 9]

장애인복지법 시행규칙 [별지 제3호서식]

장애 정도 심사용 진단서

진단 대상자	성명	성별	
	주민등록번호		
	주소 (전화번호:)		
장애 상태	장애유형		
	장애 부위 또는 질환명		
	장애원인		
	장애 발생 시기		
진료기관 및 의사	의료기관	의사	진료기간 ... ~ ...
	의료기관	의사	진료기간 ... ~ ...
진단의사의 조건	※ 장애 정도 판정기준에 따라 검사항목·검사결과·장애 상태를 구체적으로 기재		
재판정	필요사유	재판정할 시기	

「장애인복지법」 제32조 및 같은 법 시행규칙 제3조제3항에 따라 장애 진단 결과를 통보합니다.

년 월 일

(의사 면허번호) 진단의사명 (서명 또는 인)
(전문의 자격번호) (전문의 과목)

진단기관명

직인

시장·군수·구청장 귀하

유의사항 및 작성방법

1. 장애진단 및 진단서 발행 시 진단 받는 자가 본인임을 확인해야 합니다.
2. 성명, 주민등록번호 등을 위조하거나 변조할 수 없도록 투명테이프 처리한 후에 장애진단의뢰기관에 송부함을 원칙으로 하되, 부득이 사람을 통해 교부하는 경우 봉투의 봉합부분에 의료기관의 간인을 찍어야 합니다.
3. 장애유형은 「장애인복지법 시행규칙」 제2조에 따른 장애유형을 기재합니다.
4. 진단의사의 소견란에 X-ray 촬영 여부 등 구체적인 사항을 기재해야 하며, 보건복지부 고시에 따른 장애 정도 판정기준에 부합해야 합니다.
5. 장애심사와 관련하여 장애진단을 위한 진료기록 등을 사후에 확인할 수 있습니다.

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

장애인보조기기 교부사업 참고서식

10. [서식 10] 장애인보조기기(□ 교부 □ 대여 □ 사후관리(수리, 점검 등)) 의뢰서

[서식 10]

장애인·노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용촉진에 관한 법률 시행규칙 [별지 제1호서식]

장애인보조기기 ☐ 교부 ☐ 대여 ☐ 사후관리(수리, 점검 등) 의뢰서			
인적사항	성명	생년월일	성별 남·여
	주소	전화번호	
	장애유형	장애정도	
보조기기 교부(품목 및 제품 종류)			
보조기기 대여(품목 및 제품 종류)			
보조기기 사후관리(수리 필요 부위, 점검 사항 등)			
비고			
「장애인·노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용촉진에 관한 법률」 제8조제1항 및 같은 법 시행규칙 제5조제1항 본문에 따라 장애인 보조기기의 교부·대여·사후관리 의뢰서를 위와 같이 발급합니다. 년 월 일 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 직인			

2024 장애인보조기기 교부사업 품목 정보 안내서

11. [서식 11] 장애인보조기기 교부 확인서

[서식 11]

장애인보조기기 교부 확인서						
교부받은 사람	성명		생년월일		전화번호	
	주소					
	장애유형			장애정도	☐ 심한 장애 ☐ 심하지 않은 장애	
보조기기	품목					
	교부일			교부처		
	가격			기타		
교부확인	보조기기의 실제 교부여부 등 확인한 내용을 구체적으로 기재					
	[사진]			[사진]		
위와 같이 보조기기가 교부되었음을 확인합니다. 년 월 일 소속 : 직급 : 담당자명 : 서명 또는 인						

장애인보조기기 교부사업 참고서식

12. [서식 12] 장애인보조기기(□ 교부 □ 대여 □ 사후관리(수리, 점검 등)) 비용청구서

[서식 12]

장애인·노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용촉진에 관한 법률 시행규칙 [별지 제2호서식]

□ 교부
장애인보조기기 □ 대여 **비용청구서**
 □ 사후관리(수리, 점검 등)

※ 색상이 어두운 난은 청구인이 작성하지 않으며, []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일시	처리기간	15일
보조기기업체	업체명	대표자	생년월일
	주 소		우편번호
			전화번호
청구내용	인적사항	성명	생년월일
		주 소	성별 []남 []여
	보조기기 교부·대여· 사후관리 명세	장애통계 유형 및 정도	비용 청구금액 천원
검수확인	검수확인자	자격종류 []의지보조기기사 []보조공학사	자격번호

「장애인·노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용촉진에 관한 법률」 제8조제1항 및 같은 법 시행규칙 제6조제항에 따라 보조기기의 교부·대여·사후관리 비용 지급을 위와 같이 청구합니다.

년 월 일

청구업체


(서명 또는 인)

시장·군수·구청장

귀하

첨부서류	「장애인·노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용촉진에 관한 법률 시행규칙」 제4조제3항에 따른 의료기관의 진단서가 있는 경우에는 그 진단서에 따라 보조기기가 교부등이 이루어졌다는 확인서 1부	수수료 없 음
------	--	------------

처리절차

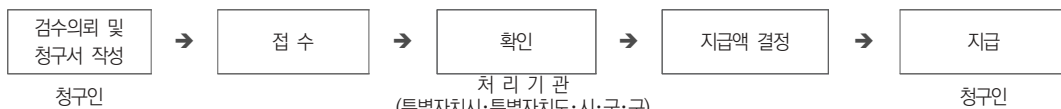

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

2024 장애인보조기기 교부사업 품목 정보 안내서

기다 - 행복e음 사용법

* 시스템 세부사항은 변동될 수 있으며 자세한 사항은 한국사회보장정보원에 문의하시기 바랍니다.

1. 장애인보조기기교부 신청 처리절차 변경사항

1.1 장애인서비스신청

상담 · 신청 > 신청관리 > 신청정보등록 > 장애인서비스신청

- (1) ① 신청인 정보 입력
- (2) ② 신청 서비스 정보에서 '장애인보조기기 교부신청' 선택 후, 장애인 정보 입력
- (3) ③ 장애인보조기기 교부신청 정보 입력
- (4) ④ 사전중복확인
 - 보장구 급여신청 정보에서 '신청보장구명' 선택 후 '사전중복확인' 버튼을 클릭하면 '장애인보조기기 중복 조회' 팝업 호출

장애인보조기기 교부사업 참고서식

장애인보조기기 중복체크 대상 사업

순번	부 처	운영기관	사업명
1	보건복지부	지자체	장애인 보조기기 교부사업
2			장애인 보조기기 지원사업 (의료급여)
3		건강보험공단	장애인 보조기기 지원사업 (건강보험급여)
4			노인장기 요양보험 복지용구 지원사업
5	고용노동부	한국장애인고용공단	보조공학기기 지원사업
6		근로복지공단	산재보험급여 직무지원형 재활보조기기 지급사업
7	국가보훈처	보훈처	국가유공자보철구지급
8	과학기술정보통신부	한국지능정보사회진흥원	정보통신 보조기기 보급사업

2024 장애인보조기기 교부사업 품목 정보 안내서

상담 · 신청 > 신청관리 > 신청정보등록 > 장애인서비스신청 > 사전중복확인 “팝업”

장애인보조기기 중복조회

③ 지급 중복현황

지급일자	구입일자	기관명	기관사업명	기관품목 코드	기관품목명	지급채종명	내구연한 만료일자	표준품목 코드	표준품목명

* 지급중복현황이 있을 시 신청취소 해야 합니다. 단 예외지급 사유가 존재 시 예외지급코드와 예외지급사유를 입력 후 신청 진행을 할 수 있습니다.

④ 신청 중복현황

신청일자	기관명	기관사업명	기관품목 코드	기관품목명	표준품목 코드	표준품목명

* 신청 중복현황이 있음에도 신청 진행을 할 경우 중복수급이 발생할 수 있습니다.

신청진행 신청취소

Message

중복된 건이 없습니다.

5 확인

장애인보조기기 중복조회

③ 지급 중복현황

지급일자	구입일자	기관명	기관사업명	기관품목 코드	기관품목명	지급채종명	내구연한 만료일자	표준품목 코드	표준품목명
2013-02-01		복지부자립기반과	장애인보조기구교	043303	음향식 및 커버(목상예1111)		20240201	04330300	음향예발방식 및 커버

* 지급중복현황이 있을 시 신청취소 해야 합니다. 단 예외지급 사유가 존재 시 예외지급코드와 예외지급사유를 입력 후 신청 진행을 할 수 있습니다.

④ 신청 중복현황

신청일자	기관명	기관사업명	기관품목 코드	기관품목명	표준품목 코드	표준품목명

* 신청 중복현황이 있음에도 신청 진행을 할 경우 중복수급이 발생할 수 있습니다.

신청진행 신청취소

5

장애인보조기기 교부사업 참고서식

(5) ⑤ 신청진행 또는 신청취소

- 팝업에서 중복현황정보 확인 후 중복 신청 또는 지급정보가 없을 경우 확인 후 장애인 서비스신청 진행
- 중복 지급정보 존재 시, 팝업 상단의 '지급 중복현황'에서 확인 가능
 - ※ 표준품목코드(욕창예방방석 및 커버) 기준으로 동일한 품목이 지급된 정보 1건 확인
 - ☞ 지급중복현황이 있을 시 신청취소 해야 함. 단 예외지급 사유 존재 시 예외지급코드와 예외지급사유 입력 후 신청 진행 가능
- 중복 신청정보 존재 시, 팝업 하단의 '신청 중복현황'에서 확인 가능
 - ※ 표준품목코드(욕창예방방석 및 커버) 기준으로 동일한 품목이 신청된 정보 0건 확인
 - ☞ 신청중복현황이 있음에도 신청 진행할 경우 중복수급이 발생할 위험이 있음
- 팝업에서 중복현황정보 확인 후 '신청진행' 또는 '신청취소' 버튼을 클릭하여 신청접수 또는 취소 진행
- 팝업에서 '신청취소' 버튼 클릭 시, '저장' 버튼 비활성화

(6) ⑥ 예외지급코드 및 예외지급사유 입력 - 중복조회 결과 지급 중복현황이 존재하나 신청진행 시, '예외지급 코드' 입력 필수

- '예외지급코드'에서 '기타' 선택 시 '예외지급사유'를 텍스트로 필수 입력
 - ※ 중복조회 결과 신청 중복현황 존재시, '예외지급코드' 및 '예외지급사유' 입력이 불요 하나 그대로 신청을 진행할 경우, 사후 중복수급 정보 발생 가능

(7) 구비서류 입력

(8) ⑦ 장애인서비스 신청 저장

- 신청된 정보를 확인하고 '저장' 버튼 클릭하여 신청 정보 저장
- 신청처리만 되며 잘못 입력한 내역에 대해 수정 가능

(9) 장애인서비스 신청 접수

- 장애인서비스 신청 저장 후에 '신청상태관리' 버튼 클릭하여 접수 처리
- 접수 처리 이후 수정 불가능

2024 장애인보조기기 교부사업 품목 정보 안내서

상담 · 신청 > 신청관리 > 신청정보등록 > 장애인서비스신청

사회복지통합관리망

사회복지 테스트 화면 테스트님 로그인 마이페이지 민원접수 민원처리현황(0)

복지대상자 통계 상담 신청 조사 결정 급여 변동 사후 국토부업무지원 자료정보 한부모가족 기초생활보장 긴급복지

장애인서비스신청 신청 메뉴 도움말 관할면사무소

신청인 정보 (내국인 외국인 사회복지자전산관리번호부여자) 직권신청

성명 주민등록번호 전화번호 휴대전화

주소 세대주와 관계 선택 전자우편

장애인서비스

장애인보조기기교부신청 정보 사전등록확인 전출입정보조회

전 주소 전입년월일

주거형태 선택 사회보장번호

희망보조기구 육상방지용방석 및 커버 기타희망보조기구 선택

처방병원명 처방 의사명 전문의자격번호

의사면허번호 전문의과목명

검수병원명 검수 의사명 전문의자격번호

의사면허번호 전문의과목명

교부받은 실적 조회 교부년도 종류 교부기관

6 예외지급코드 선택

예외지급사유 분실 파손 기기변형

감면 서비스

서비스 TV수신료 면제 자동차관련 지방세(자동차, 면허세, 등록세, 취득세) 휴대전화요금 감면 전기요금 감면

7

상당등록 : 결이력보기 원스크린

서비스전행현황 신청서미리보기 초기화 신청상태관리 저장

2024
장애인보조기기 교부사업
품목 정보 안내서

V

자주묻는 질문 Q&A

자주묻는 질문 Q&A

자주 묻는 질문 Q&A

01 ▶ 장애인보조기기 교부품목 지급기준 관련

1-1. 장애인 등록이 되어 있지 않다. 신청이 가능한가?

- 시·군·구(읍·면·동)에 장애인으로 먼저 등록을 하시고 장애유형에 맞게 보조기기를 신청하시면 됩니다.

1-2. 보조기기 신청절차 및 지급절차는 어떻게 되는가?

- 장애인 등록(신청인) → 읍·면·동 사무소(동주민자치센터)에 신청(신청인) → 교부 대상 검토(읍·면·동 사무소) → 자격기준 검토(시·군·구청) → 서비스 지원 종합조사(국민연금공단) → 최소 적격기준 검토(시·군·구청) → 보조기기 맞춤형 평가(보조기기센터, 보조공학 관련 기관) → 진단(필요한 경우 : 의료 기관) → 교부결정(시·군·구청) → 교부결정 결과 공유(보조기기센터, 보조공학 관련 기관) → 보조기기 교부(시·군·구청, 지역보조기기센터 또는 보조기기업체) → 교부비용 청구(지역보조기기센터 또는 보조기기업체) → 교부비용 지급(시·군·구청) → 검수 및 사후관리(시·군·구청)

1-3. 보조기기 교부 품목 신청은 어디로 합니까?

- 거주지 시·군·구에서 지급하는 시기에 시·군·구(읍·면·동 사무소(동주민자치센터))에 신청해야 합니다.

1-4. 보조기기 신청은 수시로 가능 합니까?

- 수시 신청 가능합니다. 거주하는 읍·면·동 사무소(동주민자치센터)에 확인하고 신청해야 합니다.

1-5. 건강보험대상자인 경우 신청 가능한가요?

- 장애인보조기기 교부품목은 국민기초생활보장법상 수급자 및 차상위 계층을 지원하는 사업이므로 건강보험대상자는 신청 할 수 없습니다.

2024 장애인보조기기 교부사업 품목 정보 안내서

1-6 교부품목은 전액 무상으로 지원되나요?

- 신청한 보조기기가 지원 금액을 초과 할 경우 초과금액은 본인이 부담해야 합니다.
- 초과금액이 소액인 경우 지자체에서 부담해주는 경우도 있습니다. 관련 내용은 거주하는 읍·면·동 사무소(동주민자치센터)에 문의해야 합니다.

1-7 음식보호대와 접시 및 그릇 2개 품목 신청 가능한가요?

- 5만원 미만의 중복되지 않는 품목은 5만원 미만의 품목이 중복되지 않도록 신청 가능합니다.
- 지체 및 청각 중복장애인 경우 진동시계(3만원)와 음식보호대(5만원), 또는 지체장애인 경우 접시 및 그릇(5만원)과 음식보호대(5만원)는 신청 가능합니다.

1-8 전년도에 욕창예방 방식을 교부 받아 사용중이다. 올해 욕창예방 방식을 재 신청하려고 하는데 가능한가?

- 욕창예방 방식의 내구연한이 3년이므로 올해는 신청할 수 없습니다. 2년 후에 재신청이 가능합니다. 하지만 욕창 예방 방식이 아닌 다른 품목은 신청 가능합니다.

1-9 올해 보행차를 신청해서 교부받았다. 목욕의자도 필요해서 신청하려고 한다. 교부받을 수 있는가?

- 장애인보조기기 교부사업은 당해 연도 보조기기 신청시 1인 1제품에 한합니다. 이에 교부 불가능합니다.

1-10 지체 장애인인 경우 청각장애인 보조기기 품목 신청 가능하니까?

- 교부품목으로 지급되는 보조기기는 지체, 뇌병변, 시각, 청각장애인에게 구분되어 지급하므로 각각의 장애 특성에 맞는 보조기기 신청만 가능합니다.
- 청각 중복 장애로 등록되어 있으면 신청 가능합니다.

자주 묻는 질문 Q&A

1-11 사·청각 장애인의 경우 지급 받을 수 있는 품목은 무엇입니까?

- 시각장애인은 음성유도장치(음향신호기 리모컨), 음성시계, 영상 확대 비디오 시스템(독서확대기), 문자 판독기(광학문자판독기), 녹음 및 재생장치, 특수키보드(모바일제어 특수키보드), 특수출력 소프트웨어(화면읽기 소프트웨어) 7개 품목 중에 내구연한 내 1년에 1개 품목 신청 가능합니다.
- 청각장애인은 신호장치(시각신호표시기), 진동시계, 헤드폰(청취증폭기), 표준네트워크 전화기(영상전화기) 4개 품목 중에 내구연한 내 1년에 1개 품목 품목 신청 가능합니다.

1-12 청력이 많이 안 좋다. 헤드폰(청취증폭기)을 신청하려고 한다. 신청 가능한가?

- 청력이 많이 안 좋은 경우는 전문의의 검사를 통해 보청기 또는 음성증폭기 사용 가능 여부를 확인 후, 처방에 따라 보청구(보청기)를 선택 또는 음성증폭기 사용이 가능하다면 교부품목(헤드폰(청취증폭기)), 정보통신기(음성증폭기)를 신청하는 것이 좋습니다. 보청기가 필요한 난청 장애인이 음성증폭기를 사용할 경우 오히려 청력을 더 악화시킬 수 있기 때문입니다.

1-13 2년 전에 노인장기요양 복지용구로 목욕의자, 성인용보행기를 지급받았다. 올해 교부품목으로 목욕의자 및 보행차를 지급 받을 수 있는가?

- 전 부처 보조기기 지원사업에 의해 동일한 보조기기를 지급받고 내구연한이 도래하지 아니한 경우는 신청할 수 없습니다.

1-14 교부품목 보조기기를 처방전 없이 신청 할 수 있는가?

- 교부되는 보조기기는 기립틀 및 기립을 위한 지지대(기립훈련기)를 제외한 전 품목 처방전 없이 신청 가능합니다.
- 장애인복지법 시행규칙 2014.8.6 제46조에 의하면 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 진단을 의뢰하지 아니하고 교부 등을 할 수 있습니다.
 1. 교부 등을 하여야 할 장애인보조기기가 장애인의 정보접근이나 일상생활의 편의를 위하여 사용하는 생활용품인 경우

2024 장애인보조기기 교부사업 품목 정보 안내서

2. 장애인보조기기의 수리가 그 장애인보조기기의 주요 기능에 영향을 미치지 아니하는 정도의 것인 경우
(육창예방 방식, 육창예방 매트리스)
- 다만 장애 정도가 신청하는 보조기기가 없어도 활동에 제약이 없다고 판단된다면 처방전을 요구하는 것이 한 방법이 될 수 있습니다.

1-15 보조기기를 구입하고자 할 때, 어디서 사고 어디로 가야 하는가?

- 구입하기 전에 보조기기 센터에 방문해서 상담과 평가를 통해 사용 하실 분에게 가장 적합한 보조기기와 구입처에 대한 정보를 받을 수 있습니다.
- 상담과 평가가 필요하지 않은 보조기기라면 1670-5529로 문의하면 관련내용에 관해 신속한 정보제공을 받을 수 있습니다.

1-16 교부 받은 보조기기 수리는 어디에서 받을 수 있나요?

- 사용자가 직접, 사용하고 있는 보조기기 업체에 연락해서 수리 가능 제품인지, 부품이 있는지, 수리비용은 얼마인지, 서비스 가능 유·무 확인 가능합니다.
- 수리 가능 여부, 부품유무, 발생비용 등에 대하여 정보를 갖고 있는 경우 거주지 인근 지자체 수리사업을 수행하는 기관에서 수리 가능합니다.
- 사용하고 있는 보조기기 업체 명칭을 알 수 없는 경우 또는 전문가의 의견을 필요로 하는 등의 수리는 보조기기센터에서 가능합니다.

1-17 파손된 보조기기 재신청은 할 수 있나요?

- 사용자의 부주의로 인해 파손된 보조기기 재신청 할 수 없습니다.
- 고의성이 없거나, 신체적인 성장 등의 사유는 시·군·구청장이 재교부 필요성을 인정하는 경우에 재교부 가능합니다.

자주 묻는 질문 Q&A

02 ▶▶ 교부품목 지급기준 관련(지자체 공무원 대상)

2-1 교부품목 이외의 보조기기 품목코드를 알고 싶다. 참고할 자료가 있는가?

- 법제처 국가법령정보센터(<http://www.law.go.kr>) 홈페이지 → 행정규칙 → “보조기기 품목분류 등에 관한 고시”를 검색 → [별표 1] “보조기기 품목분류 체계”를 다운받아 참고하시면 됩니다.

03 ▶▶ 교부품목 등록 관련(보조기기 업체 관계자 대상)

3-1 보조기기 교부품목 품질검사, 제품 등록은 어디로 합니까?

- 보건복지부 국립재활원 장애인보조기기 품질관리사업에 품질검사 및 품목을 등록제 시기에 등록하시면 됩니다. 문의 02-901-1989 웹사이트 <http://knat.go.kr/> 공지사항 참고

관리번호 C-16-24-01

2024 장애인보조기기 교부사업 품목 정보 안내서

발 행 일 2024년 3월
발 행 인 국립재활원장 강윤규
편 집 인 김동아
발 행 처 국립재활원 공공재활의료지원과
서울시 강북구 삼각산로 58
전화 / 02-901-1989
인 쇄 처 장애인유권자 인쇄사업부

사전 승인없이 간행물 내용의 무단복제를 금함.